



MANNHEIM Galea-Haken, steriles Set (bestehend aus 4 Haken und 4 Schnüren)

REF: EEF-9

Zubehör:

- Klemme, z.B. PEAN



Einmalprodukt, nicht wiederverwenden!



Die MANNHEIM Galea-Haken dürfen nur von sachkundigem medizinischem Personal angewendet und entsorgt werden!

Diese Anweisung ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung von Produkten, die parallel zu den MANNHEIM Galea-Haken angewendet werden.

Die Verpackungseinheit MANNHEIM Galea-Haken enthält jeweils vier Haken und Silikonschnüre.

MANNHEIM Galea-Haken sind zur kurzzeitigen Anwendung bestimmt (> 60 Min. bis 30 Tage).

Bestimmungsgemäße Anwendung

Die MANNHEIM Galea Haken dienen dem selbsthaltenden elastischen Ab- oder Aufspreizen von Hautgewebe. Insbesondere wurden diese zur Retraktion der Galea bei Eingriffen im/am Schädel konzipiert

Indikationen und Kontraindikationen

Indikationen

- Darstellung von Strukturen unterhalb des Hautgewebes

Kontraindikationen

- Keine bekannt

Mögliche Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von MANNHEIM Galea-Haken kann es funktionsbedingt zur Traumatisierung des retrahierten Gewebes kommen.

Vor der Anwendung:



Steril, Verpackung auf Unversehrtheit überprüfen!
Bei Verwendung von Produkten aus beschädigten Verpackungen besteht Infektionsgefahr!
Produkte aus beschädigten Verpackungen nicht einsetzen und zum Hersteller zurückschicken!
Produkte, deren Verfallsdatum abgelaufen ist, nicht einsetzen! Infektionsgefahr!



Vor der Anwendung ist eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Dabei auf die Unversehrtheit der Geometrie, insbesondere auf Risse und Brüche, achten!

Nur einwandfreie Produkte einsetzen!

Haken vorsichtig behandeln! Schläge und punktuelle Belastungen vermeiden!
Bruchgefahr → Verletzungsgefahr!



Beim Durchziehen der Silikonschnur auf die Spitzen der Haken achten, um Beschädigungen der Handschuhe bzw. Verletzungen der Haut zu vermeiden. Verletzungsgefahr!

Nur einwandfreie, sterile Produkte einsetzen!



Zur Vorbereitung die Silikonschnur ca. zur Hälfte einfach durch die Öse des Hakens ziehen.

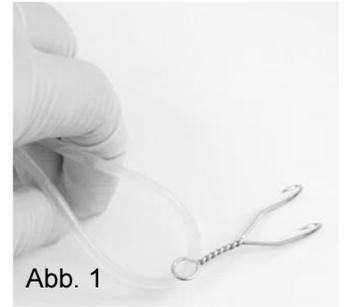


Abb. 1

Während der Anwendung:



Bei der Anwendung das zu retrahierende Gewebe nicht stärker belasten als für den angestrebten Operationszweck unvermeidlich.

Die Kopfhaut wird vom Schädelknochen disseziert. Den Haken an zweckmäßiger Stelle der Inzision platzieren und im Hautgewebe verankern. (In den Abbildungen durch Schaumstoff simuliert).

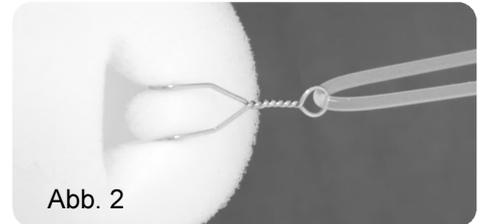


Abb. 2

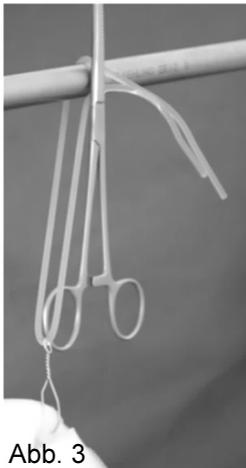


Abb. 3

Die Silikonschnur an dem jeweiligen Retraktorsystem oder Halteelement, beispielsweise dem THOREXPO Winkelstab EEJ-2 (Abb. 3) in Verbindung mit der Halteklau EEK-1F oder am Winkelstab eines beim Anwender verfügbaren Haltesystems anbringen.

Ideales Haltesystem ist das variabel anpassbare FEHLING-System (Abb. 4), bestehend aus den Halteklauen EEJ-4 und den Halbestäben EEJ-5 (links) und EEJ-6 (rechts), siehe Montageanleitung in GAW G111. Die Befestigung erfolgt mittels einer Pean-Klemme (Abb. 3 und 4).

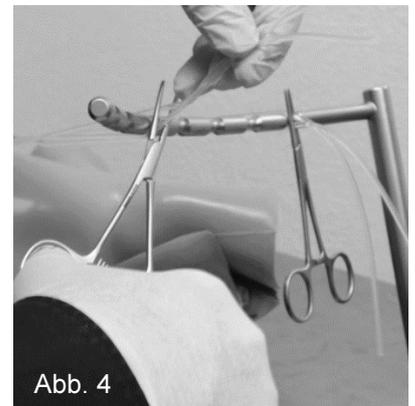


Abb. 4



Überdehnung und zu starkes Komprimieren der Silikonschnur mit der Klemme können zum Zerreißen und dadurch zur Verletzung von Patient und Anwender führen.

Nach der Anwendung



MANNHEIM Galea-Haken und Schnüre fachgerecht gemäß Vorschrift in das für benutzte Einmalprodukte im OP vorhandene Sammelbehältnis entsorgen.
Nicht aufbereiten, nicht wieder verwenden!
Einmalprodukt – Infektionsgefahr bei Wiederverwendung!

Transport- und Lagerungsbedingungen



Silikone wie das hier verwendete SIC 8363 sind elastisch und wärmebeständig zwischen -20°C und 55°C. Die Haltbarkeit des Silikonproduktes beträgt 2 Jahre ab Fertigung. Verfallsdatum beachten! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht verwenden!



Symbolerklärung:					
Einmalinstrument - nicht wiederverwenden!	Gebrauchsanwei- sung beachten!	Achtung!	Verwendbar bis	Artikel- nummer	Chargencode
Mit Ethylenoxid sterilisiert	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden!	Trocken lagern!	Vor übermäßiger Hitze schützen!	Hersteller	Benannte Stelle
	Jede Veränderung am Produkt oder Abweichung von dieser Gebrauchsanweisung führt zum Haf- tungsausschluss! Änderungen vorbehalten.				
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: info@fehling-instruments.de				