


CERAMO® CONCEPT APART STANZEN

1 Demontage

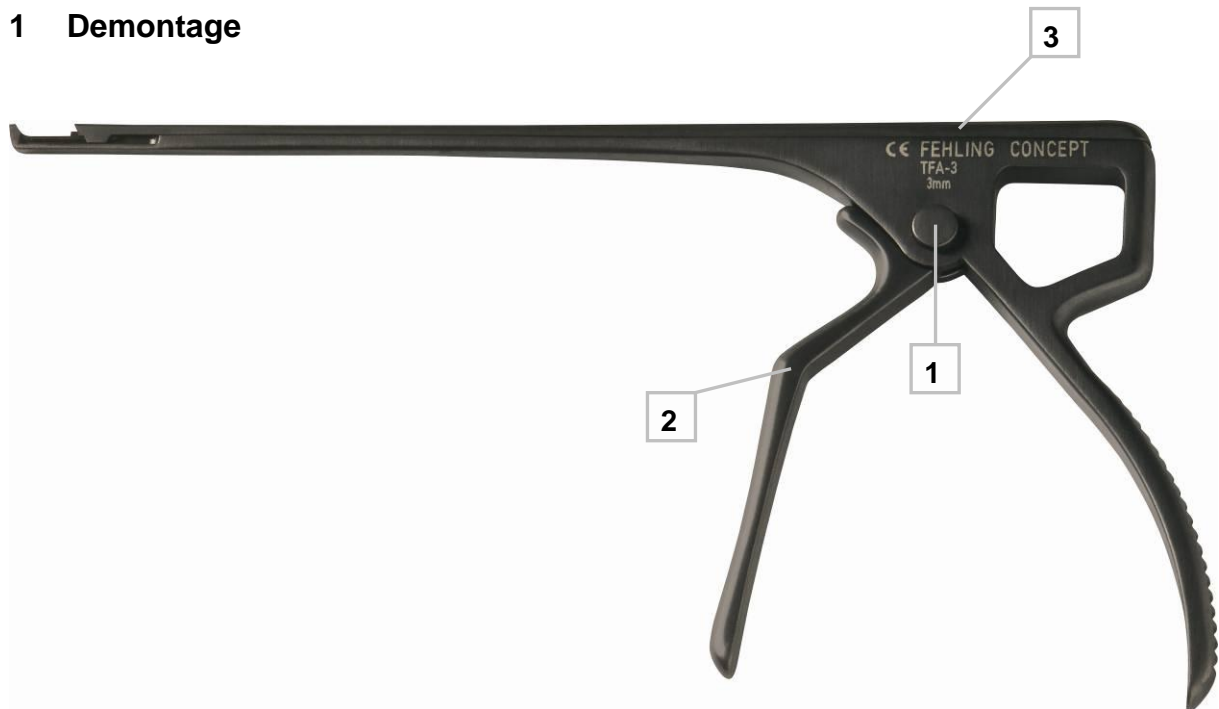

- Stanze mit der Beschriftung nach oben in beide Hände nehmen.
- Mit dem Daumen der rechten Hand den Druckknopf (Nr. 1) drücken und gleichzeitig den Zeigefinger der rechten Hand auf den Schieber (Nr. 3) legen (damit der Schieber nicht unkontrolliert herausfallen kann).
- Wenn der Löseknopf sich nicht weiter nach unten drücken läßt, die Position halten und gleichzeitig mit der linken Hand den linken Griffteil (Nr. 2) nach schräg unten ziehen.
- Der Schieber (Nr. 3) springt nun aus seiner Halterung und läßt sich leicht abnehmen.
- Die beiden Einzelteile in einem gemeinsamen Behälter aufbewahren und aufbereiten.



2 Zusammenbau



- Den Schieber mit der Feder (Nr. 4) auf die Einfräsung (Nr. 5) im Schaft setzen und gleichzeitig die vordere Führung des Schiebers (Nr. 6) in die Führungsschiene (Nr. 7) des Schafts setzen.
- Den Schieber langsam nach vorne drücken, bis das hintere Ende des Schiebers etwa 5 mm über das Schaftende hinaus in Richtung Spitze geschoben ist.
- Den linken Griffteil nach schräg oben schieben. Der Griff rastet hörbar ein und der Druckknopf (Nr. 1) springt heraus in seine Arbeitsposition.