



## CALIBRE POUR LES CUSPIDES DE LA VALVE AORTIQUE (MSS-1 ET MSS-2)

### 1 Démontage

Le calibre doit être entièrement démonté (corps du calibre, coulisse et poignée à visser) pour le retraitement.

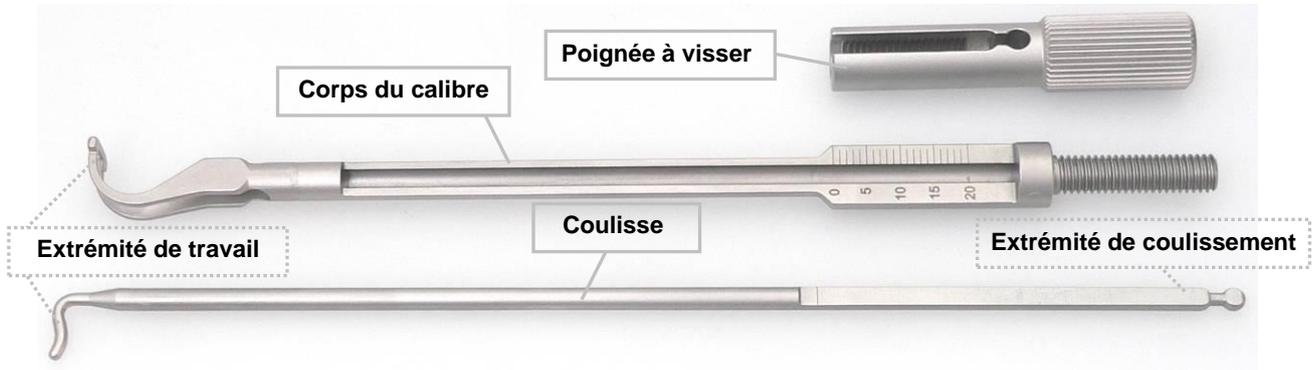


- Dévisser la poignée à visser contre le sens horaire du filet du corps de calibre, puis retirer.
- Retirer la coulisse en direction de l'extrémité de travail du corps de calibre.
- L'instrument est maintenant démonté et peut être traité. Placer tous les trois éléments dans un même conteneur pour le retraitement.

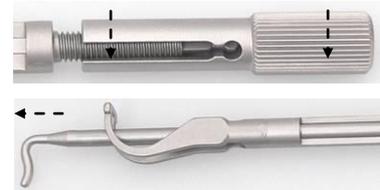

### 2 Montage

- Maintenir le corps du calibre avec l'extrémité de travail vers le haut et la coulisse avec son extrémité de travail vers le bas. Pousser la coulisse dans cette position par l'extrémité de travail du corps de calibre dans le corps du calibre jusqu'à la butée (position finale).
- Insérer l'extrémité de coulissement latéralement dans la fraise de la poignée à visser de manière à verrouiller les deux éléments. Visser légèrement la poignée à visser en direction de l'extrémité de travail et dans le sens horaire sur le filet du corps du calibre jusqu'à la butée.
- L'instrument est monté. Procéder à un test de fonction avant l'utilisation. Pour ce faire, visser la poignée à visser contre

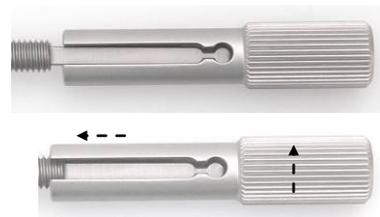

le sens horaire. L'instrument est correctement monté lorsque la coulisse se déplace vers le bas lorsque la poignée à visser est vissée. Si la coulisse ne se déplace pas, elle n'est pas verrouillée dans la poignée à visser et l'instrument ne fonctionnera pas. Dans ce cas, procéder de nouveau au montage comme décrit sous 2).

