



CERAMO® APART STANZEN

1 Demontage


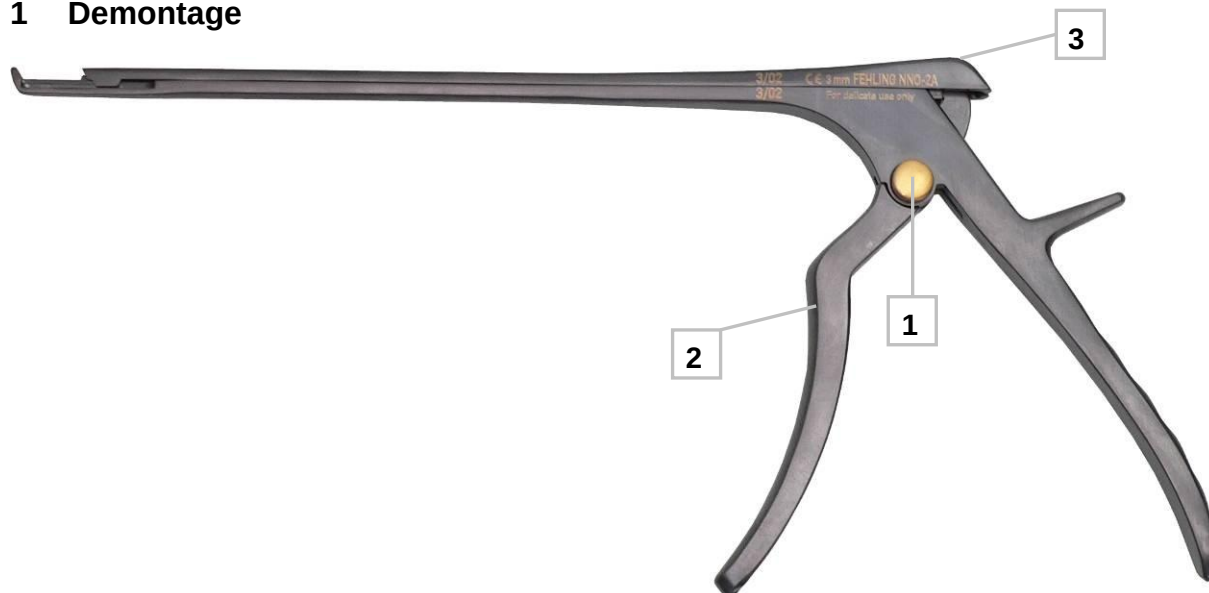


- Stanze mit der Beschriftung nach oben in beide Hände nehmen.
- Zum Entriegeln des Griffes (Nr. 2) muß der goldene Knopf (Nr.1) fest eingedrückt werden.
- Um den Schieber (Nr. 3) abnehmen zu können muß nun der Griff (Nr. 2) nach unten gezogen werden. ACHTUNG: Den Schieber dabei festhalten, damit er nicht unkontrolliert herausfallen kann.
- Der Schieber (Nr. 3) springt nun aus seiner Halterung und läßt sich leicht abnehmen. Den Griff zur Aufbereitung in der vollständig ausgefahrenen Position belassen (vgl. Nr. 4). Die zwei Einzelteile (Stanzenkorpus und Schieber) können nun aufbereitet werden.
- Die beiden Einzelteile immer paarweise in demselben Behälter aufbereiten.

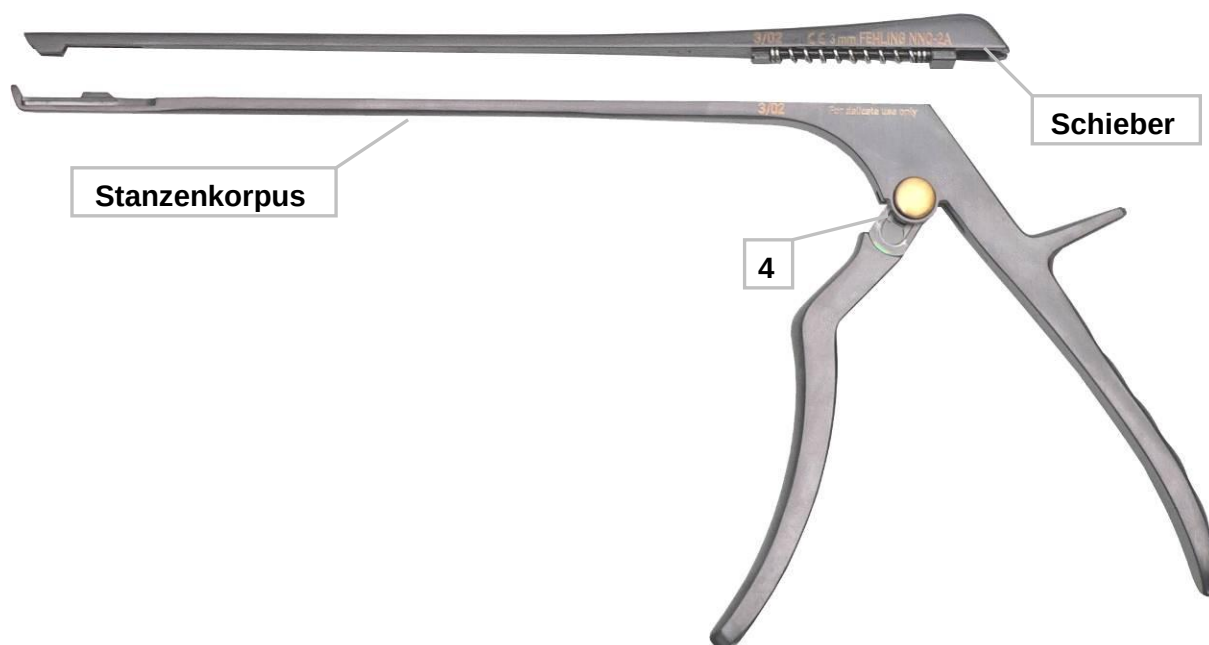

2 Zusammenbau


Jede APART Stanze besteht aus zwei Einzelteilen: Stanzenkorpus und Schieber. Zusammengebaut werden dürfen nur zusammengehörige Einzelteile. Die Zusammengehörigkeit läßt sich an der Kontrollnummer (Nr. 5) erkennen, mit der beide Einzelteile markiert sind.

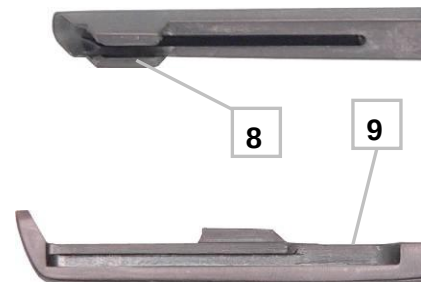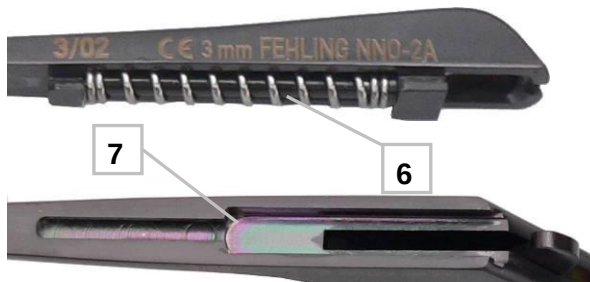

- a) Den Schieber mit der Feder (Nr. 6) auf die Einfräsung (Nr. 7) im Stanzenkorpus setzen und gleichzeitig die vordere Führung des Schiebers (Nr. 8) auf die Führungsschiene (Nr. 9) des Stanzenkorpus setzen.



- b) Die Stanzenteile in beiden Händen halten und den Schieber mit dem Daumen der rechten Hand langsam nach vorne drücken, bis das hintere Ende der Schieberführung (Nr. 10) nicht mehr zu sehen ist (Nr. 11).
- c) Position des Schiebers so halten und mit der linken Hand den Griff (Nr. 2) langsam nach oben schieben, bis er hörbar einrastet. Der Griff ist nur richtig eingerastet, wenn der goldene Knopf auf der gekennzeichneten Stanzenseite komplett heraussteht. Sollte die Knopfposition wie in der Abbildung „FALSCH“ aussehen, muß ein neuer Zusammenbau wie in den Schritten 2 a) - c) beschrieben begonnen werden. Die Stanze darf nur eingesetzt werden, wenn der Griff richtig verriegelt ist!

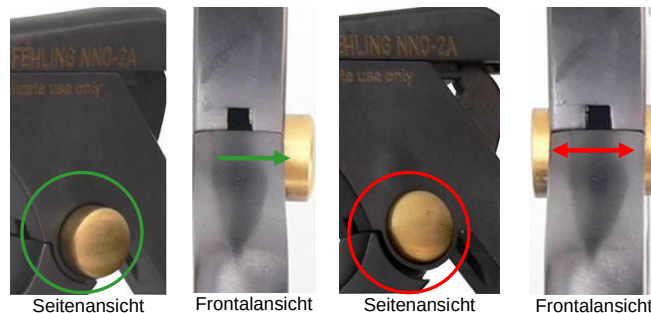

RICHTIG

FALSCH

- d) Nach einem Funktionstest kann die Stanze nun wieder eingesetzt werden.