



CERAMO® CONCEPT X STANZEN

1 Demontage

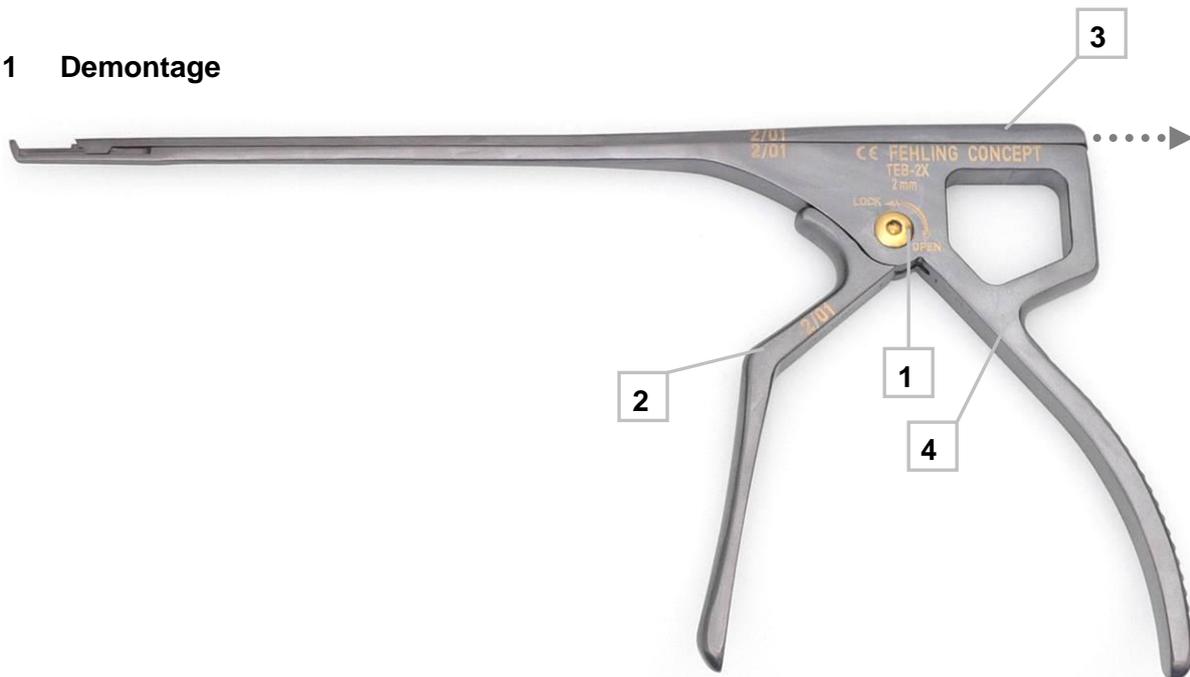


- Stanze zur Demontage auf eine feste Arbeitsfläche legen. Die Innensechskantschraube (Nr. 1) mit Hilfe des mitgelieferten Schraubendrehers TXX-0X **im Uhrzeigersinn** aufdrehen und aus dem Schraubenloch entnehmen.
- Griffstück (Nr. 2) nach unten ziehen und vom Stanzenkörper (Nr. 4) trennen. Hinweis: Um die Entriegelung zu erleichtern sollte gleichzeitig der Schieber (Nr. 3) in Richtung Stanzenfuß geschoben werden.
- Den Schieber (Nr. 3) in Pfeilrichtung ziehen und vom Stanzenkörper abnehmen.
- Die vier Einzelteile Stanzenkörper, Schieber, Griffstück und Schraube immer zusammen in demselben Behälter aufbereiten.

2 Montage (mit Hilfe der Montagevorrichtung TXW-7X)


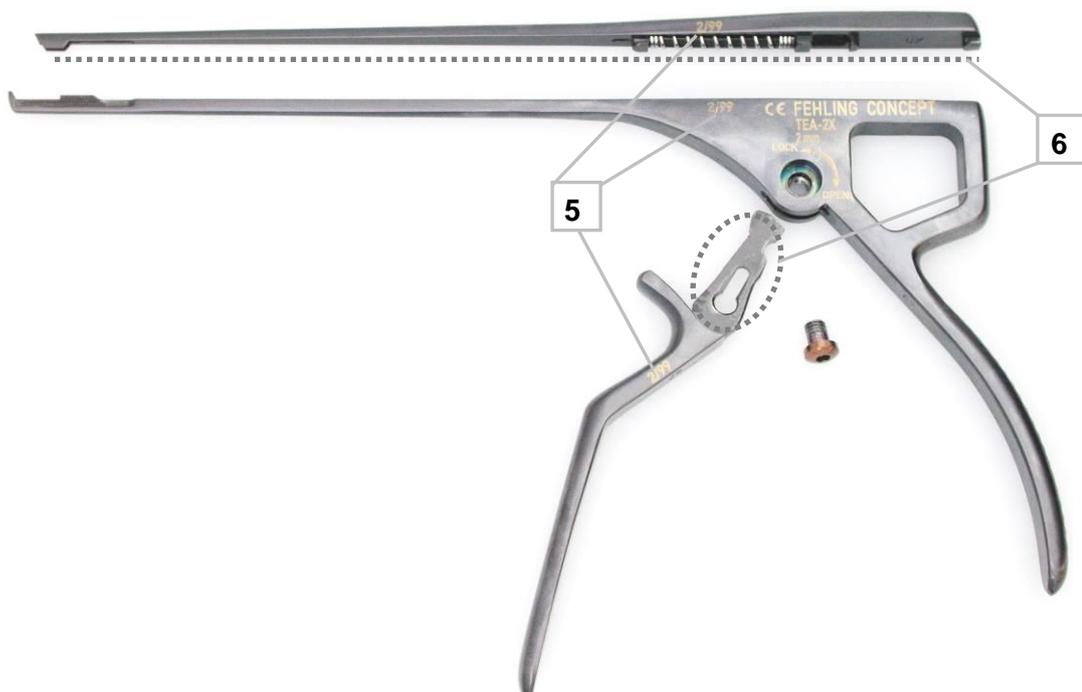


Es dürfen nur zusammengehörige Einzelteile zusammengebaut werden. Die Zusammengehörigkeit ist an der Kontrollnummer (Nr. 5) zu erkennen, mit der alle Einzelteile (außer der Schraube) markiert sind. Die Schrauben passen zu allen CONCEPT X Stanzen.

WICHTIG: Vor dem Zusammenbau müssen die Kontaktflächen (Nr. 6) im Bereich des Schiebers und des Griffstücks mit Instrumentenöl behandelt werden.

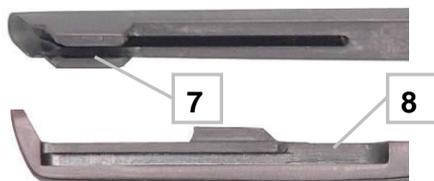

- Nach **außerhalb der Montagevorrichtung** muss der Schieber auf den Stanzenkörper aufgesetzt werden. Dafür die vordere Führung des Schiebers (Nr. 7) auf die Führungsschiene (Nr. 8) des Stanzenkörpers setzen und gleichzeitig den Schieber mit der Feder (Nr. 9) auf die Einfräsung (Nr. 10) im Stanzenkörper setzen.
- Den Schieber kräftig mit dem Daumen über die äußere Kante des Stanzenkörpers hinweg in Richtung Stanzenfuß drücken, so dass sich ein kleiner Absatz (Nr. 11) bildet. Mit der anderen Hand den Schieber in dieser Position festhalten und die beiden Stanzenteile in die Montagevorrichtung einsetzen, so dass der Schieber gegen den oberen Kunststoffblock drückt und somit selbstständig in dieser Position gehalten wird.

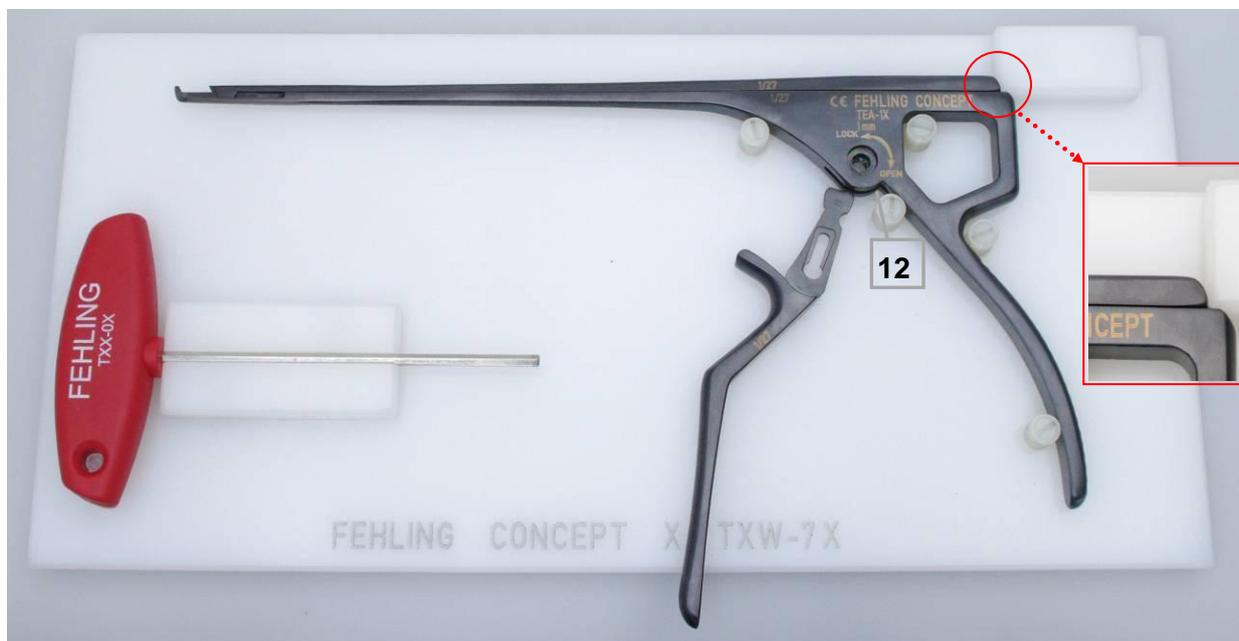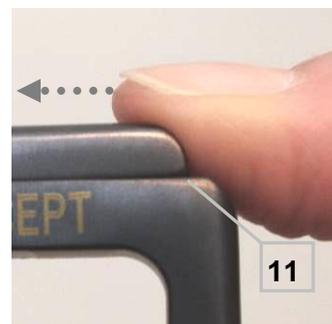

- Das Griffstück langsam bis zum Anschlag in die passende Aussparung (Nr. 12) im Stanzenkörper schieben. Das Griffstück sollte beim Hineinschieben flach auf der Montagefläche bewegt und nicht angehoben werden, da es sich sonst verkanten könnte. HINWEIS: Der Fingerbügel liegt in der Endposition nicht am Stanzenkörper an (Nr. 13).
- Die Innensechskantschraube mit Hilfe des mitgelieferten Schraubendrehers TXX-0X **gegen den Uhrzeigersinn** in das Schraubloch drehen. Die Schraube fest anziehen. ACHTUNG: Nicht überdrehen.
- Nach einem Funktionstest kann die Stanze wieder eingesetzt werden.



3 Warnhinweis

Um Schäden an den Innensechskantschrauben zu vermeiden, bitte folgendes beachten:

Die **Schrauben** (Artikelnummer TXX-2X) haben ein **Linksgewinde**. Bitte unbedingt die **Drehrichtung** beim Lösen und Schließen der Schrauben **beachten**.

Beim Lösen und Schließen der Schrauben **keine Gewalt** anwenden. Sie ist weder zum Lösen noch zum Schließen erforderlich. Gewaltames Drehen der Schraube beschädigt das Innensechskantprofil.

Sind Schäden am Innensechskantprofil oder am Profil des Schraubendrehers feststellbar, bitte sofort Schraube oder Schraubendreher ersetzen.

Die Schraubendreher TXX-0X können mit **kalttem Wasser** und einem **milden Reiniger** gewaschen werden. Für die Reinigung in heißem Wasser und Dampfsterilisation bei 134°C sind sie nicht geeignet. Dasselbe gilt für die Reinigung der Montagevorrichtung TXW-7X.