

Endoskopische Biopsiezange

1 Montage

Griff und Schaft der Biopsiezange werden immer getrennt voneinander geliefert. Der Griff, inklusive Fixiermutter, ist mehrfach verwendbar und muss nach dem Einsatz aufbereitet werden. Der Schaft ist einmal verwendbar und muss nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden.



Abb. 1

Abb. 1: Zur Montage zunächst die Fixiermutter vom Griff entfernen (Drehen gegen den Uhrzeigersinn).

Abb. 2: Den beweglichen Griffteil bis zum Anschlag nach distal ziehen und somit die Aufnahme für den Zangenschaft aus dem Griffgehäuse heraus befördern (s. Abb. 2a).

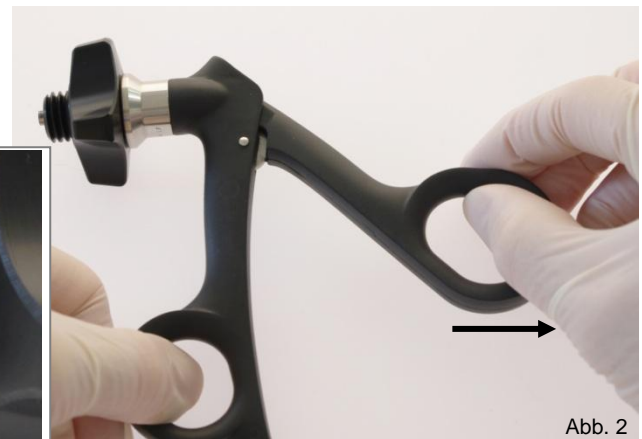


Abb. 2

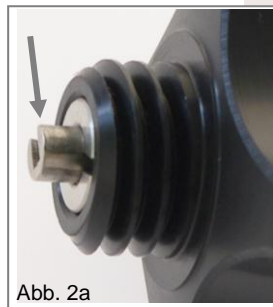


Abb. 2a

Abb. 3: Das kugelförmige Ende der im Schaft befindlichen Führungsstange in die Aufnahme im Griff einsetzen (siehe Abb. 3a). Das Maul des Zangenschafts sollte dabei geschlossen sein.



Abb. 3



Abb. 3a

Den beweglichen Griffteil nach proximal drücken (in Richtung Schaft) und damit den Schaft bündig an den Griff heranziehen. Den Griff gedrückt halten und gleichzeitig die Fixiermutter über den Schaft bis zum Anschlag ziehen.


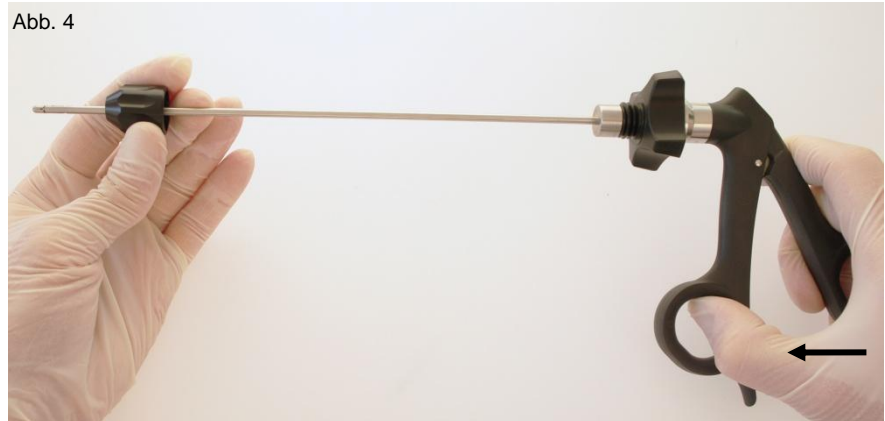


Abb. 5: Die Mutter im Uhrzeigersinn auf das Gewinde im Griffgehäuse drehen.



Abbildung 6 zeigt die fertig montierte Biopsiezange.

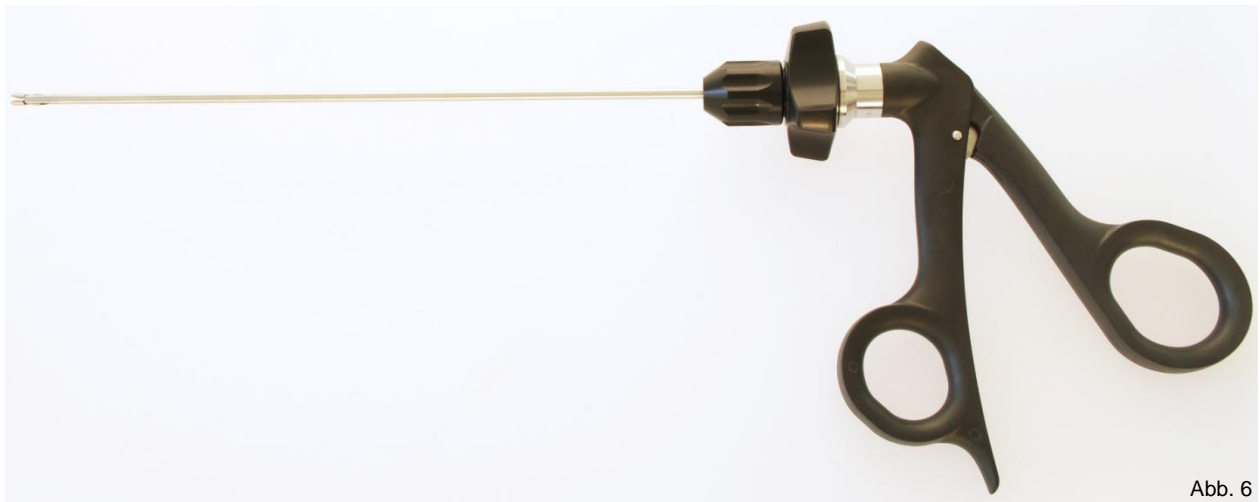

2 Demontage

Nach dem Einsatz muss der Schaft vom Griff getrennt werden. Die Demontage erfolgt analog der Montage in umgekehrter Reihenfolge. Der Schaft muss nach dem Einsatz entsorgt werden. Der wiederverwendbare Griff mit all seinen Bestandteilen muss nach dem Einsatz aufbereitet werden.