


FEHLING CHORDAE-LEHRE UND KNOTENASSISTENT

Artikelnummern

MNV-4, MNV-7, MNV-9



1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

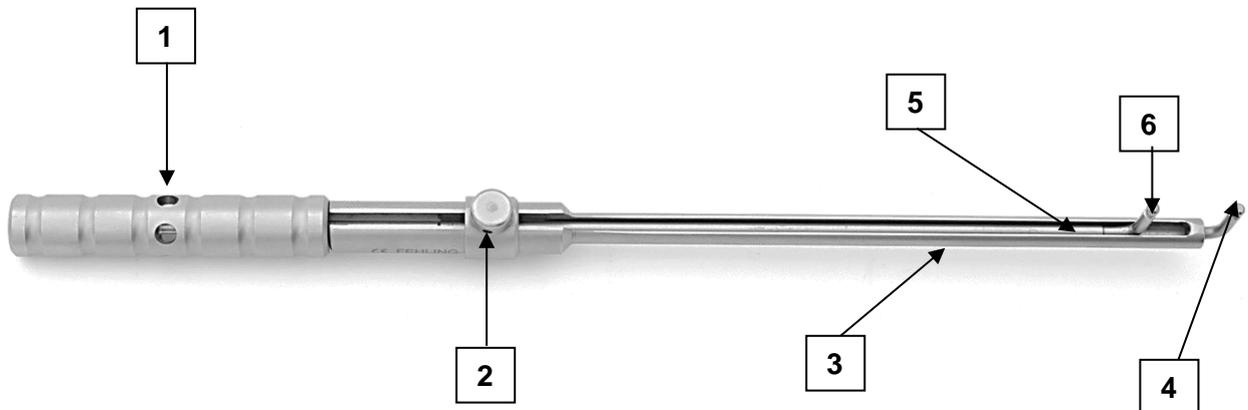

1. Instrumentengriff
2. Entriegelungsknopf
3. Instrumentenschaft
4. Arbeitsende Schaft
5. Instrumentenschieber
6. Arbeitsende Schieber

2) Demontage

Abb.1: Den Instrumentengriff (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Griff vollständig gelöst ist.



Abb. 1

Abb. 2: Im nächsten Schritt den Schieber (5) entfernen. Hierzu den Entriegelungsknopf (2) in Richtung Schaft drücken und gleichzeitig den Schieber (5) komplett Richtung Schaftende herausziehen.

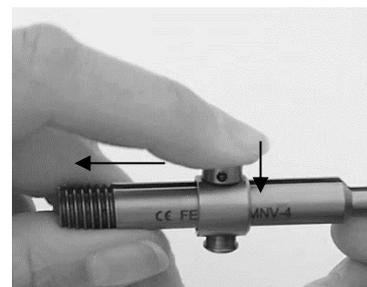


Abb. 2

Abb. 3: Das in seine drei Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

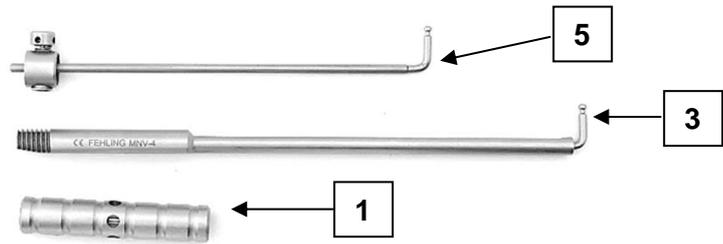


Abb. 3

3) Montage

Abb. 1: Den Schieber (5) in das Schaftende einführen und bis über das Gewinde hinaus in Richtung Arbeitsende (4) schieben. Währenddessen den Entriegelungsknopf (2) Richtung Schaft drücken.

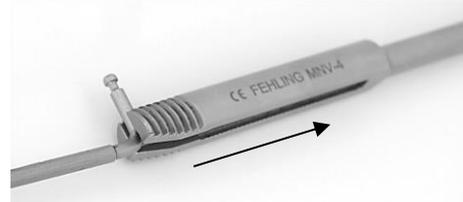


Abb. 1



Es ist darauf zu achten, dass die Arbeitsenden von Instrumentenschieber und Instrumentenschaft in eine Richtung zeigen.

Abb. 2: Zum Schluss den Griff (1) im Uhrzeigersinn auf das Gewinde des Schaftes (3) drehen.



Abb. 2

Abb. 3: Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

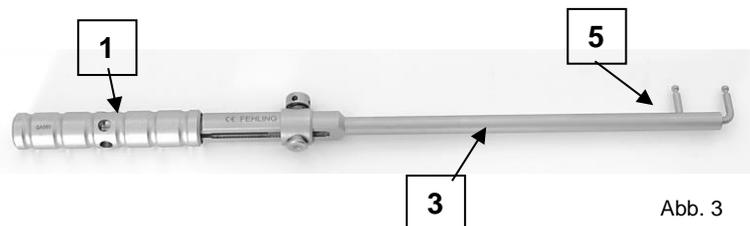


Abb. 3

Symbole		
Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:		
 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen
Kontakt zum Hersteller		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	