


### FEHLING BALKENSPREIZER MIT ZAHNRAD / SPERRE

Gültig für alle Balkenspreizer mit Zahnrad (Sperr)

#### 1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

Beispielhaft: MRP-1

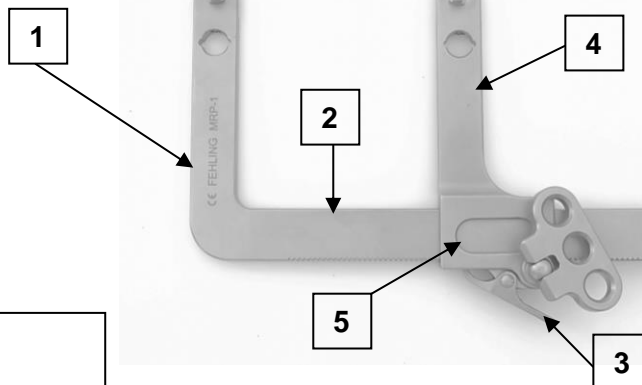


- 1. Fester Spreizerarm
- 2. Zahnstange
- 3. Sperre
- 4. Beweglicher Spreizerarm
- 5. Kasten

#### 2) Demontage


1. Den beweglichen Spreizerarm (4) auf der Zahnstange (2) soweit nach außen transportieren, bis er sich abnehmen lässt. Währenddessen die Sperre (3) durch Druck in Richtung der Zahnstange (2) lösen.

2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

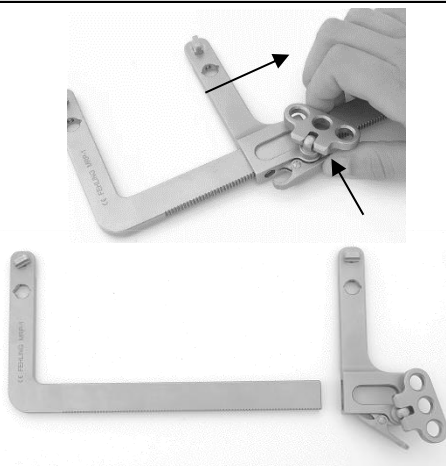


#### 3) Montage

1. Die Zahnstange (2) in die Aussparung des Kastens (5) einführen. Währenddessen die Sperre (3) durch Druck in Richtung der Zahnstange (2) lösen.

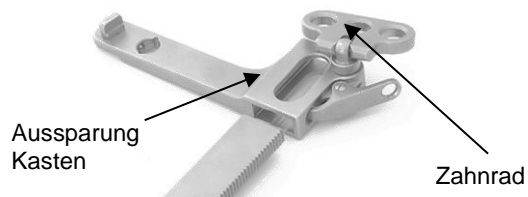

Es ist darauf zu achten, dass beide Spreizerarme in die gleiche Richtung zeigen und das Zahnrad des beweglichen Spreizerarms nach außen zeigt.

2. Den beweglichen Spreizerarm (4) auf der Zahnstange (2) nach innen in Richtung des festen Spreizerarms (1) transportieren.
3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

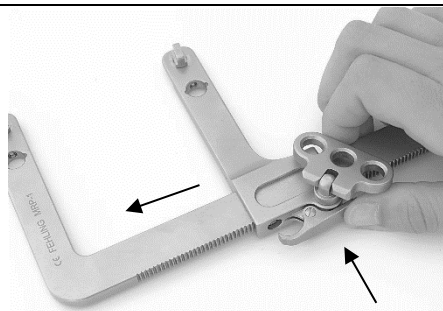

### Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen

### Kontakt zum Hersteller

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a> <a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a>	
--	--	--