


FEHLING VASCULARRETRAKTOR

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage


EEV-1

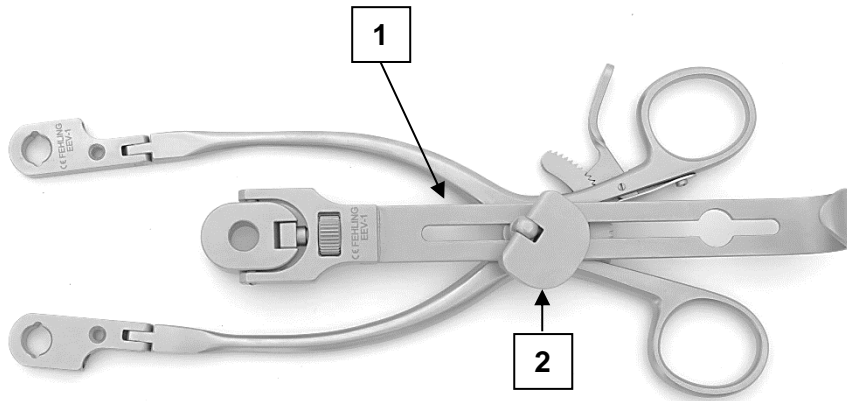

- | |
|--|
| <p>1. Hakenführung
2. Flügelmutter</p> |
|--|


2) Demontage

1. Die Flügelmutter (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich abheben lässt. Dann die Hakenführung (1) abnehmen.
2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

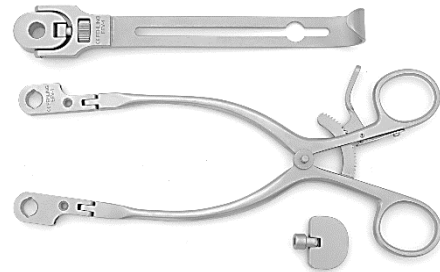


3) Montage

1. Die Schiene der Hakenführung (1) auf die Aufnahme setzen.

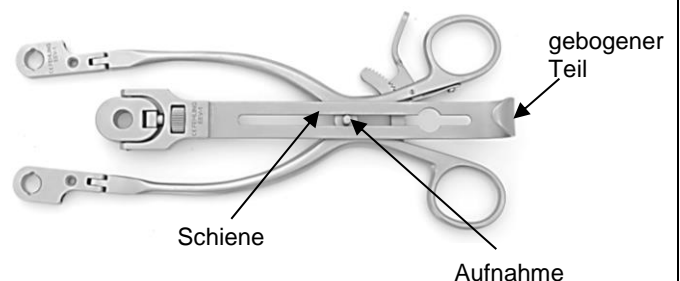

Es ist darauf zu achten, dass der gebogene Teil der Hakenführung von der Montagefläche wegzeigt.

2. Im nächsten Schritt die Flügelmutter (2) auf das Gewinde der Aufnahme setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen
3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

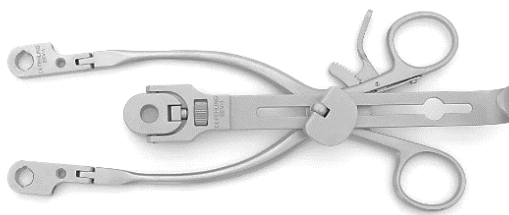

Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen

Kontakt zum Hersteller

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
--	--	--