


FEHLING LEYLA TITAN SPANNARM

Artikelnummern

NGA-1, NGA-2

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

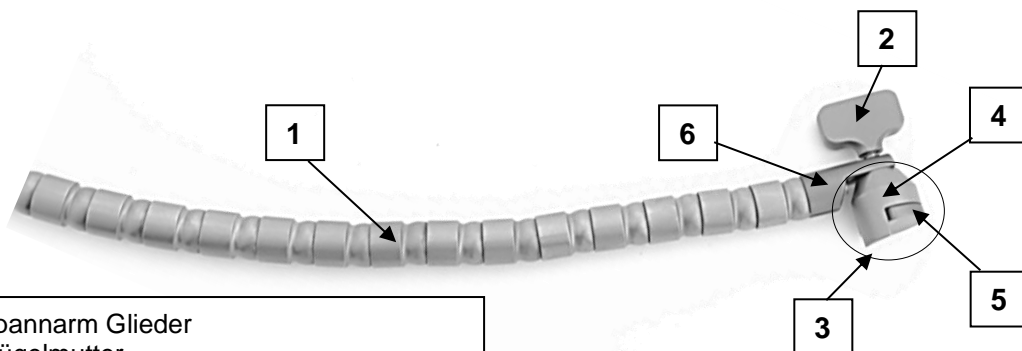


- 1. Spannarm Glieder
- 2. Flügelmutter
- 3. Halteelement bestehend aus (4) und (5)
- 4. Klemmbacke
- 5. Socket
- 6. Spannarmende

2) Demontage

1. Die Flügelmutter (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis diese vollständig vom Gewinde gelöst ist. Währenddessen das Halteelement (3) festhalten.

2. Das aus zwei Teilen bestehende Halteelement (3) aus der Aussparung am Spannarmende (6) nehmen. Danach die Klemmbacke (4) vom Socket (5) ziehen.

3. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

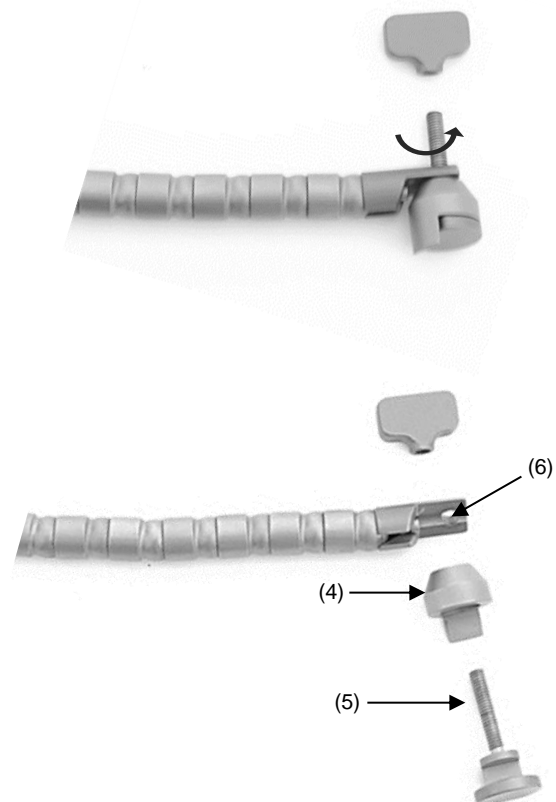

3) Montage


1. Die Klemmbacke (4) auf das Gewinde des Sockels (5) setzen. Anschließend das Halteelement (3) mit dem Gewinde in die Aussparung des Spannarmendes (6) einführen.



Es ist darauf zu achten, dass die flachgefräste Seite des Spannarmendes beim Einführen von Klemmbacke und Sockel hin zum Halteelement zeigt.





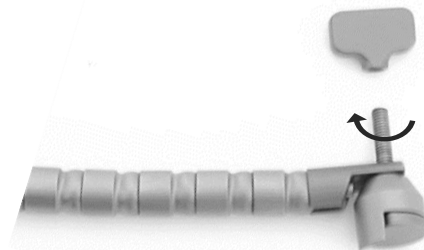




2. Die Flügelmutter (2) auf das Gewinde des Halteelements (3) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.



Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen

Kontakt zum Hersteller



FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Hanauer Landstr. 7A
63791 Karlstein/Germany
Tel.: 06188-957440
Fax: 06188-957445
E-Mail: info@fehling-instruments.de
www.fehling-instruments.de

