


FEHLING KANÜLEN UND SAUGER MIT ABNEHMBAREM LUER-LOCK-ANSCHLUSS (LL-ANSCHLUSS)

Gültig für alle Kanülen und Sauger mit abnehmbarem LL-Anschluss und/oder austauschbarer Nadel

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

Beispielhaft: MRK-4

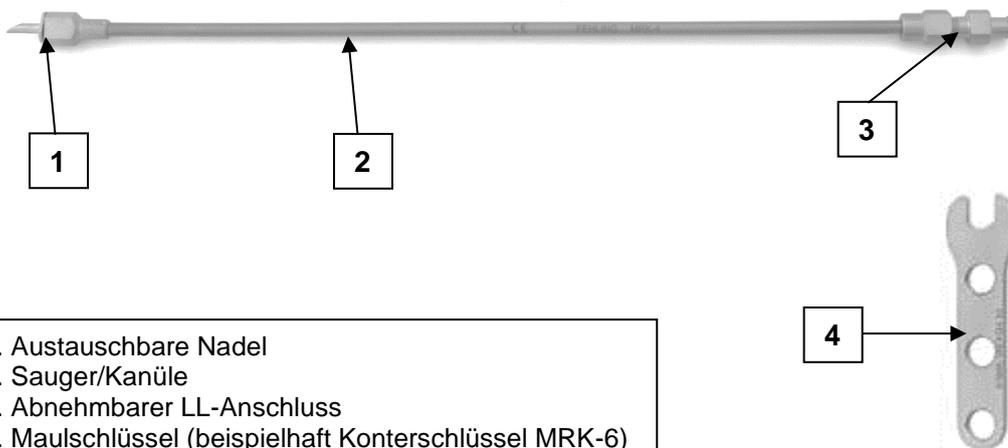


1. Austauschbare Nadel
2. Sauger/Kanüle
3. Abnehmbarer LL-Anschluss
4. Maulschlüssel (beispielhaft Konterschlüssel MRK-6)

2) Demontage

2.1) Demontage Luer-Lock-Anschluss

1. Zum Entfernen den LL-Anschluss (3) mit Hilfe zweier Maulschlüssel (4) festhalten und die innen gelegene Überwurfmutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen.

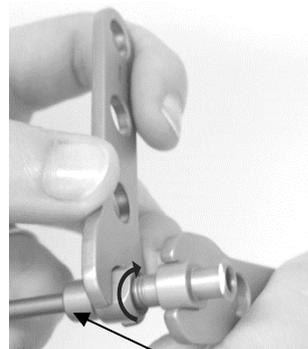

Überwurfmutter

2. Den LL-Anschluss (3) von der Hülse des Saugers/der Kanüle (2) abziehen.



3. Der LL-Anschluss (3) besteht aus zwei Teilen, einem geschlitzten Aufnahmegebinde sowie einer Überwurfmutter. Zum Trennen der beiden Teile die Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis diese sich abnehmen lässt.



Überwurfmutter

4. Der in seine Einzelteile zerlegte LL-Anschluss kann nun aufbereitet werden.



2.2) Demontage Nadel

1. Zum Entfernen der auszutauschenden Nadel (1) diese an der Basisplatte halten und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Nadel herausnehmbar ist. Bei Bedarf zum anfänglichen Lösen der Nadel einen entsprechenden Maulschlüssel (4) verwenden.



3) Montage

3.1) Montage Luer-Lock-Anschluss


1. Zur Montage die Überwurfmutter des LL-Anschlusses (3) über die Hülse des Saugers/der Kanüle (2) schieben.



2. Das geschlitzte Aufnahmegewinde des LL-Anschlusses (3) ebenfalls auf die Hülse setzen und bis zum Anschlag schieben.



3. Die Überwurfmutter auf das geschlitzte Aufnahmegewinde schieben und mit Hilfe zweier Maulschlüssel (4) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

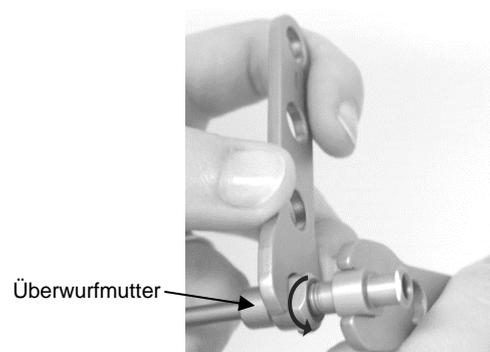

4. Der LL-Anschluss (3) ist nun wieder fest mit dem Sauger/der Kanüle verbunden und nach einer Funktionsprüfung wieder einsatzbereit-



3.2) Montage Nadel

1. Zum Befestigen die Ersatznadel (1) mit ihrem Außengewinde in das Innengewinde des Verbindungsstücks setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt. Bei Bedarf zum finalen Festziehen der Nadel einen entsprechenden Maulschlüssel (4) verwenden.



2. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.



Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen

Kontakt zum Hersteller

	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p>	
---	---	---