


FEHLING SAUGER MIT ABNEHMBAREM LUER-LOCK-ANSCHLUSS (LL-ANSCHLUSS)

Gültig für alle Sauger mit abnehmbarem LL-Anschluss

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage


Beispielhaft: MRK-5

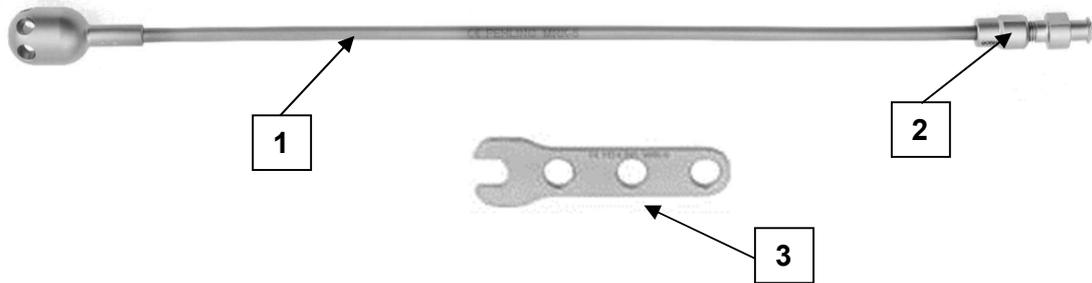

1. Sauger
2. Abnehmbarer LL-Anschluss
3. Maulschlüssel (beispielhaft Konterschlüssel MRK-6)

2) Demontage

1. Zum Entfernen den LL-Anschluss (2) mit Hilfe zweier Maulschlüssel (3) festhalten und die innen gelegene Überwurfmutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen.

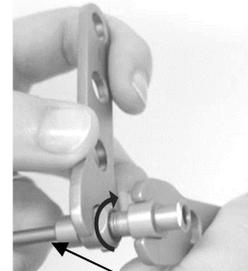

Überwurfmutter

2. Den LL-Anschluss (2) von der Hülse des Saugers(1) abziehen.



3. Der LL-Anschluss (2) besteht aus zwei Teilen, einem geschlitzten Aufnahmegehäuse sowie einer Überwurfmutter. Zum Trennen der beiden Teile die Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis diese sich abnehmen lässt.




Überwurfmutter

4. Der in seine Einzelteile zerlegte LL-Anschluss kann nun aufbereitet werden.



3) Montage

1. Zur Montage die Überwurfmutter des LL-Anschlusses (2) über die Hülse des Saugers (1) schieben.
2. Das geschlitzte Aufnahmegewinde des LL-Anschlusses (2) ebenfalls auf die Hülse setzen und bis zum Anschlag schieben.
3. Die Überwurfmutter auf das geschlitzte Aufnahmegewinde schieben und mit Hilfe zweier Maulschlüssel (3) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
4. Der LL-Anschluss (2) ist nun wieder fest mit dem Sauger verbunden und nach einer Funktionsprüfung wieder einsatzbereit.

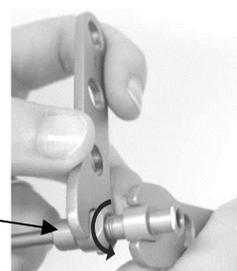

Überwurfmutter



Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen

Kontakt zum Hersteller

	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------