


FEHLING OP-TISCH-HALTEKLAUE

Artikelnummern

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage


Beispielhaft: EEJ-1

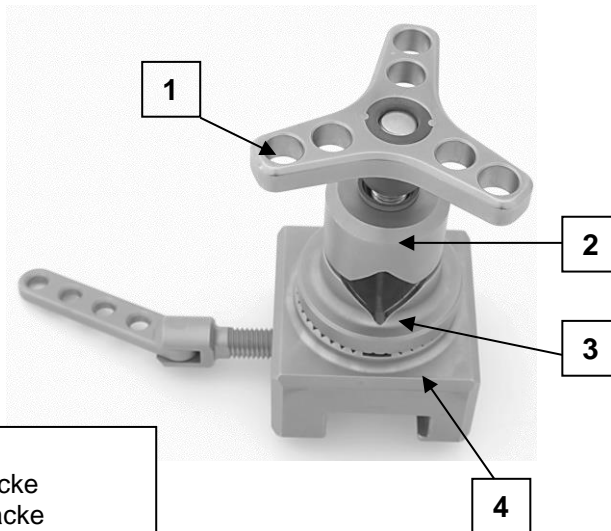

- 1. Sterngriff
- 2. Oberer Teil der Klemmbacke
- 3. Unterer Teil der Klemmbacke
- 4. Sockel

2) Demontage

1. Den Sterngriff (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er sich abnehmen lässt.
2. Zuerst den oberen Teil der Klemmbacke (2) vom Gewinde des Sockels (4) ziehen, dann den unteren Teil der Klemmbacke (3) entfernen.
3. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

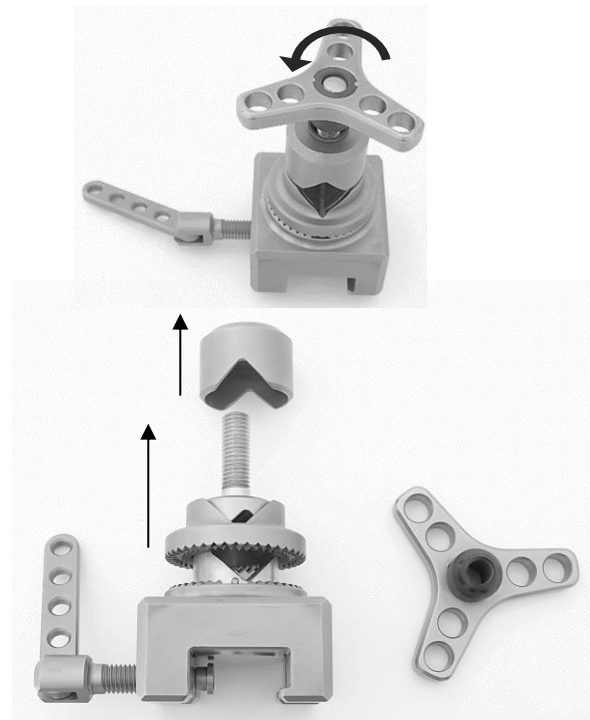

3) Montage

1. Wie in Abb. 1 zu sehen den unteren Teil der Klemmbacke (3) auf den Sockel (4) setzen, danach den oberen Teil der Klemmbacke (2) über das Gewinde des Sockels (4) einführen.

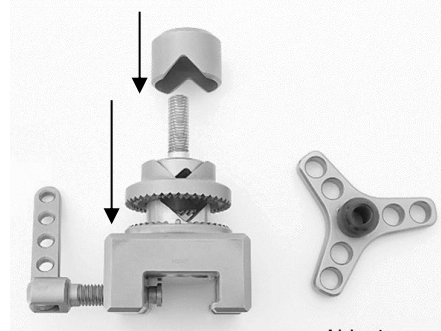


Abb. 1

2. Den Sterngriff (1), wie in Abb. 2 zu sehen, auf das Gewinde des Sockels (4) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.












Abb. 2

3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen

Kontakt zum Hersteller

	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p>	
---	---	---