


FEHLING KANÜLEN UND SAUGER MIT ABNEHMBAREM KORB

Gültig für alle Kanülen und Sauger mit abnehmbarem Korb

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

Beispielhaft: MNM-3

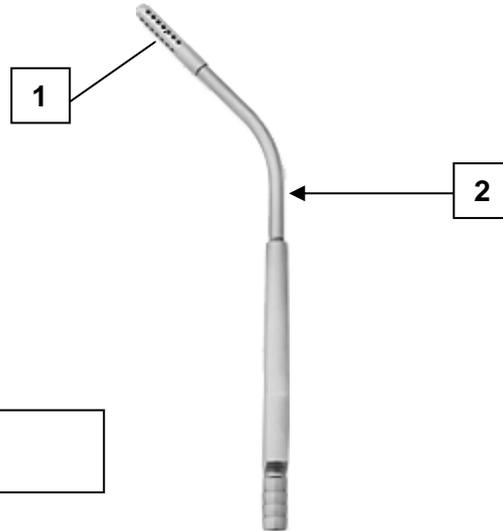


- 1. Korb
- 2. Sauger/Kanüle

2) Demontage

- Den Korb (1) am vorderen Teil des Saugers oder der Kanüle (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dieser sich vom Gewinde nehmen lässt.


- Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

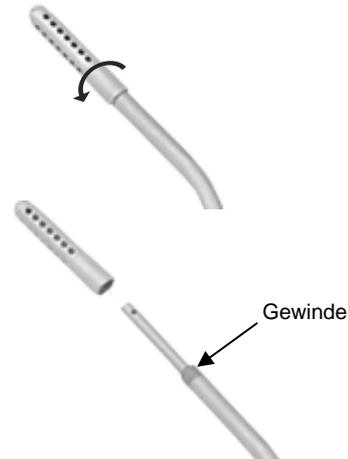

3) Montage

- Den Korb (1) auf das Gewinde am vorderen Teil des Saugers oder der Kanüle (2) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

- Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

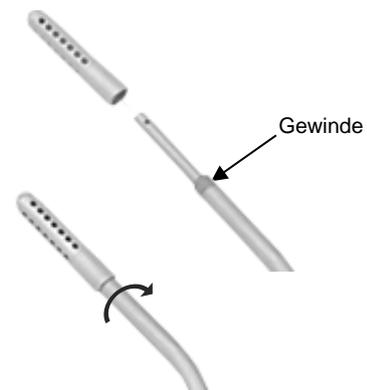

Symbole		
Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung bzw. Montageanleitung abgebildet, haben die Symbole folgende Bedeutung:		
 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Artikelnummer	 Chargencode	 Seriennummer
 CE-Kennzeichnung	 CE-Kennzeichnung	 Ölkännchen für zu schmierende Stellen
Kontakt zum Hersteller		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	