


GUIDA-LAMA FEHLING (PER ADATTATORE A SFERA) E PINZE DI GUIDA

1a) Componenti / Base di spiegazione strumenti a due componenti


Esempio: MRN-3A

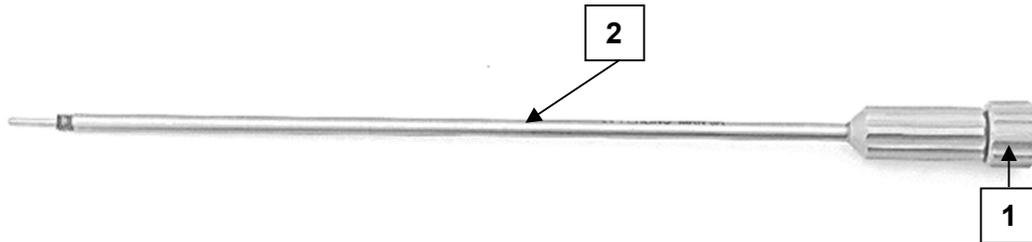

- 1. Asta interna con dado di fissaggio
- 2. Guaina esterna

1b) Componenti / Base di spiegazione strumenti a tre componenti


Esempio: MRI-0

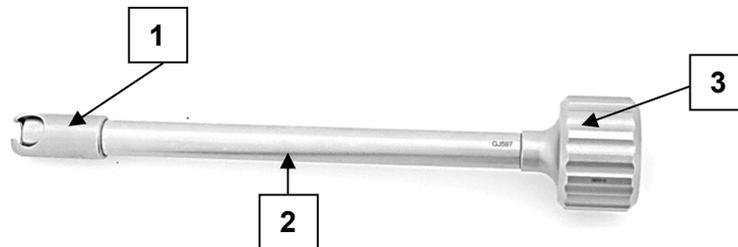


- 1. Asta interna
- 2. Guaina esterna
- 3. Dado di fissaggio

2a) Smontaggio strumenti a due componenti

1. Svitare in senso antiorario il dado di fissaggio dell'asta interna (1) fino ad allentare completamente la filettatura, quindi estrarre l'asta interna dalla guaina esterna (2) in direzione del dado di fissaggio.

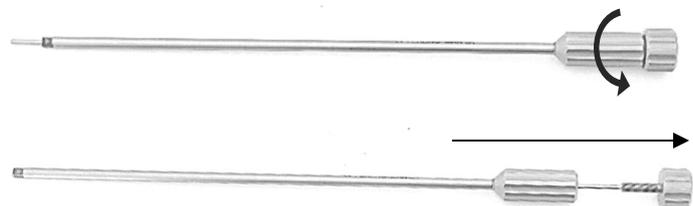

2. A questo punto è possibile trattare lo strumento smontato nei singoli componenti.

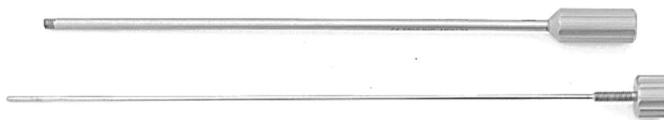

2b) Smontaggio strumenti a tre componenti


1. Svitare il dado di fissaggio (3) in senso antiorario fino a quando è possibile rimuoverlo dalla filettatura dell'asta interna (1).



2. Estrarre la guaina esterna (2) dall'asta interna (1) in direzione della filettatura.



3. A questo punto è possibile trattare lo strumento smontato nei singoli componenti.

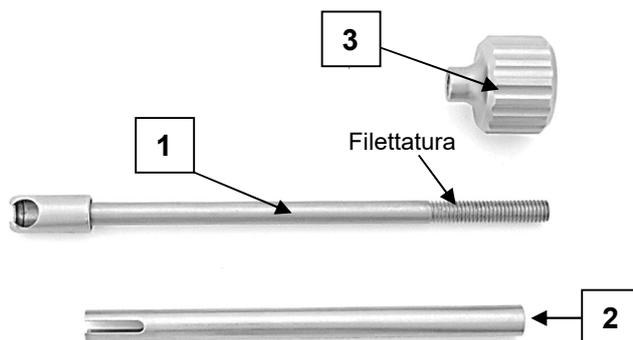

3a) Montaggio strumento a due componenti

1. Fare scorrere la guaina esterna (2) sull'asta interna (1).



2. Posizionare il dado di fissaggio (3) sulla filettatura dell'asta interna (1) e serrarlo avvitando in senso orario.



3. Lo strumento assemblato è ora pronto all'uso, previo test funzionale.

3b) Montaggio strumento a tre componenti

1. Posizionare la guaina esterna (2) sull'asta interna (1) facendola scorrere sulla filettatura.



Assicurarsi che la barretta trasversale, presente nella sede dell'adattatore a sfera dell'asta interna (1), scivoli nelle due fessure della guaina esterna (2).

2. Posizionare il dado di fissaggio (3) sulla filettatura dell'asta interna (1) e serrarlo avvitando in senso orario.



3. Lo strumento assemblato è ora pronto all'uso, previo test funzionale.

Simboli

Se raffigurati sul dispositivo medico e/o sulla relativa etichetta e/o nelle istruzioni per l'uso e/o nelle istruzioni di montaggio, questi simboli hanno il seguente significato:

 Produttore	 Rispettare le istruzioni per l'uso	 Attenzione
 Numero articolo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Contrassegno CE	 Contrassegno CE	 Oliatore per i punti da lubrificare

Informazioni di contatto del produttore

	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p>	
---	--	---