


MORSETTO DI FISSAGGIO PER TAVOLO OPERATORIO FEHLING

Numeri articolo

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Componenti / Base di spiegazione

Esempio: EEJ-1

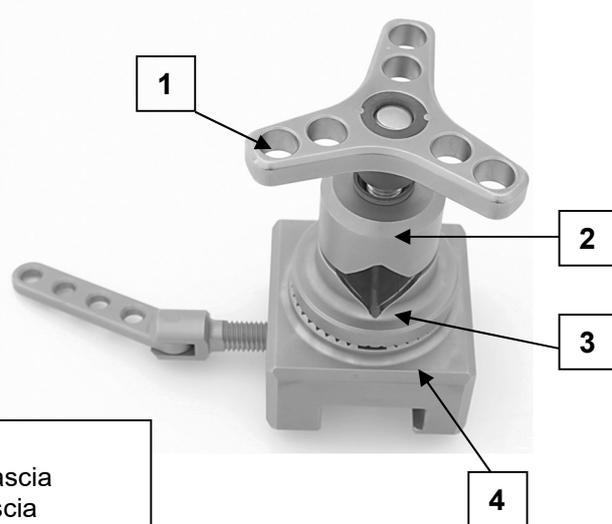


- 1. Impugnatura a stella
- 2. Parte superiore della ganascia
- 3. Parte inferiore della ganascia
- 4. Zoccolo

2) Smontaggio

1. Ruotare l'impugnatura a stella (1) in senso antiorario fino a quando è possibile estrarla.



2. Estrarre per prima la parte superiore della ganascia (2) dalla filettatura dello zoccolo (4), quindi rimuovere la parte inferiore (3).

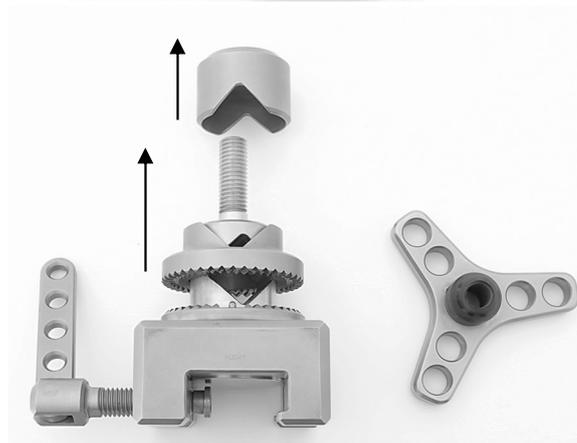

3. A questo punto è possibile trattare lo strumento smontato nei singoli componenti.

3) Montaggio

1. Come illustrato in Fig. 1, posizionare la parte inferiore della ganaschia (3) sullo zoccolo (4), quindi inserire la parte superiore della ganaschia (2) nella filettatura dello zoccolo (4).

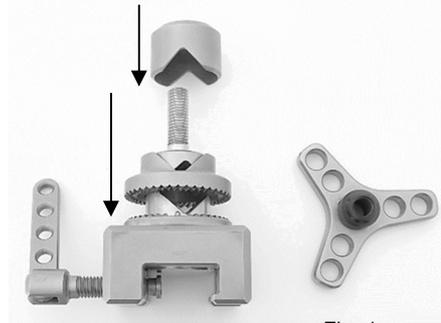


Fig. 1

2. Come illustrato in Fig. 2, posizionare l'impugnatura a stella (1) sulla filettatura dello zoccolo (4) e serrarla avvitando in senso orario.



Fig. 2

3. Lo strumento assemblato è ora pronto all'uso, previo test funzionale.

Simboli

Se raffigurati sul dispositivo medico e/o sulla relativa etichetta e/o nelle istruzioni per l'uso e/o nelle istruzioni di montaggio, questi simboli hanno il seguente significato:

 Produttore	 Rispettare le istruzioni per l'uso	 Attenzione
 Numero articolo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Contrassegno CE	 Contrassegno CE	 Oliatore per i punti da lubrificare

Informazioni di contatto del produttore

	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p>	
---	--	---