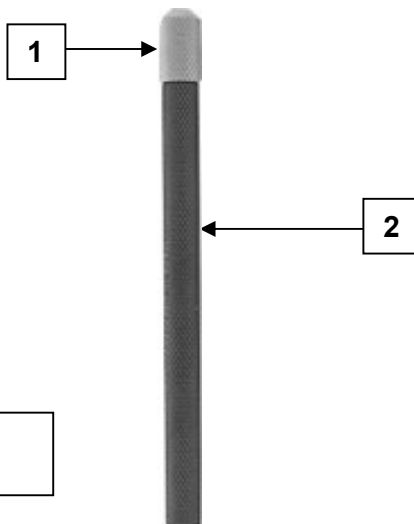


IMPUGNATURA FEHLING CON BUSSOLA A VITE

Numeri articolo


ABB-1, ABB-1F, ABB-2, ABB-3, ABB-5, ABB-6

1) Componenti / Base di spiegazione**2) Smontaggio**

1. Svitare in senso antiorario la bussola a vite (1) posta sul lato anteriore dell'impugnatura (2) fino a quando è possibile rimuoverla dalla filettatura.




2. A questo punto è possibile trattare lo strumento smontato nei singoli componenti.

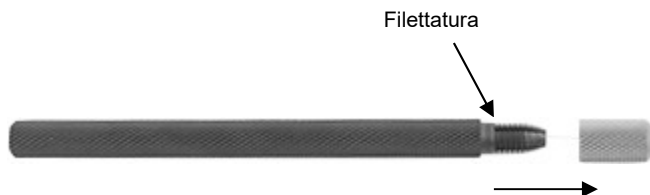

Per sostituire o rimuovere il gambo dall'impugnatura (2) è sufficiente allentare la bussola a vite (1).

3) Montaggio

1. Posizionare la bussola a vite (1) sulla filettatura sul lato anteriore dell'impugnatura (2) e serrarla avvitando in senso orario.

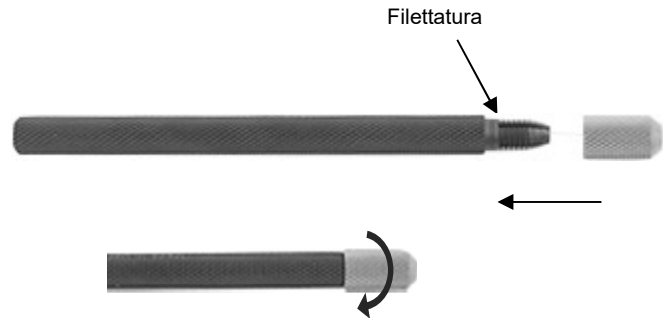

2. Lo strumento assemblato è ora pronto all'uso, previo test funzionale.



Per sostituire o inserire il gambo nell'impugnatura (2) è sufficiente allentare la bussola a vite (1).

Simboli

Se raffigurati sul dispositivo medico e/o sulla relativa etichetta e/o nelle istruzioni per l'uso e/o nelle istruzioni di montaggio, questi simboli hanno il seguente significato:

 Produttore	 Rispettare le istruzioni per l'uso	 Attenzione
 Numero articolo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Contrassegno CE	 Contrassegno CE	 Oliatore per i punti da lubrificare

Informazioni di contatto del produttore

	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p>	
--	--	--