


### RETRATTORE VASCOLARE FEHLING

#### 1) Componenti / Base di spiegazione


EEV-1

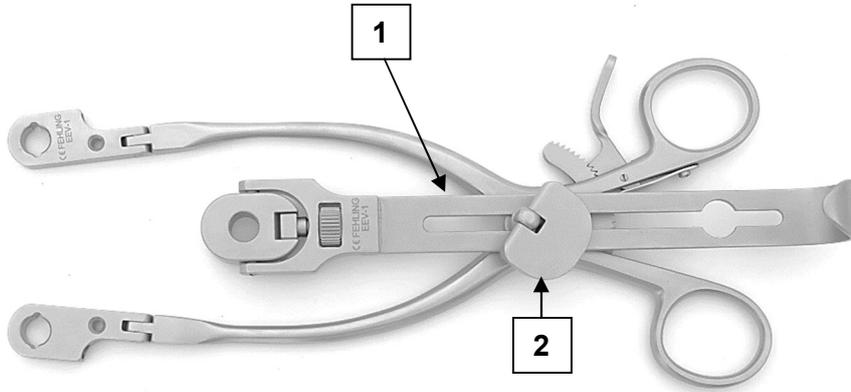

- 1. Guida-lama
- 2. Dado ad alette


#### 2) Smontaggio

1. Svitare il dado ad alette (2) in senso antiorario fino a quando è possibile estrarlo. Quindi estrarre il guida-lama (1).
2. A questo punto è possibile trattare lo strumento smontato nei singoli componenti.

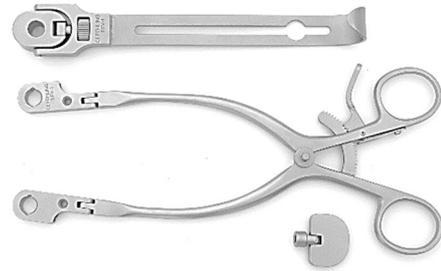

#### 3) Montaggio

1. Posizionare il binario del guida-lama (1) sul supporto.

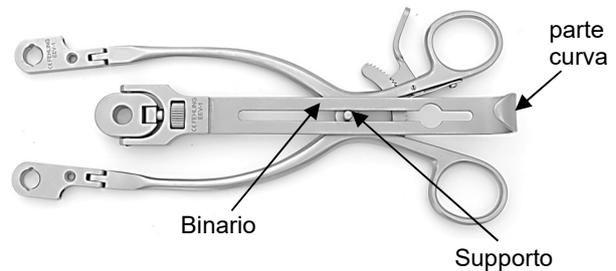

Verificare che la parte curva del guida-lama sia rivolta in direzione opposta alla superficie di montaggio.

2. Nel passaggio successivo, posizionare il dado ad alette (2) sulla filettatura del supporto e serrarlo avvitando in senso orario.
3. Lo strumento assemblato è ora pronto all'uso, previo test funzionale.



#### Simboli

Se raffigurati sul dispositivo medico e/o sulla relativa etichetta e/o nelle istruzioni per l'uso e/o nelle istruzioni di montaggio, questi simboli hanno il seguente significato:

 Produttore	 Rispettare le istruzioni per l'uso	 Attenzione
 Numero articolo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Contrassegno CE	 Contrassegno CE	 Oliatore per i punti da lubrificare

#### Informazioni di contatto del produttore

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a> <a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a>	
--	---	--