


CANNULE E ASPIRATORI CON CESTELLO RIMOVIBILE FEHLING

Valido per tutte le cannule e gli aspiratori con cestello rimovibile

1) Componenti / Base di spiegazione


Ad esempio: MNM-3

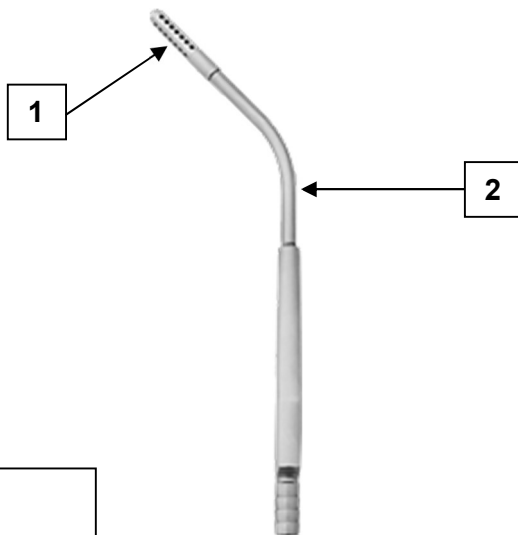

- 1. Cestello
- 2. Aspiratore/cannula


2) Smontaggio



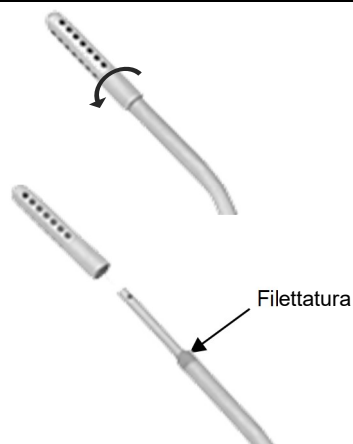





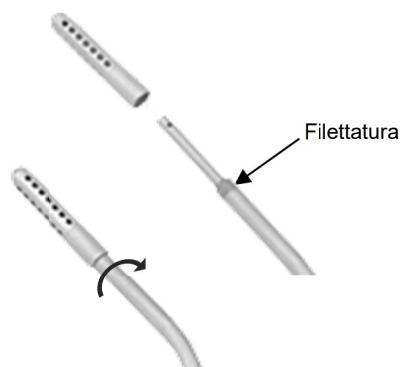


1. Ruotare in senso antiorario il cestello (1) posto sul lato anteriore dell'aspiratore o della cannula (2) fino a quando è possibile rimuoverlo dalla filettatura.
2. A questo punto è possibile trattare lo strumento smontato nei singoli componenti.



3) Montaggio

1. Posizionare il cestello (1) sulla filettatura sul lato anteriore dell'aspiratore o della cannula (2) e serrarlo ruotando in senso orario.
2. Lo strumento assemblato è ora pronto all'uso, previo test funzionale.



Simboli		
Se raffigurati sul dispositivo medico e/o sulla relativa etichetta e/o nelle istruzioni per l'uso e/o nelle istruzioni di montaggio, questi simboli hanno il seguente significato:		
 Produttore	 Rispettare le istruzioni per l'uso	 Attenzione
 Numero articolo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Contrassegno CE	 Contrassegno CE	 Oliatore per i punti da lubrificare
Informazioni di contatto del produttore		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	