



CERAMO® APART STANZEN

1 Demontage

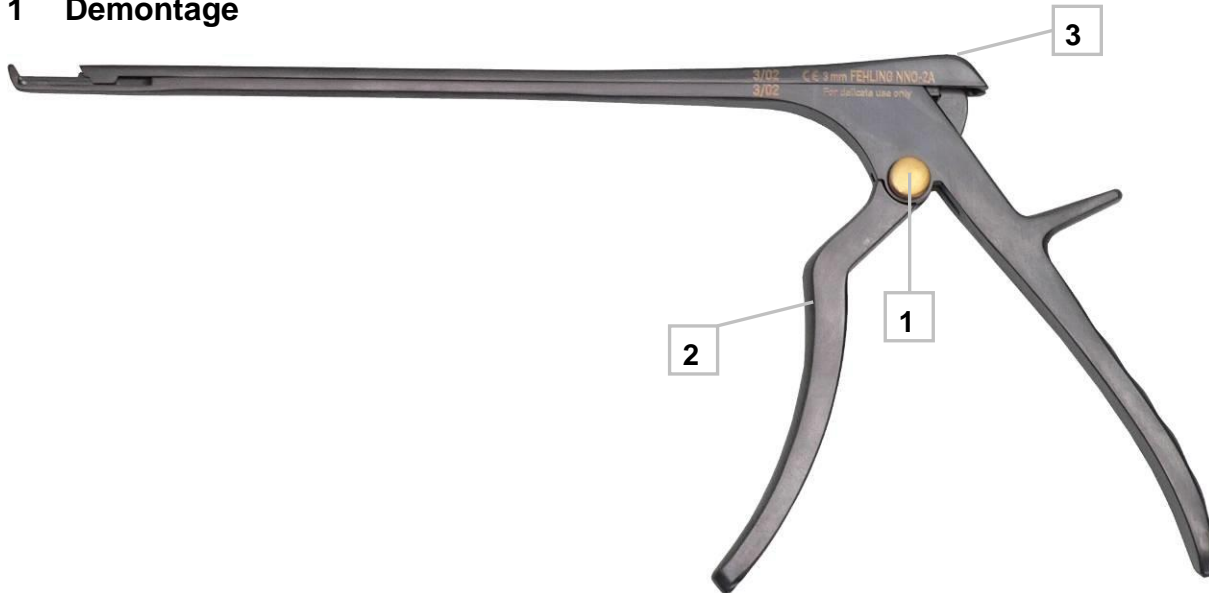

- Stanze mit der Beschriftung nach oben in beide Hände nehmen.
- Zum Entriegeln des Griffes (Nr. 2) muss der goldene Knopf (Nr. 1) fest eingedrückt werden.
- Um den Schieber (Nr. 3) abnehmen zu können, muss nun der Griff (Nr. 2) nach unten gezogen werden. **ACHTUNG:** Den Schieber dabei festhalten, damit er nicht unkontrolliert herausfallen kann.
- Der Schieber (Nr. 3) springt nun aus seiner Halterung und lässt sich leicht abnehmen. Den Griff zur Aufbereitung in der vollständig ausgefahrenen Position belassen (vgl. Nr. 4). Die zwei Einzelteile (Stanzenkorpus und Schieber) können nun aufbereitet werden.
- Die beiden Einzelteile immer paarweise in demselben Behälter aufbereiten.

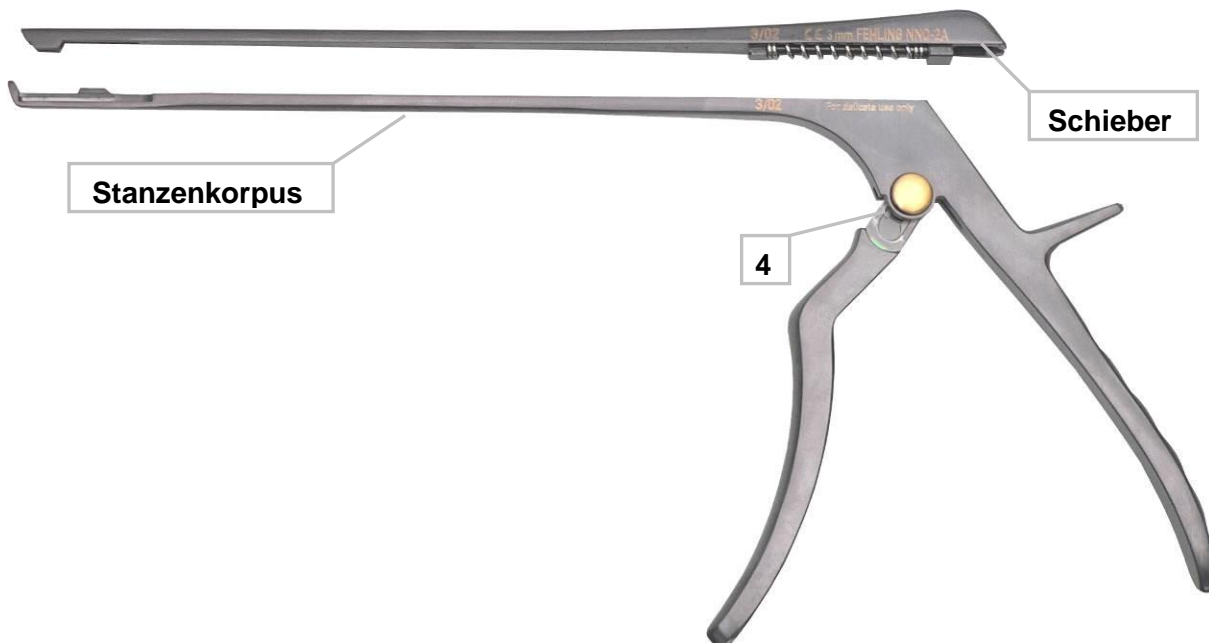

OPTION:

Die Stanzenmodelle weisen am proximalen Ende des Schiebers eine ca. 20 mm lange rillenartige Profilierung auf (siehe Abb. 1). Dreht man den Schieber um 180° in seiner Längsachse, so kann man das – jetzt unten befindliche – Profil in die proximale Führung des Schiebers bis zum Anschlag einführen. Auf diese Weise bleibt der Schieber auch während des Waschvorgangs mit dem Stanzenkorpus in Verbindung, was beim späteren Zusammenbau die Zuordnung der zusammengehörenden Schieber und Stanzenkorpus erleichtern könnte (siehe Abb. 2).





Abb. 1: Schieber mit rillenartiger Profilierung (beispielhaft anhand einer TRADITION Stanze)



Abb. 2: Darstellung beispielhaft anhand einer TRADITION Stanze

2 Zusammenbau

Jede APART Stanze besteht aus zwei Einzelteilen: Stanzenkorpus und Schieber. Zusammengebaut werden dürfen nur zusammengehörige Einzelteile. Die Zusammengehörigkeit lässt sich an der Kontrollnummer (Nr. 5) erkennen, mit der beide Einzelteile markiert sind.

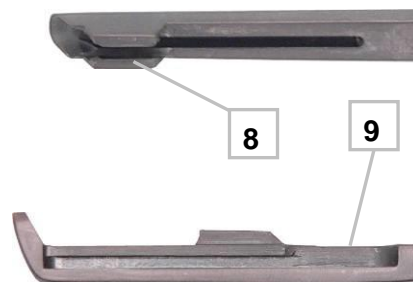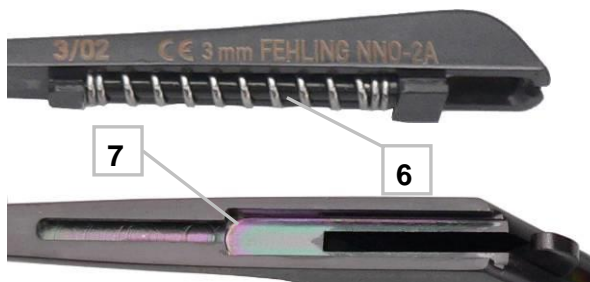


- a) Den Schieber mit der Feder (Nr. 6) auf die Einfräsung (Nr. 7) im Stanzenkorpus setzen und gleichzeitig die vordere Führung des Schiebers (Nr. 8) auf die Führungsschiene (Nr. 9) des Stanzenkorpus setzen.



- b) Die Stanzenteile in beiden Händen halten und den Schieber mit dem Daumen der rechten Hand langsam nach vorne drücken, bis das hintere Ende der Schieberführung (Nr. 10) nicht mehr zu sehen ist (Nr. 11).

- c) Position des Schiebers so halten und mit der linken Hand den Griff (Nr. 2) langsam nach oben schieben, bis er hörbar einrastet. Der Griff ist nur richtig eingerastet, wenn der goldene Knopf auf der gekennzeichneten Stanzenseite komplett heraussteht. Sollte die Knopfposition wie in der Abbildung „FALSCH“ aussehen, muss ein neuer Zusammenbau wie in den Schritten 2 a) - c) beschrieben begonnen werden. Die Stanze darf nur eingesetzt werden, wenn der Griff richtig verriegelt ist!

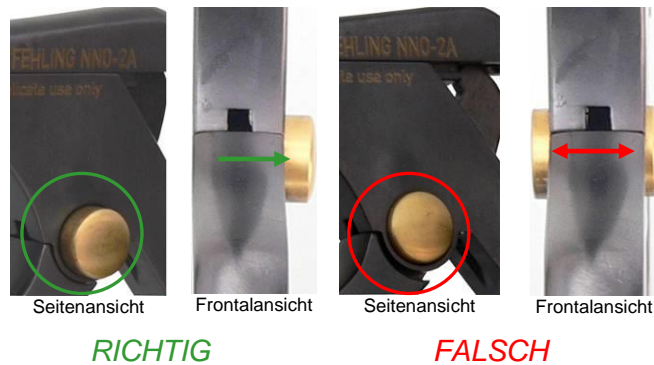

- d) Nach einem Funktionstest kann die Stanze nun wieder eingesetzt werden.