


CERAMO® TRADITION X PONSEN

1 Demontage



- Plaats de punch op een stevig werkvlak voor demontage. Draai de inbusbout (nr. 1) **met de klok mee** los met behulp van de meegeleverde TXX-0X schroevendraaier en verwijder deze uit het schroefgat.
- Trek het handvat (nr. 2) naar beneden en maak het los van het punchlichaam (nr. 4).
- De schuif (nr. 3) kan nu gemakkelijk uit het handvat worden verwijderd.
- Bereid de vier afzonderlijke delen altijd samen in dezelfde container.

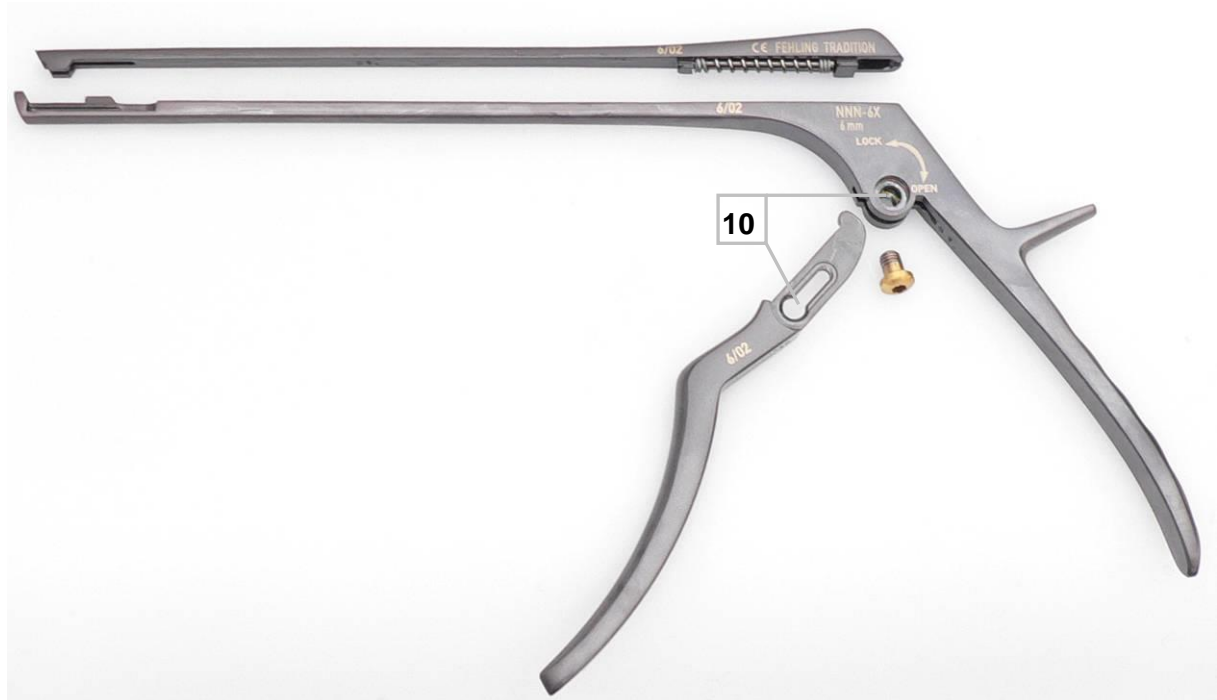

OPTIE:

Nieuwere punches hebben een ongeveer 20 mm lange groefachtige profilering aan het proximale uiteinde van de schuif (zie fig. 1). Als u de schuif 180° in zijn lengteas draait, kunt u het profiel - dat zich nu onderaan bevindt - in de proximale geleider van de schuif schuiven tot aan de aanslag. Op die manier blijft de schuiver ook tijdens het wassen in contact met het handvat, wat de toewijzing van de bij elkaar horende schuivers en ponslichamen tijdens de latere assemblage kan vergemakkelijken (zie fig. 2).



Fig. 1


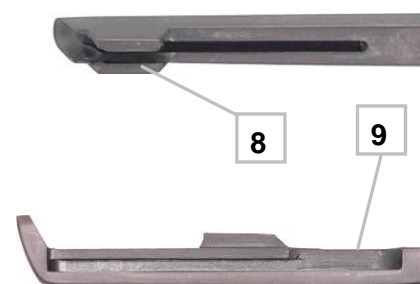


Fig. 2

2 Montage

Elke TRADITION X punch bestaat uit vier afzonderlijke delen: Punch lichaam, schuifknop, handvat en schroef. Alleen onderdelen die bij elkaar horen mogen worden gemonteerd. De onderdelen zijn te herkennen aan het controlenummer (nr. 5) waarmee alle onderdelen (behalve de schroef) zijn gemerkt. De schroeven passen op alle punches.

BELANGRIJK: Vóór de hermontage moeten de contactoppervlakken in de buurt van de schuif en de handgreep met instrumentolie worden behandeld.

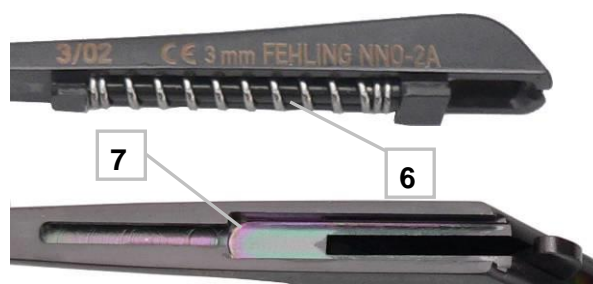

- Plaats de schuif met de veer (nr. 6) op de uitsparing (nr. 7) in het punch handvat en plaats tegelijkertijd de voorste geleider van de schuif (nr. 8) op de geleiderail (nr. 9) van het handvat.
- Duw het greepstuk langzaam tot de aanslag in de passende uitsparing in het punch handvat, zodat het schroefgat (nr. 10) van het greepstuk gelijk ligt met dat van de punch.

- c) Gebruik de meegeleverde schroevendraaier TXX-0X en schroef de inbusbout vast. **tegen de klok in** in het daarvoor bestemde schroefgat. Draai de schroef stevig vast. **WAARSCHUWING:** Niet te strak aandraaien. Als de schroef niet klemt, kan de positie van de schroefgaten ten opzichte van elkaar worden geoptimaliseerd door de schuif (nr. 3) iets naar voren te schuiven, zodat het vastschroeven gemakkelijk gaat.
- d) Na een functietest kan de punch weer worden gebruikt.

3 Waarschuwing

Om schade aan de inbuschroeven te voorkomen, dient u het volgende in acht te nemen:

De schroeven (artikelnummer TXX-2X) hebben linkse schroefdraad. Let op de draai-richting bij het los- en vastdraaien van de schroeven.

Gebruik geen kracht bij het los- en dichtdraaien van de schroeven. Het is niet nodig voor het losmaken of sluiten. Met geweld draaien van de schroef beschadigt het inbusprofiel.

Indien schade aan het inbusprofiel of het schroevendraaierprofiel kan worden vastgesteld, dient u de schroef en de schroevendraaier onmiddellijk te vervangen of door de fabrikant te laten vervangen.

De TXX-0X schroevendraaiers kunnen worden gewassen met koud water en een mild schoonmaakmiddel. Ze zijn niet geschikt voor reiniging in heet water en stoomsterilisatie bij 134°C. Op verzoek zijn steriliseerbare schroevendraaiers beschikbaar voor gebruik in de operatiekamer.