


### FEHLING BALKENSPREIZER MIT ZAHNRAD / SPERRE

Gültig für alle Balkenspreizer mit Zahnrad (Sperre)

#### 1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage



Beispielhaft: MRP-1

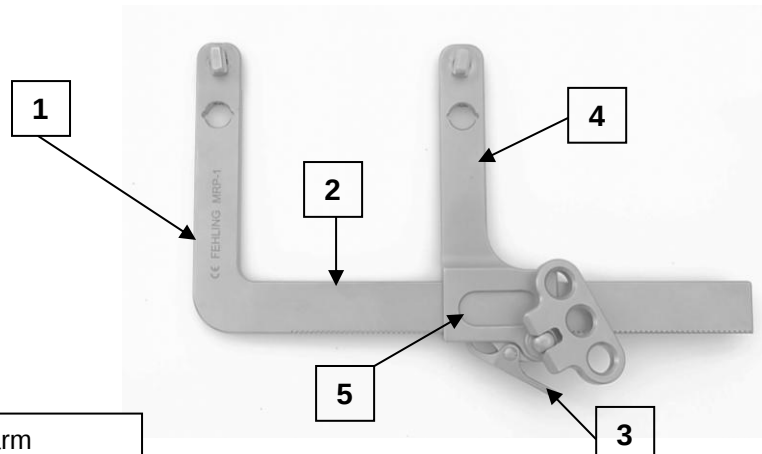

- 1 Fester Spreizerarm
- 2 Zahnstange
- 3 Sperre
- 4 Beweglicher Spreizerarm
- 5 Kasten


#### 2) Demontage

1. Den beweglichen Spreizerarm (4) auf der Zahnstange (2) soweit nach außen transportieren, bis er sich abnehmen lässt. Währenddessen die Sperre (3) durch Druck in Richtung der Zahnstange (2) lösen.
2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

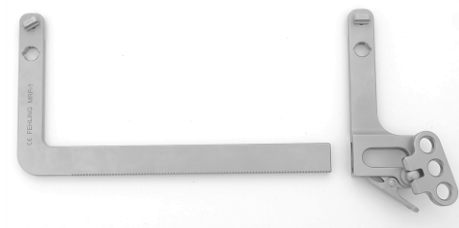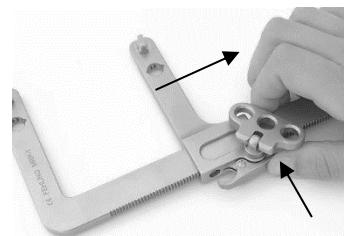


### 3) Montage

1. Die Zahnstange (2) in die Aussparung des Kastens (5) einführen. Währenddessen die Sperre (3) durch Druck in Richtung der Zahnstange (2) lösen.

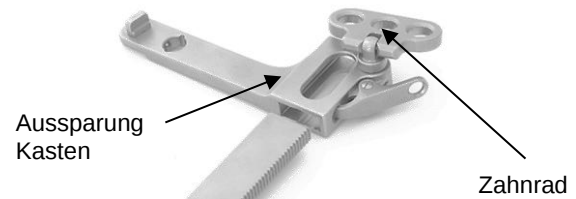


Es ist darauf zu achten, dass beide Spreizerarme in die gleiche Richtung zeigen und das Zahnrad des beweglichen Spreizerarms (4) nach außen zeigt.

2. Den beweglichen Spreizerarm (4) auf der Zahnstange (2) nach innen in Richtung des festen Spreizerarms (1) transportieren.

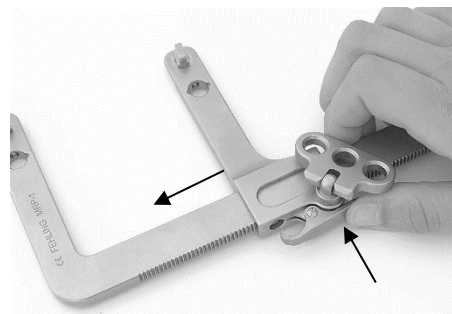

3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

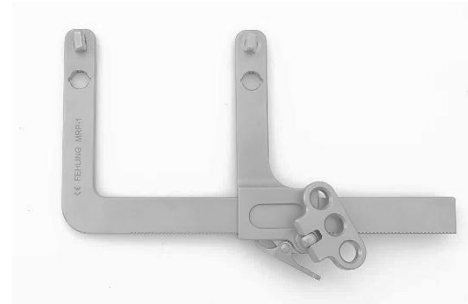

| Symbole                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
| <br>Hersteller                                                             | <br>Gebrauchsanweisung beachten<br>oder elektronische<br>Gebrauchsanweisung beachten                                                                                                                                       | <br>Achtung            |
| <br>Katalognummer                                                          | <br>Chargenbezeichnung                                                                                                                                                                                                     | <br>Seriennummer       |
| <br>Medizinprodukt                                                         | <br>eindeutige Produktidentifizierung                                                                                                                                                                                      | <br>CE-Kennzeichnung   |
| <br>Ölkännchen für zu<br>schmierende Stellen                              | <br>CE-Kennzeichnung                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| Kontakt zum Hersteller                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>CE-Kennzeichnung |
|                                                                          | FEHLING INSTRUMENTS GmbH<br>Hanauer Landstr. 7A<br>63791 Karlstein/Germany<br>Tel.: +49 (0) 6188-9574-40<br>Fax: +49 (0) 6188-9574-45<br>E-Mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a><br><a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a> |                                                                                                           |