


FEHLING KANÜLEN UND SAUGER MIT ABNEHMBAREM KORB

Gültig für alle Kanülen und Sauger mit abnehmbarem Korb

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

Beispielhaft: MNM-3

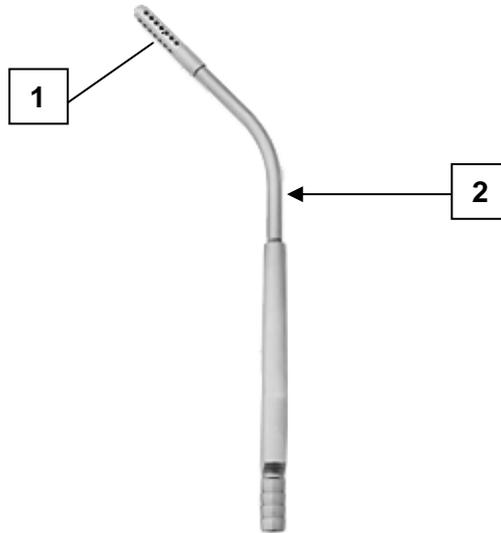

- 1 Korb
- 2 Sauger/Kanüle

2) Demontage

1. Den Korb (1) am vorderen Teil des Saugers oder der Kanüle (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dieser sich vom Gewinde nehmen lässt.




2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.



3) Montage

1. Den Korb (1) auf das Gewinde am vorderen Teil des Saugers oder der Kanüle (2) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

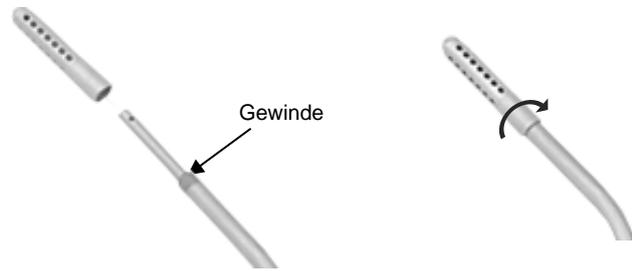

2. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.



Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:

| | | |
|---|---|---|
|  Hersteller |  Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten |  Achtung |
|  Katalognummer |  Chargenbezeichnung |  Seriennummer |
|  Medizinprodukt |  eindeutige Produktidentifizierung |  CE-Kennzeichnung |
|  Ölkännchen für zu schmierende Stellen |  CE-Kennzeichnung | |

Kontakt zum Hersteller

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p> |  |
|---|--|---|