


FEHLING HAKENFÜHRUNGEN (FÜR KUGELADAPTER) UND FÜHRUNGSZANGEN

1a) Bestandteile / Erklärungsgrundlage zweiteilige Instrumente


Beispielhaft: MRN-3A

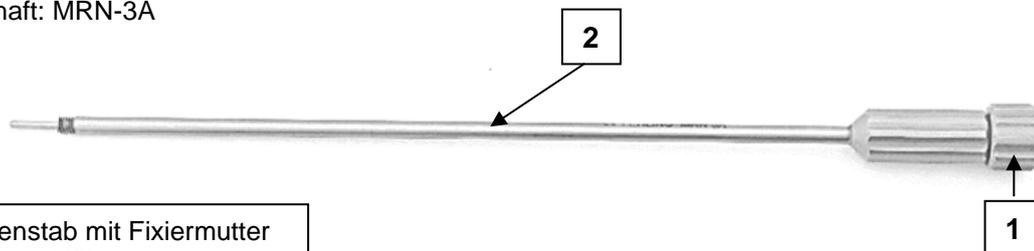

- 1 Innenstab mit Fixiermutter
- 2 äußere Hülse

1b) Bestandteile / Erklärungsgrundlage dreiteilige Instrumente


Beispielhaft: MRI-0

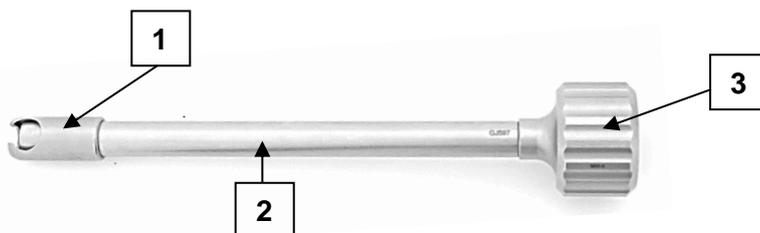


- 1 Innenstab
- 2 äußere Hülse
- 3 Fixiermutter

2a) Demontage zweiteilige Instrumente

1. Die Fixiermutter (3) am Innenstab (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das Gewinde vollständig gelöst ist und sich der Innenstab (1) in Richtung der Fixiermutter (3) aus der äußeren Hülse (2) ziehen lässt.

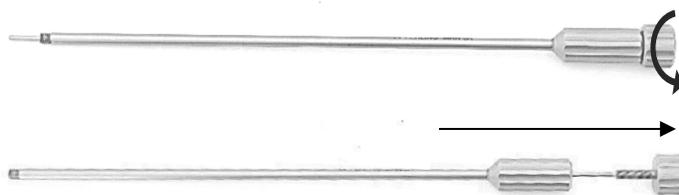

2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

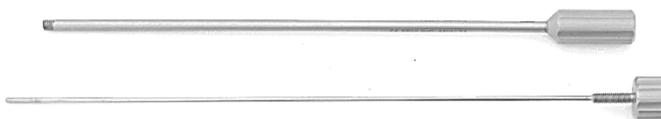


2b) Demontage dreiteilige Instrumente

1. Die Fixiermutter (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis diese sich vom Gewinde des Innenstabs (1) nehmen lässt.




- Die äußere Hülse (2) in Richtung des Gewindes vom Innenstab (1) abziehen.
- Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

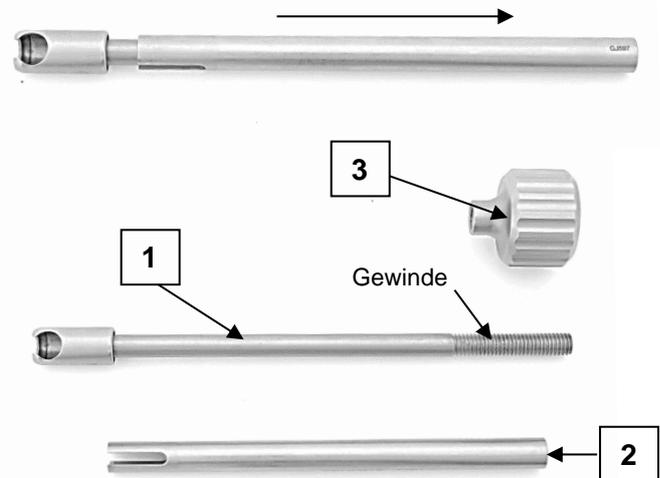

3a) Montage zweiteilige Instrumente

- Die äußere Hülse (2) über den Innenstab (1) schieben.
- Die Fixiermutter (3) auf das Gewinde des Innenstabs (1) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.
- Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

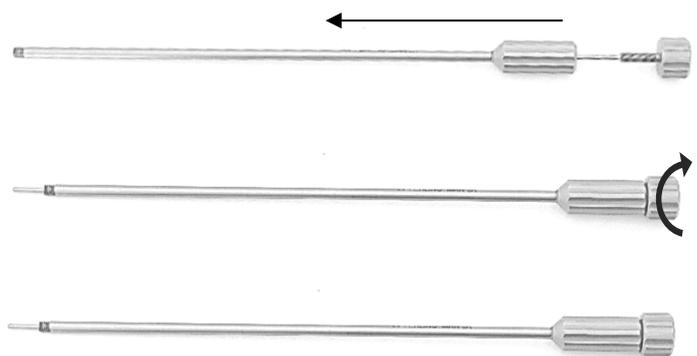

3b) Montage dreiteilige Instrumente

- Die äußere Hülse (2) über das Gewinde auf den Innenstab (1) schieben.



Es ist darauf zu achten, dass der Querriegel, der sich in der Aufnahme für die Kugeladapter des Innenstabs (1) befindet, in die beiden Schlitze der äußeren Hülse (2) hinein gleitet.

- Die Fixiermutter (3) auf das Gewinde des Innenstabs (1) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.
- Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.



Symbole		
Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:		
 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Katalognummer	 Chargenbezeichnung	 Seriennummer
 Medizinprodukt	 eindeutige Produktidentifizierung	 CE-Kennzeichnung
 Ölkännchen für zu schmierende Stellen	 CE-Kennzeichnung	
Kontakt zum Hersteller		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	