


FEHLING MÄTINSTRUMENT FÖR AORTAKLAFFSEGEL

MSS-1V, MSS-2V och MSS-3

1) Komponenter / grund för deklaration


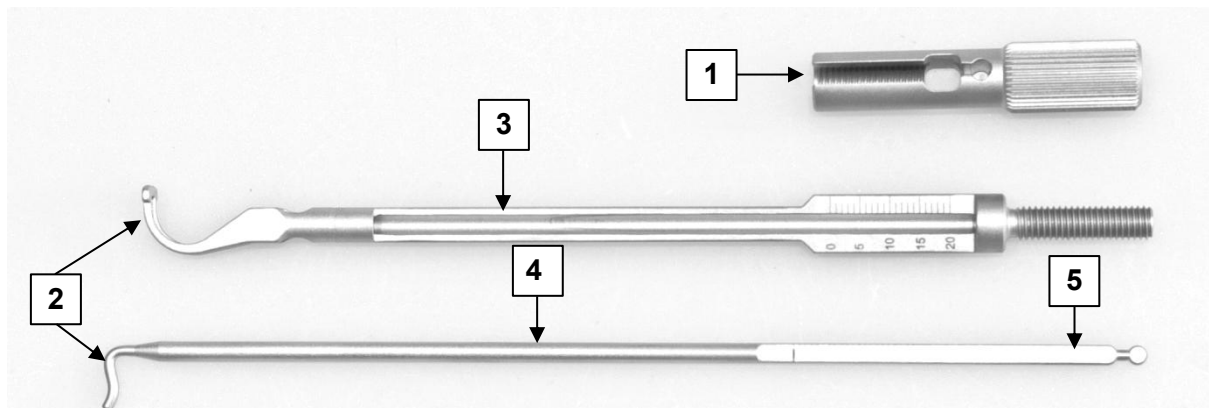


- 1 Skruvhandtag
- 2 Arbetsände
- 3 Mätarbas
- 4 Skjutreglage
- 5 Skjutreglageände

2) Demontering

För reprocessing måste mätinstrumentet demonteras i sina tre enskilda delar (mätarbas (3), skjutreglage (4) och skruvhandtag (1)).

1. Vrid skruvhandtaget (1) moturs tills det lossnar från gängan på mätarbasen (3) och ta sedan bort det.
2. Dra ut skjutreglaget (4) ur mätarbasen (3) i riktning mot arbetsändan (2).
3. Instrumentet är nu demonterat och kan reprocessas. För reprocessing, förpacka alla tre delarna tillsammans i en behållare.

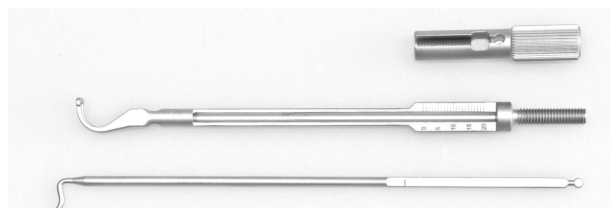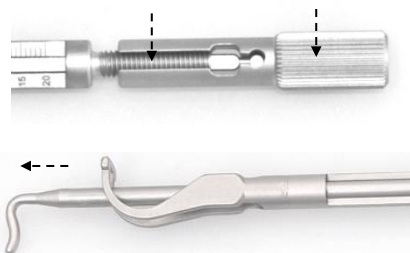

3) Montering

1. Håll mätarbasen (3) så att dess arbetsände (2) pekar uppåt och håll skjutreglaget (4) så att dess arbetsände (2) pekar nedåt.



2. I detta läge skjuter du in skjutreglaget (4) genom mätarbasens arbetsände (2) in i mätarbasen (3) - tills det tar stopp (ändläge).



Arbetsände i ändposition


3. För in reglagespetsen (5) i sidled i skruvhandtagets urtag (1) så att delarna hakar fast i varandra.



4. Tryck nu skruvhandtaget (1) lätt mot arbetsändan (2) och vrid det medurs på mätarbasen (3) gänga – tills det tar stopp.




5. Instrumentet är färdigmonterat. Utför ett funktionstest före användning. För att göra detta, vrid skruvhandtaget (1) moturs. Instrumentet är korrekt monterat om skjutreglaget (4) rör sig nedåt när skruvhandtaget (1) vrids. Om skjutreglaget (4) inte rör sig är det inte fasthakat i skruvhandtaget (1) och instrumentet har ingen funktion. I så fall måste monteringen utföras på nytt. För att göra detta, demontera först instrumentet enligt avsnitt 2) *Demontering*, montera därefter ihop det igen enligt avsnitt 3) *Montering* och utför sedan ett nytt funktionstest.

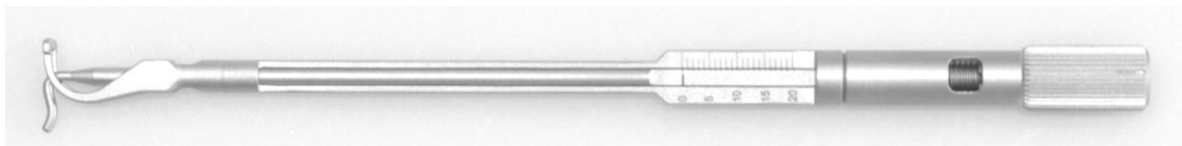

3a) Montering av låsmutter ZDS-6 (tillval)

För att säkra mätresultatet kan låsmuttern ZDS-6 (6) vid behov monteras i mätinstrumentet. Montering och användning förklaras nedan:


1. Ta bort skruvhandtaget (1) från mätarbasen (3) och skruva fast låsmuttern ZDS-6 (6) på gängan på mätarbasen (3) tills det tar stopp.

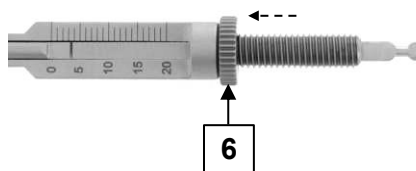

2. Sätt tillbaka skruvhandtaget (1) på mätarbasen (3) enligt beskrivningen i avsnitt 3) *Montering*.



3. Efter avslutad mätning vrider du låsmuttern (6) så långt det går mot skruvhandtaget (1). Detta innebär att skruvhandtaget (1) inte kan vridas längre, vilket fixerar mätresultatet.

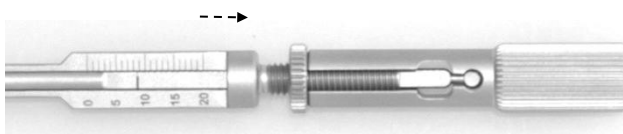

Symboler

Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:

 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	

Tillverkarens kontaktuppgifter

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---