


CALIBRADOR FEHLING DE VALVAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA

MSS-1V, MSS-2V y MSS-3

1) Componentes / Base explicativa


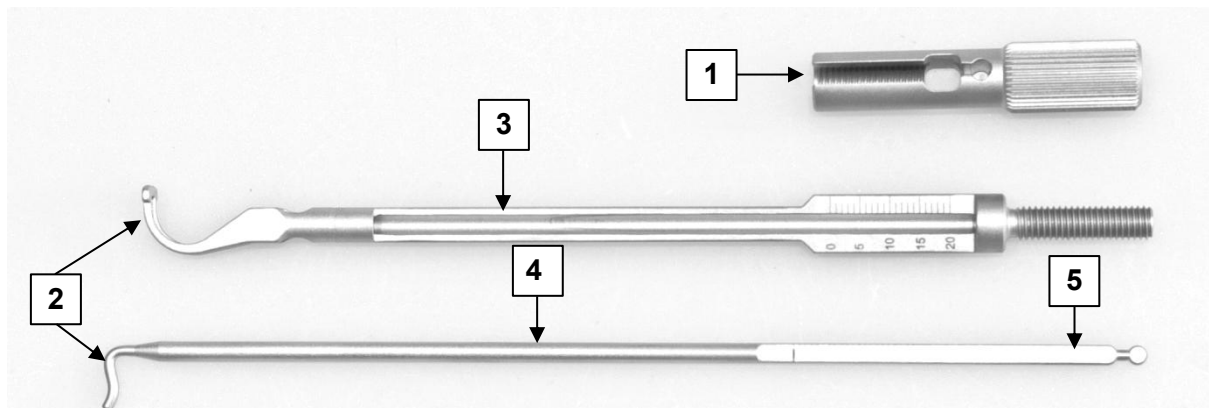


- 1 Mango de rosca
- 2 Extremo de trabajo
- 3 Cuerpo del calibre
- 4 Deslizador
- 5 Extremo deslizante

2) Desmontaje

Para su reprocesamiento, el calibre debe desmontarse en sus tres partes individuales (cuerpo del calibre (3), deslizador (4) y mango roscado (1)).

1. Gire el mango roscado (1) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte de la rosca del cuerpo del calibre (3) y, a continuación, retírela.
2. Extraiga el deslizador (4) del cuerpo del calibre (3) en dirección al extremo de trabajo (2).
3. El instrumento ya está desmontado y puede reprocesarse. Para reprocesar, empaque las tres partes juntas en un contenedor.

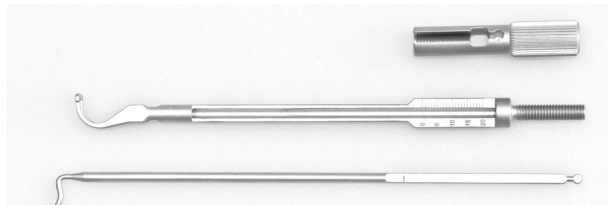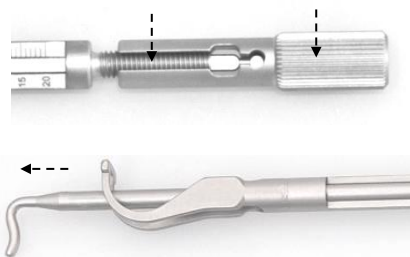

3) Montaje

1. Sujete el cuerpo del calibrador (3) de forma que su extremo de trabajo (2) apunte hacia arriba y sujete el deslizador (4) de manera que su extremo de trabajo (2) apunte hacia abajo.



2. En esta posición, empuje el deslizador (4) a través del extremo de trabajo (2) del cuerpo del calibrador hacia el interior del cuerpo del calibrador (3), hasta el tope (posición final).



Extremo de trabajo en posición final


3. Inserte lateralmente el extremo deslizante (5) en el hueco fresado del mango del tornillo (1) de forma que las piezas encajen.



4. Presione ahora ligeramente el mango del tornillo (1) hacia el extremo de trabajo (2) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj sobre la rosca del cuerpo del calibrador (3), hasta el tope.




5. El instrumento está totalmente montado. Realice una prueba de funcionamiento antes del uso. Para ello, gire la manivela del tornillo (1) en sentido contrario a las agujas del reloj. El instrumento está correctamente montado si el deslizador (4) se desplaza hacia abajo al girar la manivela del tornillo (1). Si el deslizador (4) no se mueve, es que no está enganchado en el mango roscado (1) y el instrumento no funciona. En este caso, el montaje debe realizarse de nuevo. Para ello, desmonte primero el instrumento de acuerdo con el apartado 2) *Desmontaje*, a continuación vuelva a montarlo de acuerdo con el apartado 3) *Montaje* y realice de nuevo una prueba de funcionamiento.

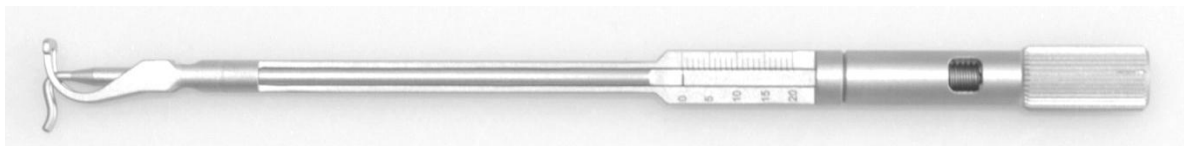


3a) Colocación de la contratuerca ZDS-6 (opcional)

La contratuerca ZDS-6 (6) puede instalarse opcionalmente en el medidor para fijar con seguridad el resultado de la medición. A continuación se explican la instalación y la aplicación:


1. Retire el mango roscado (1) del cuerpo del calibrador (3) y enrosque hasta el tope la contratuerca ZDS-6 (6) en la rosca del cuerpo del calibrador (3).

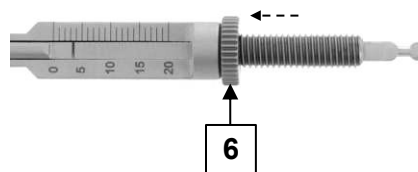

2. Vuelva a montar el mango roscado (1) en el cuerpo del calibrador (3) tal y como se describe en el apartado 3) *Montaje*.

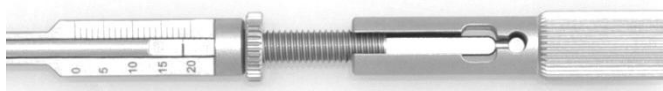

3. Una vez efectuada la medición, gire la contratuerca (6) hasta el tope contra el mango del tornillo (1). Esto significa que la manivela del tornillo (1) no puede girarse más, lo que está fijado el resultado de la medición.

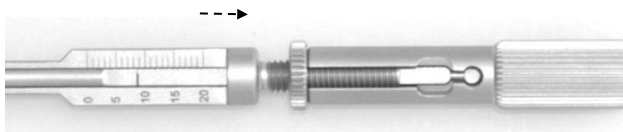

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

Fabricante	Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	Precaución
Número de catálogo	Código de lote	Número de serie
Producto sanitario	Identificador único del producto	
Aceitera que indica los puntos a lubricar	Marcado CE	Marcado CE 0297

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
--	--	--