


CALIBRO FEHLING PER LEMBI DELLA VALVOLA AORTICA

MSS-1V, MSS-2V e MSS-3

1) Componenti / base della dichiarazione


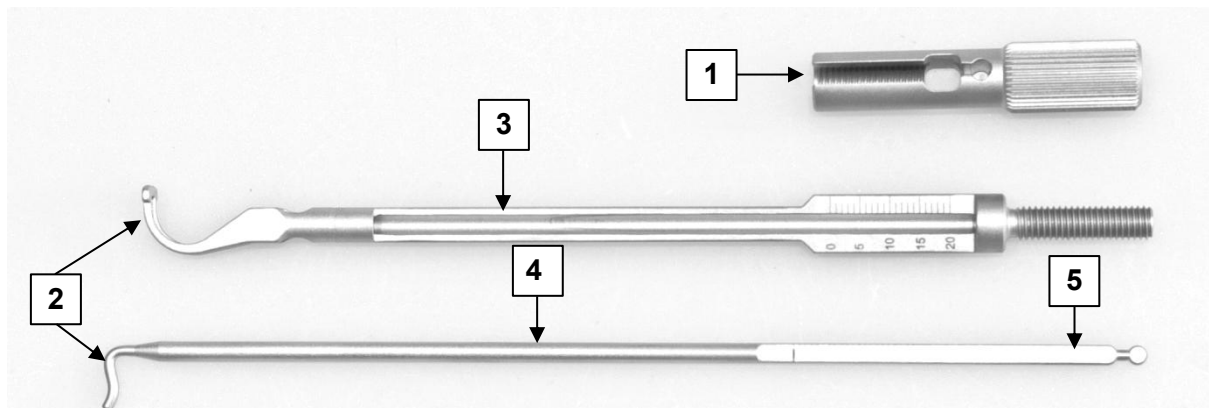


- 1 Impugnatura a vite
- 2 Fine dei lavori
- 3 Corpo del calibro
- 4 Corsore
- 5 Fine del cursore

2) Smontaggio

Per il ricondizionamento, il misuratore deve essere smontato nelle sue tre parti individuali (corpo del calibro (3), cursore (4) e impugnatura a vite (1)).

1. Ruotare l'impugnatura a vite (1) in senso antiorario fino a sganciarla dalla filettatura del corpo del calibro (3) e quindi rimuoverla.
2. Estrarre il cursore (4) dal corpo del calibro (3) in direzione dell'estremità di lavoro (2).
3. Lo strumento è ora smontato e può essere ricondizionato. Per il ricondizionamento, imballare tutte e tre le parti in un contenitore.

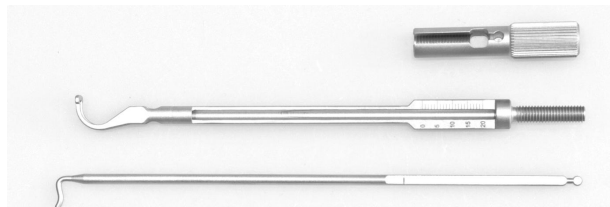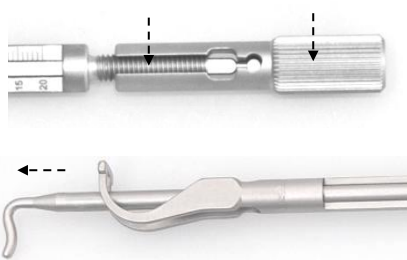

3) Montaggio

1. Tenere il corpo del calibro (3) in modo che la sua estremità di lavoro (2) sia rivolta verso l'alto e tenere il cursore (4) in modo che la sua estremità di lavoro (2) sia rivolta verso il basso.



2. In questa posizione, spingere il cursore (4) attraverso l'estremità di lavoro (2) del corpo del calibro (3), fino all'arresto (posizione finale).



Fine del lavoro in posizione finale


3. Inserire lateralmente l'estremità del cursore (5) nell'incavo fresato dell'impugnatura a vite (1) in modo che le parti si incastrino.



4. A questo punto, premere leggermente l'impugnatura della vite (1) verso l'estremità di lavoro (2) e ruotarla in senso orario sulla filettatura del corpo del calibro (3), fino all'arresto.




5. Lo strumento è completamente assemblato. Eseguire un test di funzionamento prima dell'uso. A tal fine, ruotare la maniglia della vite (1) in senso antiorario. Lo strumento è montato correttamente se il cursore (4) si sposta verso il basso quando si ruota la maniglia a vite (1). Se il cursore (4) non si muove, non è agganciato alla maniglia a vite (1) e lo strumento non funziona. In questo caso, è necessario eseguire nuovamente il montaggio. A tal fine, smontare prima lo strumento come descritto al punto 2) *Smontaggio*, quindi rimontarlo come descritto al punto 3) *Montaggio* ed eseguire nuovamente un test di funzionamento.

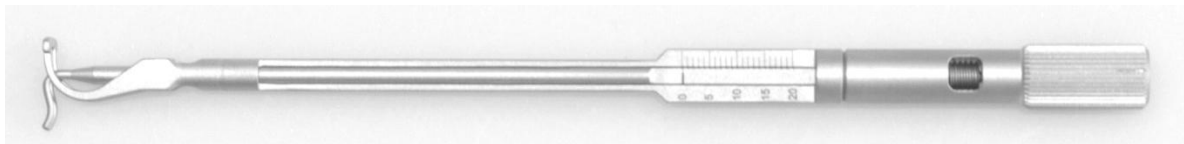

3a) Montaggio del controdado ZDS-6 (opzionale)

Il dado di bloccaggio ZDS-6 (6) può essere montato opzionalmente nel calibro per fissare in modo sicuro il risultato della misurazione. Il montaggio e l'applicazione sono spiegati di seguito:


1. Rimuovere l'impugnatura a vite (1) dal corpo del calibro (3) e avvitare il controdado ZDS-6 (6) sulla filettatura del corpo del calibro (3) fino all'arresto.

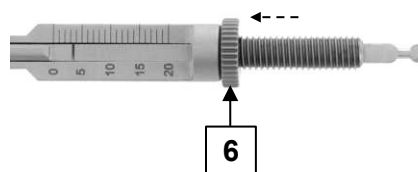

2. Rimontare l'impugnatura a vite (1) sul corpo del calibro (3) come descritto nella sezione 3) *Montaggio*.



3. Dopo aver completato la misurazione, ruotare il dado di bloccaggio (6) fino all'arresto contro la maniglia della vite (1). Ciò significa che l'impugnatura a vite (1) non può essere ruotata ulteriormente, il che fissa il risultato della misurazione.

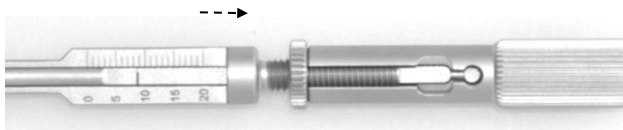

Simboli

Se indicati sul dispositivo medico o sull'etichetta del dispositivo medico o sulle istruzioni per l'uso, i simboli hanno il seguente significato, in conformità alla norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabbricante	 Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni elettroniche per l'uso	 Attenzione
 Numero di catalogo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Dispositivo medico	 Identificativo unico del dispositivo	 0297 Marcatura CE
 Lattina d'olio per le aree da lubrificare	 Marcatura CE	

Contattare il fabbricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	--	---