


FEHLING METERS VOOR AORTAKLEPBLADEN

MSS-1V, MSS-2V en MSS-3

1) Bestanddelen / verklarende basis


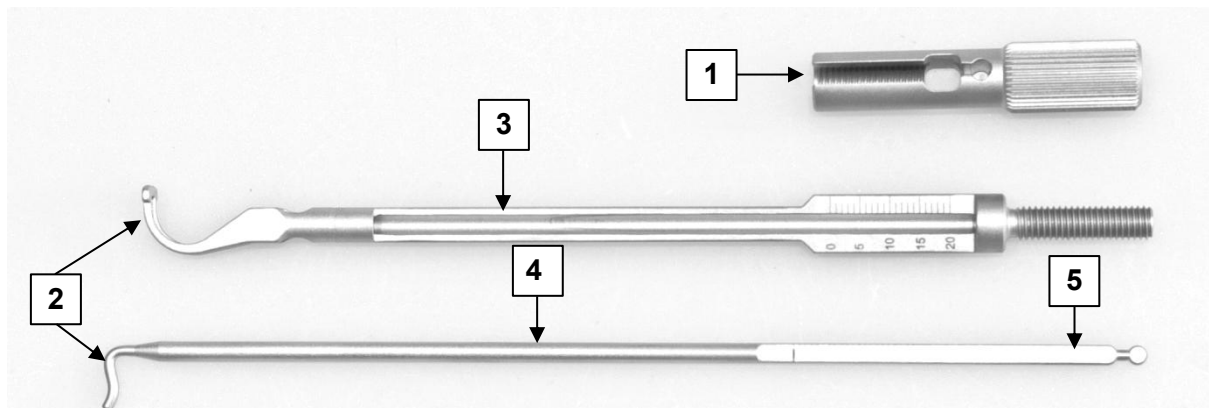


- 1 Schroefgreep
- 2 Uiteinde
- 3 Behuizing
- 4 Schuiver
- 5 Schuiveruiteinde

2) Demontage

Voor herverwerking moet de meter worden gedemonteerd in zijn drie afzonderlijke onderdelen (behuizing (3), schuiver (4) en schroefgreep (1)).

1. Draai de schroefgreep (1) linksom totdat deze loskomt van de schroefdraad van de behuizing van de meter (3) en verwijder hem dan.
2. Trek de schuiver (4) uit de behuizing (3) in de richting van het uiteinde (2).
3. Het instrument is nu gedemonteerd en kan worden herverwerkt. Om opnieuw te verwerken, verpakt alle drie de onderdelen samen in een container.

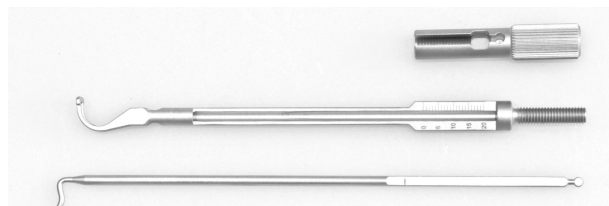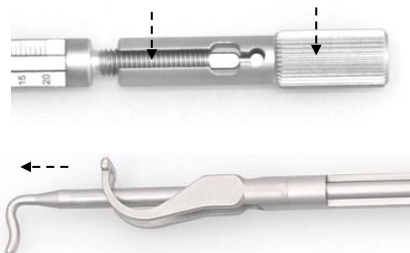

3) Montage

1. Houd de behuizing (3) zo vast dat het uiteinde (2) naar boven wijst en houd de schuiver (4) zo vast dat het uiteinde ervan (2) naar beneden wijst.



2. Duw in deze positie de schuiver (4) door het uiteinde (2) van de behuizing in de behuizing (3) - tot aan de aanslag (eindpositie).



Uiteinde in eindpositie


3. Steek het schuiveruiteinde (5) zijdelings in de uitgefreesde uitsparing van de schroefgreep (1) zodat de delen in elkaar grijpen.



4. Druk nu de schroefgreep (1) lichtjes naar het uiteinde (2) en draai deze rechtsom op de schroefdraad van de behuizing (3) - tot aan de aanslag.




5. Het instrument is volledig gemonteerd. Voer voorafgaand aan het gebruik een functietest uit. Draai hiervoor de schroefgreep (1) linksom. Het instrument is correct gemonteerd als de schuiver (4) naar beneden beweegt wanneer de schroefgreep (1) wordt gedraaid. Als de schuiver (4) niet beweegt, zit deze niet vast aan de schroefgreep (1) en werkt het instrument niet. In dit geval moet de montage opnieuw worden gedaan. Demonteer hiervoor eerst het instrument zoals beschreven in rubriek 2) *Demontage*, zet het dan weer in elkaar zoals beschreven in rubriek 3) *Montage* en voer opnieuw een functietest uit.

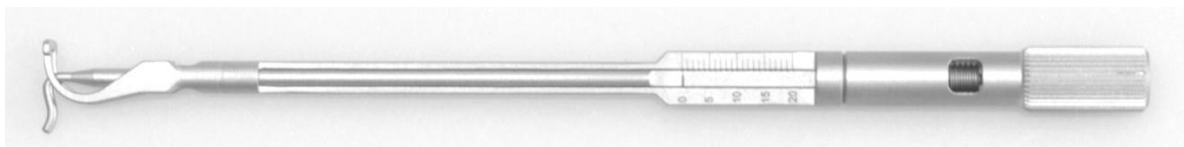

3a) Montage van de contraoer ZDS-6 (optioneel)

De contraoer ZDS-6 (6) kan optioneel in de meter worden gemonteerd om het meetresultaat goed vast te zetten. De installatie en toepassing worden hieronder uitgelegd:


1. Verwijder de schroefgreep (1) van de behuizing (3) en schroef de contraoer ZDS-6 (6) op de schroefdraad van de behuizing (3) tot aan de aanslag.

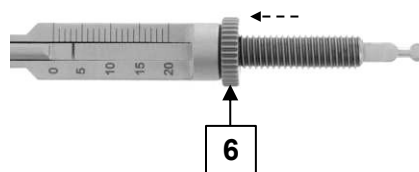

2. Bevestig de schroefgreep (1) weer aan de behuizing (3) zoals beschreven in rubriek 3) *Montage*.



3. Draai na het meten de contraoer (6) zo ver mogelijk tegen de schroefgreep (1). Dit betekent dat de schroefgreep (1) niet verder kan worden gedraaid, waardoor het meetresultaat vastligt.

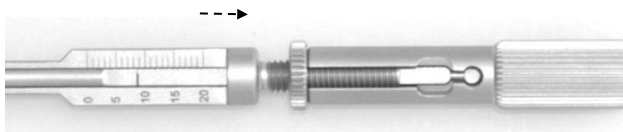

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 0297 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---