


FEHLING CERAMO-RONGEURER – TÅNGGREPP MED SKRUV

1) Komponenter / grund för deklaration

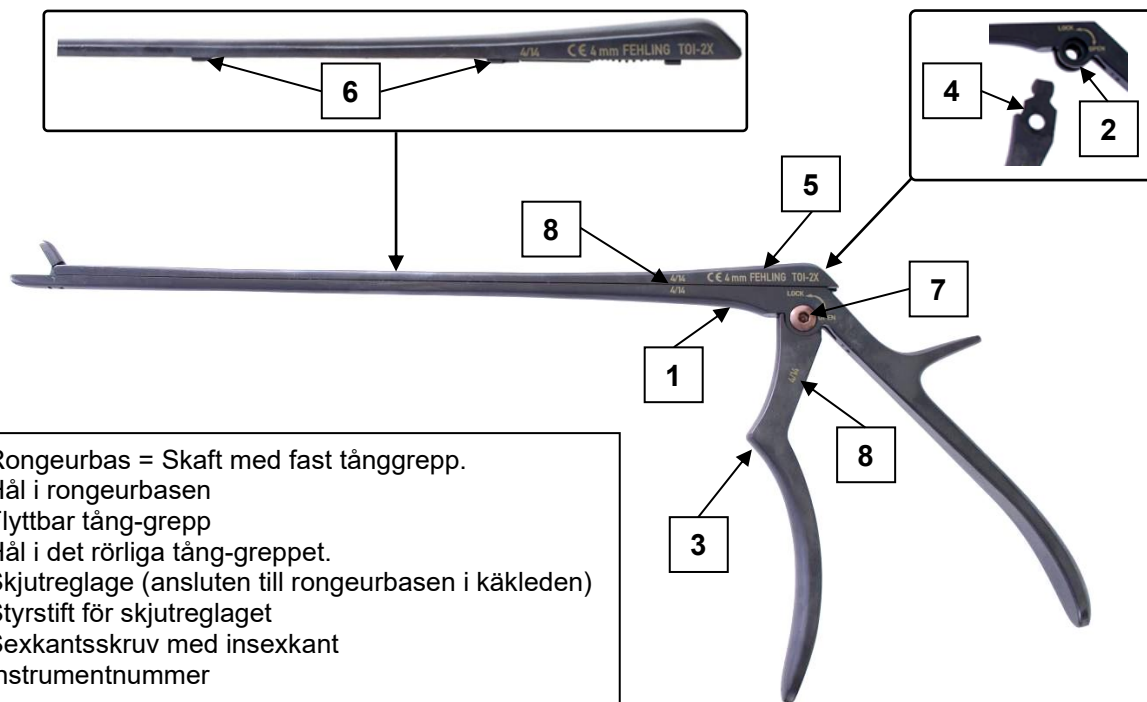

2) Demontering

1. Placera rongeuren på en fast arbetsyta för demontering. Skruva ut insexskruven (7) medurs med skruvmejseln TXX-0X (alternativt steriliserbar skruvmejsel TXW-9X) och ta ut den ur skruvhålet.



2. Dra det rörliga tånggreppet (3) nedåt ut ur rongeurbasen (1).



3. Dra skjutreglaget (5) så långt det går i riktning mot det fasta tånggreppet på rongeurbasen (1) tills käken är helt öppen. Lossa sedan styrsiften på skjutreglaget (6) uppåt från styrskenan på rongeurbasen (1).



4. Vik upp skjutreglaget (5) så att det blir tillräckligt spel mellan skjutreglaget (5) och rongeurbasens (1) skaft. Se till att käften är helt öppen. Rengör rongeuren i detta läge.



Skjutreglaget (5) är fast förbundet med rongeurbasens (1) skaft genom käftleden. Sidorörelse av skjutreglaget (5) i öppet läge leder till deformation eller till och med brott på leden eller styrsiftet på skjutreglaget (6).

3) Montering


1. Rongeurbasen (1) och det rörliga tånggreppet (3) har ett identiskt instrumentnummer (8), t.ex. X20K553WM28. Endast instrumentdelar med samma instrumentnummer (8) får sättas samman. Insexskruvarna (7) är universellt lämpliga för alla löstagbara rongeurer med tånggrepp och skruv.



2. För ner skjutreglaget (5) på skaftet. För att göra detta måste skjutreglaget (5) dras tillbaka mot tånggreppet så att käftarna är maximalt öppna. Först då kan styrsiften på skjutreglaget (6) föras in i skaftets styrskena i rätt läge.



3. Tryck fast skjutreglaget (5) på skaftet på rongeurbasen (1) och skjut sedan skjutreglaget (5) mot käften tills det tar stopp.

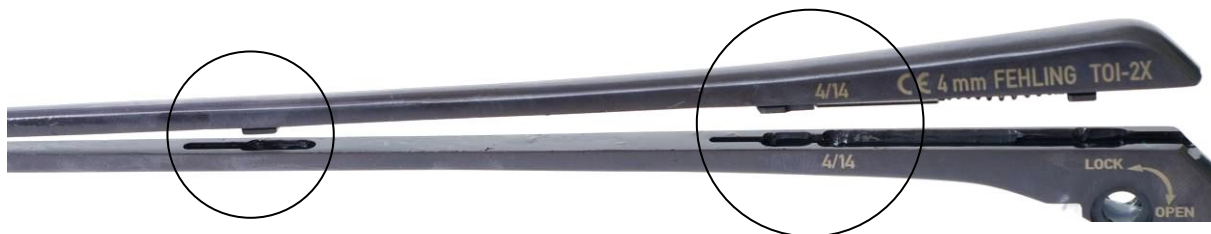

Styrstiften på skjutreglaget (6) måste föras in i motsvarande uttag i rongeurbasen (1) (se detaljerad illustration: upptill – styrstift, nedtill – infästning i skaftet).

4. Med skjutreglaget (5) och axeln i samma läge, tryck in den rörliga tångens greppdel (3) i rongeurbasen (1). Se till att hålen i det rörliga tånggreppet (4) och rongeurbasen (2) är exakt i linje med varandra.



5. För sedan in insexskruven (7) i hålet och dra åt den moturs med skruvmejseln utan att använda kraft.



6. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.



- Dessa sexkantsskruvar har vänstergänga. Observera rotationsriktningen när du lossar och drar åt insexskruvarna.
- Använd inte kraft när du lossar och drar åt insexskruven, eftersom det inte behövs. Om du vrider skruven med våld skadas den sexkantsförsedda profilen.
- Om skador på insexprofilen eller skruvmejselprofilen kan upptäckas, ska du omedelbart byta ut insexskruven och skruvmejseln eller låta tillverkaren byta ut dem.
- Skruvmejseln TXX-0X kan tvättas med kallt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Den är inte lämplig för rengöring i hett vatten och ångsterilisering vid 134 °C.

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	
Tillverkarens kontaktuppgifter		 CE-märkning
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	