


För CERAMO-RONGEURER – RINGGREPP MED PÅFÅGELÖGA




1) Komponenter / grund för deklaration

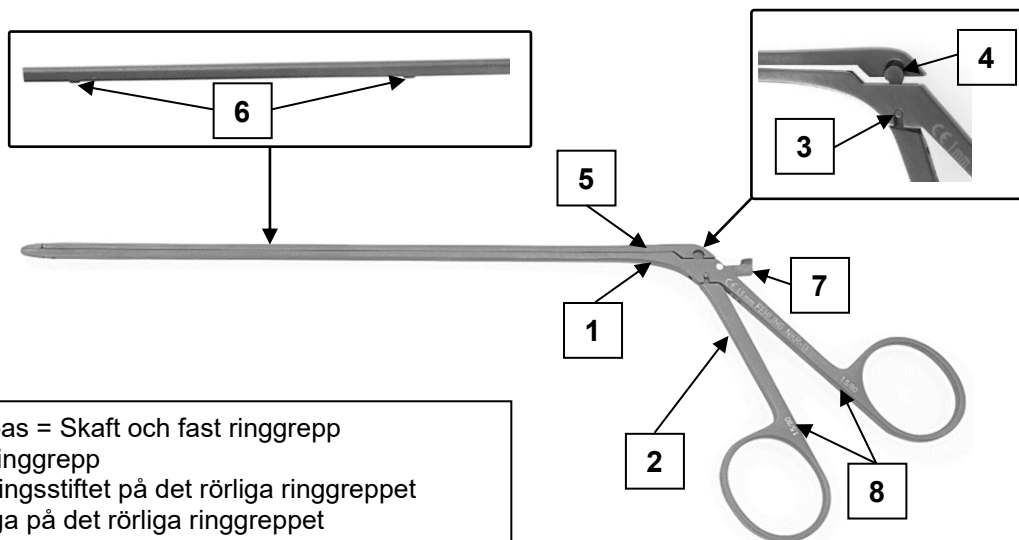

- 1 Rongeurbas = Skaft och fast ringgrepp
- 2 Flyttbart ringgrepp
- 3 Begränsningsstiftet på det rörliga ringgreppet
- 4 Påfågelöga på det rörliga ringgreppet
- 5 Skjutreglage (ansluten till rongeurbasen i käkleden)
- 6 Styrstift för skjutreglaget
- 7 Lås (endast för instrument med lås)
- 8 Instrumentnummer

2) Demontering

1. **För instrument med lås (t.ex. NKR-1Y):**
Före steg 2 i demonteringen ska du öppna spärren (7) på rongeurbasens (1) bakre del genom att vrida den medurs.
2. Håll den stängda rongeuren (käften är stängd) med båda händerna och tryck försiktigt ut skjutreglaget (5) ur styrningsaxeln med vänster tumme.
3. Dra skjutreglaget (5) bakåt tills påfågelögat på det rörliga ringgreppet (4) lossnar från sin infästning i skjutreglaget (5).

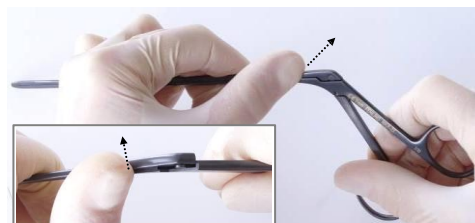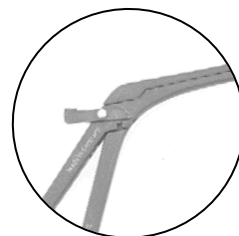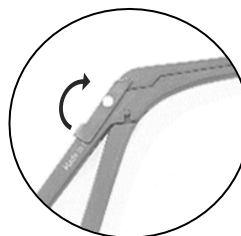

4. Dra skjutreglaget (5) uppåt och låt det vila löst på påfågelögat på det rörliga ringgreppet (4).




5. Dra det rörliga ringgreppet (2) nedåt ut ur rongeurbasen (1).



6. Dra skjutreglaget (5) så långt det går i riktning mot det fasta ringgreppet på rongeurbasen (1) tills käken är helt öppen. Lossa sedan styrstiften på skjutreglaget (6) uppåt från styrskenan på rongeurbasen (1).



7. Vik upp skjutreglaget (5) så att det blir tillräckligt spel mellan skjutreglaget (5) och rongeurbasens (1) skaft. Se till att käften är helt öppen. Rengör rongeuren i detta läge.

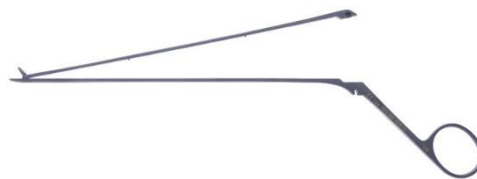

Skjutreglaget (5) är fast förbundet med rongeurbasens (1) skaft genom käftleden. Sidorörelse av skjutreglaget (5) i öppet läge leder till deformation eller till och med brott på leden eller styrstiftet på skjutreglaget (6).

3) Montering


1. Rongeurbasen (1) och det rörliga ringgreppet (2) har ett identiskt instrumentnummer (8), t.ex. X20K553WM28. Endast instrumentdelar med samma instrumentnummer (8) får sättas samman.



2. Ta rongeuren i båda händerna och fäll ner skjutreglaget (5) mot skaftet på rongeurbasen (1). Dra samtidigt skjutreglaget (5) i riktning mot rongeurbasens (1) fasta ringgrepp så att rongeurens käft öppnas helt.



3. Tryck skjutreglaget (5) mot skaftet på rongeurbasen (1) och skjut det sedan tills det tar stopp i riktning mot käften, tills den stänger sig.

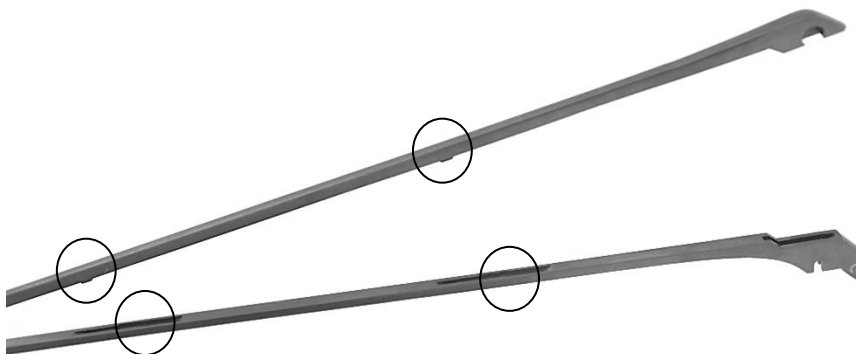

Styrstiften på skjutreglaget (6) måste föras in i motsvarande uttag i rongeurbasen (1) (se detaljerad illustration: upptill – styrstift, nedtill – infästning i skaftet).


4. Låt skjutreglaget (5) vila löst på rongeurbasens (1) skaft och för in det rörliga ringgreppet (2) i rongeurbasen (1) underifrån tills begränsningsstiftet på det rörliga ringgreppet (3) stannar i sin infästning i rongeurbasen (1).



5. Tryck försiktigt ut skjutreglaget (5) ur rongeurbasens (1) styrningsaxel och för det samtidigt i riktning mot rongeurbasens (1) skaft, tills påfågelögat på det rörliga ringgreppet (4) snäpper in i sin infästning i skjutreglaget.



6. **För instrument med lås (t.ex. NKR-1Y):** Före steg 7 i monteringen, placera låset (7) på rongeurbasens (1) bakre del och vrid det medurs för att låsa.

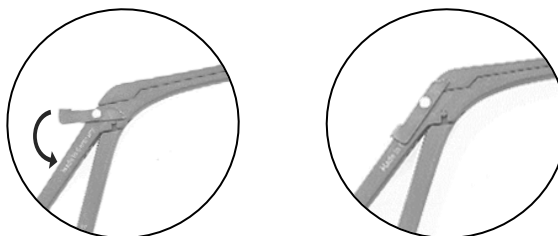

7. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	
Tillverkarens kontaktuppgifter		 CE-märkning
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	