


FEHLING CERAMO RONGEURS – MANGO ANULAR CON JUNTA GIRATORIA


1) Componentes / Base explicativa

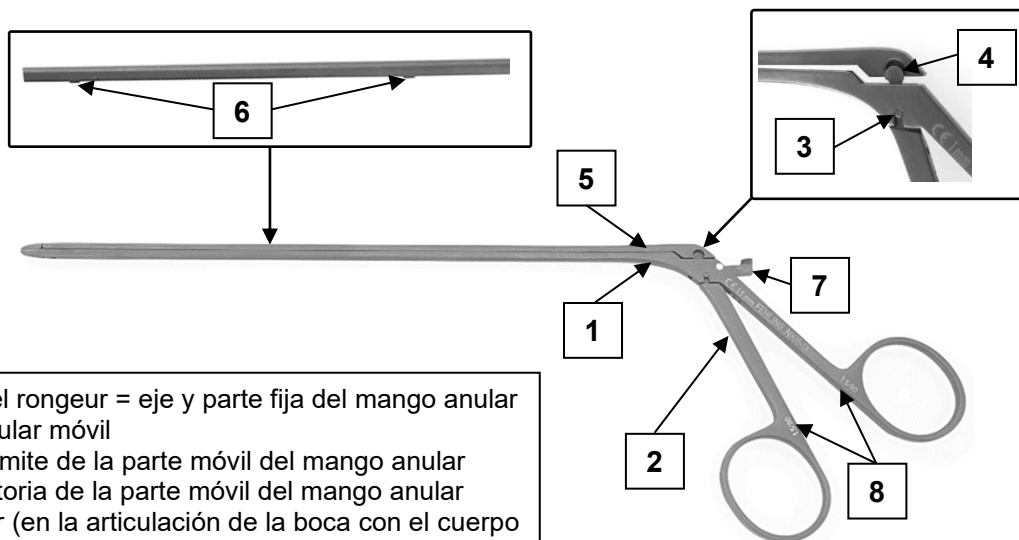

- 1 Cuerpo del rongeuer = eje y parte fija del mango anular
- 2 Mango anular móvil
- 3 Pasador límite de la parte móvil del mango anular
- 4 Junta giratoria de la parte móvil del mango anular
- 5 Deslizador (en la articulación de la boca con el cuerpo del rongeuer conectado)
- 6 Pasador guía del deslizador
- 7 Pestillo (sólo para instrumentos con pestillo)
- 8 Número de instrumentos

2) Desmontaje

1. **Para instrumentos con pestillo (por ejemplo, NKR-1Y):** Antes del paso 2 de desmontaje, abra el pestillo (7) de la parte trasera del cuerpo del rongeuer (1) girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

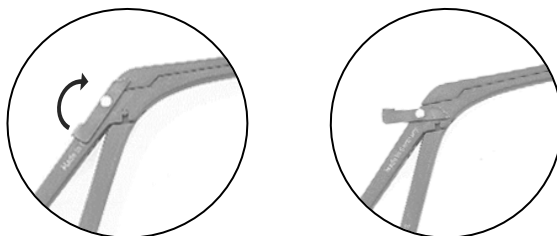

2. Tome el rongeuer cerrado (boca cerrada) con ambas manos y empuje suavemente el deslizador (5) hacia fuera del eje guía con el pulgar de la mano izquierda.



3. Presione el deslizador (5) hacia atrás hasta que la junta giratoria de la parte móvil del mango anular (4) se suelte de su soporte en el deslizador (5).



4. Deslice el deslizador (5) hacia arriba y deje que se apoye sin apretar en la junta giratoria de la parte móvil del mango anular (4).




5. Tire de la parte móvil del mango anular (2) hacia abajo para extraerla del cuerpo del rongeur (1).



6. Tire del deslizador (5) hasta el tope en la dirección de la parte de mango anular fijo del cuerpo del rongeur (1) hasta que la boca esté completamente abierta. A continuación, suelte hacia arriba los pasadores guía del deslizador (6) del carril guía del cuerpo del rongeur (1).



7. Doble el deslizador (5) hacia arriba para crear suficiente distancia entre el deslizador (5) y el eje del cuerpo del rongeur (1). Asegúrese de que la boca está completamente abierta. Limpie el rongeur en esta posición.

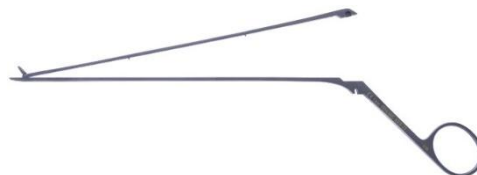


El deslizador (5) está firmemente unido al eje del cuerpo del rongeur (1) por la articulación de la boca. El movimiento lateral del deslizador (5) en posición abierta provoca la deformación o incluso la rotura de la articulación o del pasador guía del deslizador (6).

3) Montaje

1. El cuerpo del rongeur (1) y la parte móvil del mango anular (2) tienen un número de instrumento (8) idéntico, por ejemplo X20K553WM28. Sólo pueden ensamblarse piezas de instrumentos con el mismo número de instrumento (8).



2. Tome el rongeur con ambas manos y doble el deslizador (5) hacia el eje del cuerpo del rongeur (1). Al mismo tiempo, tire del deslizador (5) en la dirección de la parte del mango anular fijo del cuerpo del rongeur (1) para que la boca del rongeur se abra completamente.
3. Presione el deslizador (5) sobre el eje del cuerpo del rongeur (1) y, a continuación, empujelo hasta el tope en la dirección de la boca hasta que se cierre.

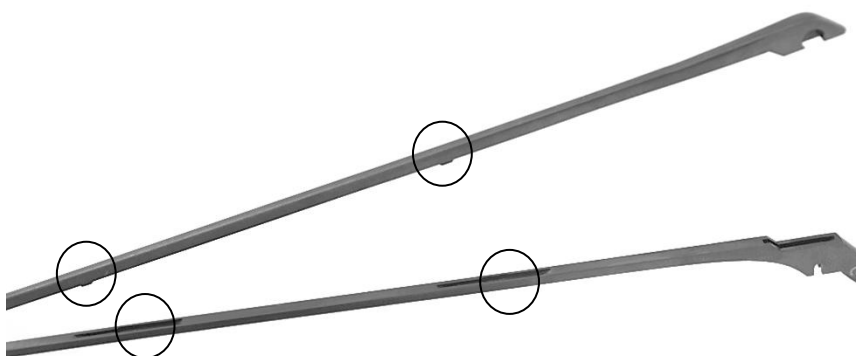

Los pasadores guía del deslizador (6) tienen que insertarse en los correspondientes soportes del eje del cuerpo del rongeur (1) (véase la ilustración detallada: arriba - pasadores guía, abajo - soporte en el eje).



4. Deje que el deslizador (5) descansa libremente sobre el eje del cuerpo del rongeurs (1) e introduzca la parte móvil del mango anular (2) en el cuerpo del rongeurs (1) desde abajo hasta que el pasador de límite de la parte móvil del mango anular (3) haga tope en su soporte en el cuerpo del rongeur (1).



5. Presione suavemente el deslizador (5) fuera del eje guía del cuerpo del rongeur (1) y muévelo en la dirección del eje del cuerpo del rongeur (1) hasta que la junta giratoria de la parte móvil del mango anular (4) encaje en su soporte en el deslizador.



6. **Para instrumentos con pestillo (por ejemplo, NKR-1Y):** Antes del paso 7. de montaje, coloque el pestillo (7) en la parte trasera del cuerpo del rongeur (1) en sentido antihorario para cerrarlo.

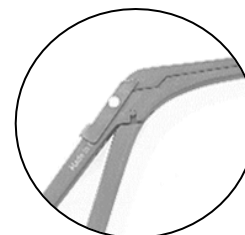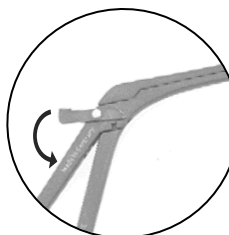

7. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	--	---