


FEHLING CERAMO RONGEURER – RINGGREPP MED SKRUV

1) Komponenter / grund för deklaration

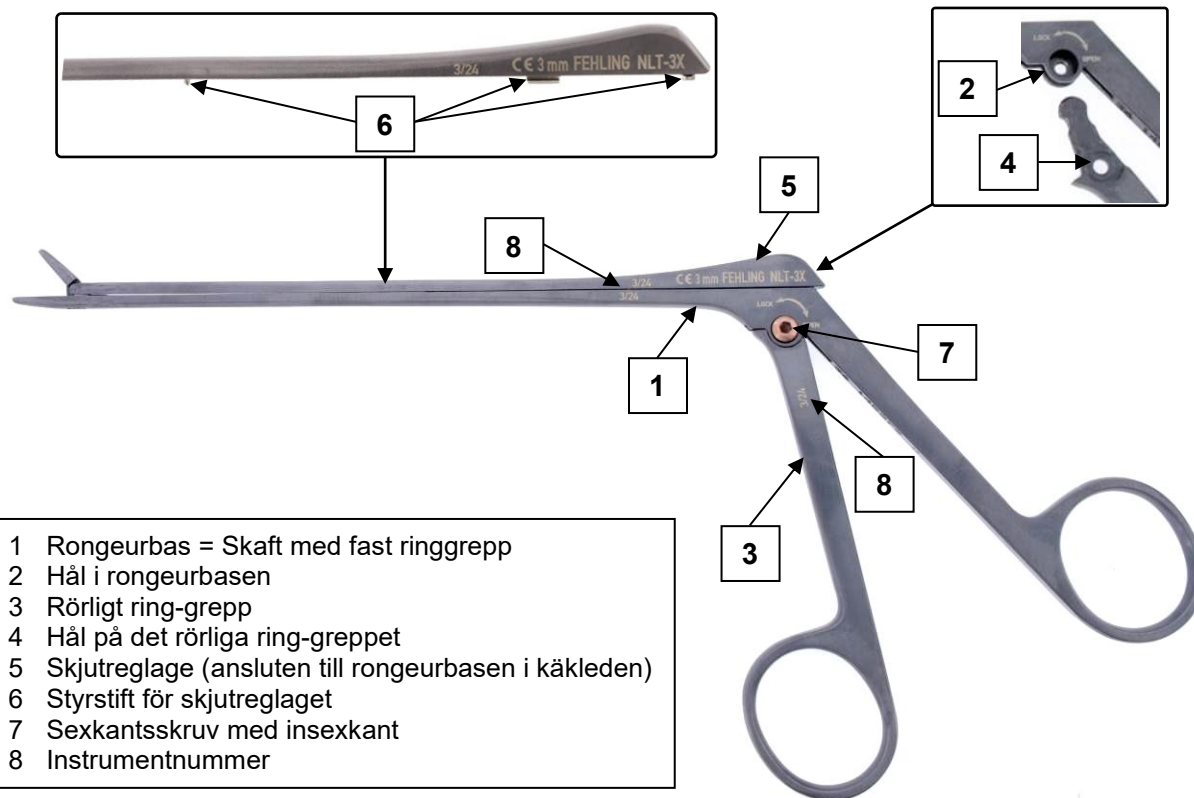


2) Demontering

1. Placera rongeuren på en fast arbetsyta för demontering. Skruva ut insexskruven (7) medurs med skruvmejseln TXW-1X (alternativt den steriliserbara skruvmejseln TXW-2X) och ta ut den ur skruvhålet.
2. Med stängd rongeurkäft, dra det rörliga ringgreppet (3) nedåt ut ur rongeurbasen (1).



3. Dra skjutreglaget (5) så långt det går i riktning mot det fasta ringgreppet på rongeurbasen (1) tills käfen är helt öppen. Lossa sedan styrsriften på skjutreglaget (6) uppåt från styrskenan på rongeurbasen (1).
4. Vik upp skjutreglaget (5) så att det blir tillräckligt spel mellan skjutreglaget (5) och rongeurbasens (1) skaft. Se till att käften är helt öppen. Rengör rongeuren i detta läge.

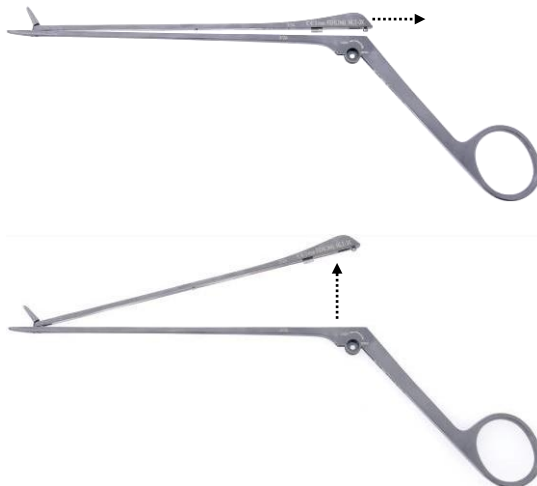


Skjutreglaget (5) är fast förbundet med rongeurbasens (1) skaft genom käftleden. Sidorörelse av skjutreglaget (5) i öppet läge leder till deformation eller till och med brott på leden eller styrsiftet på skjutreglaget (6).

3) Montering

1. Rongeurbasen (1) och det rörliga ringgreppet (3) har ett identiskt instrumentnummer (8), t.ex. X20K553WM28. Endast instrumentdelar med samma instrumentnummer (8) får sättas samman. Insexskruvarna (7) är universellt lämpliga för alla löstagbara rongeurer med ringgrepp och skruv.



2. För ner skjutreglaget (5) på skaftet. Skjutreglaget (5) måste dras tillbaka mot ringgreppet så att käften är maximalt öppen. Först då kan styrsriften på skjutreglaget (6) föras in i skaftets styrskena i rätt läge.

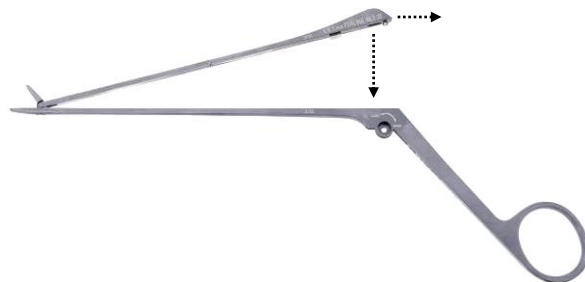



Det proximala styrstiftet måste sättas in i den yttersta änden av styrskenan (se detaljerad illustration: upptill – styrsstift, nedtill – fästen i skaftet).

3. Tryck skjutreglaget (5) mot skaftet på rongeurbasen (1) och skjut det sedan tills det tar stopp i riktning mot käften, tills den stänger sig.



4. Med käften fortfarande stängd, skjut in det rörliga ringgreppet (3) i rongeurbasen (1). Se till att hålen på det rörliga ringgreppet (4) och rongeurbasen (2) ligger exakt i linje med varandra.



5. Sätt sedan in insexskruven (7) i hålet och skruva fast den helt moturs med skruvmejseln utan att använda kraft.



6. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

	• Dessa sexkantsskruvar har vänstergänga. Observera rotationsriktningen när du lossar och drar åt insexskruvarna. • Använd inte kraft när du lossar och drar åt insexskruven, eftersom det inte behövs. Om du vrider skruven med våld skadas den sexkantsförsedda profilen. • Om skador på insexprofilen eller skruvmejselprofilen kan upptäckas, ska du omedelbart byta ut insexskruven och skruvmejseln eller låta tillverkaren byta ut dem. • Skruvmejseln TXW-1X kan tvättas med kallt vatten och mildt rengöringsmedel. Den är inte lämplig för rengöring i hett vatten och ångsterilisering vid 134 °C.
---	--

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	

Tillverkarens kontaktuppgifter		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	