


KANIULE DO ODSYSANIA Z ODŁĄCZANYM ZŁĄCZEM LUER LOCK (ZŁĄCZEM LL) FEHLING

Dotyczy wszystkich kaniul do odsysania z odłączanym złączem LL

1) Elementy składowe / podstawa opisu


Przykład: MRK-5

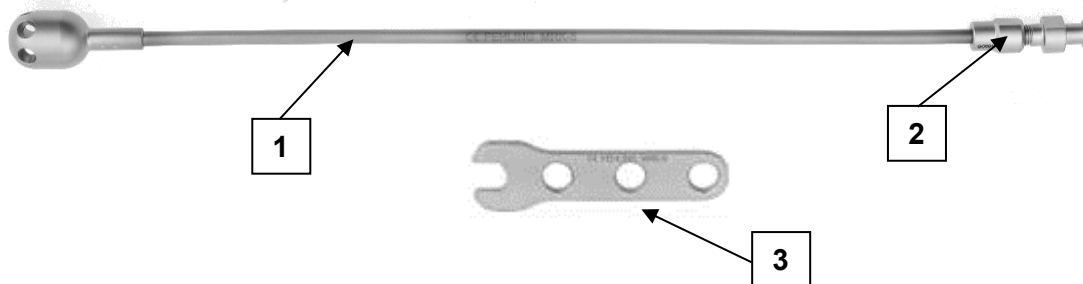

- 1 kaniula do odsysania
- 2 odłączane złącze LL
- 3 klucz płaski (np. klucz kontrolujący MRK-6)

2) Demontaż

1. W celu demontażu należy przytrzymać złącze LL (2) za pomocą dwóch kluczy płaskich (3) i odkręcić wewnętrzną nakrętkę złączkową, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

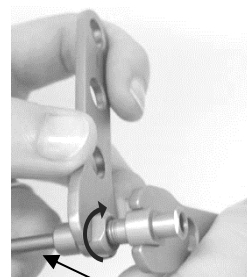

nakrętka złączkowa

2. Ściągnąć złącze LL (2) z tulei kaniuli do odsysania (1).



3. Złącze LL (2) składa się z dwóch części: rowkowanego gwintu montażowego i nakrętki złączkowej. Aby je rozłączyć, należy obracać nakrętkę złączkową przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można ją zdjąć.



nakrętka złączkowa

4. Po rozmontowaniu złącza LL na poszczególne części można poddać je reprocessowaniu.



3) Montaż

1. W celu zamontowania narzędzia należy nasunąć nakrętkę złączkową złącza LL (2) na tuleję kaniuli do odsysania (1).




2. Należy również nałożyć rowkowany gwint montażowy złącza LL (2) na tuleję i przesunąć go do oporu.



3. Wsunąć nakrętkę złączkową na rowkowany gwint montażowy i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą dwóch kluczy płaskich (3).

nakrętka złączkowa

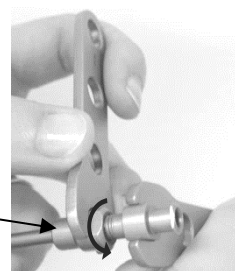

4. Złącze LL (2) jest teraz zamocowane na kaniuli do odsysania i gotowe do ponownego użycia po wykonaniu testu działania.



Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	