


FEHLING CHORDAEMETER EN KNOOPASSISTENT

MNV-4, MNV-7, MNV-9



1) Bestanddelen / verklarende basis

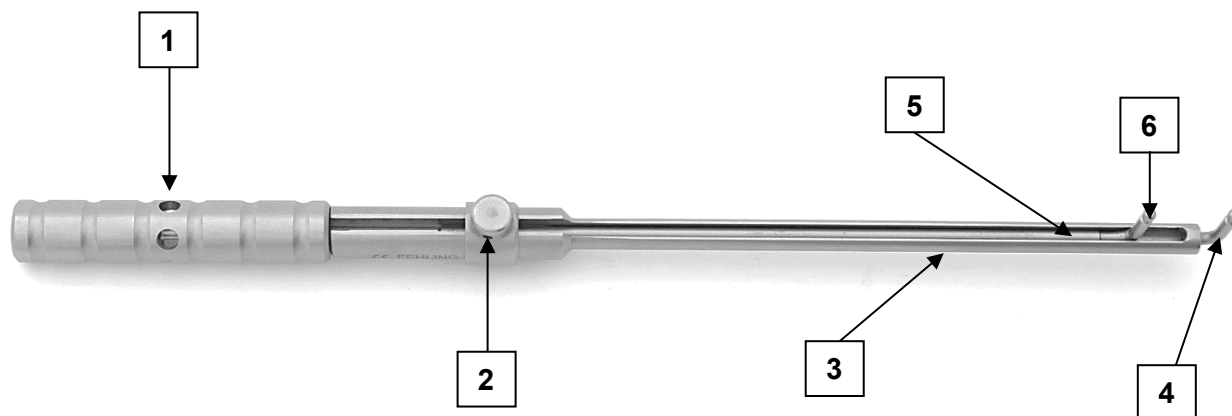

- 1 Instrumentgreep
- 2 Ontgrendelingsknop
- 3 Instrumentas
- 4 Schachtuiteinde
- 5 Instrumentschuiver
- 6 Schuiveruiteinde


2) Demontage

1. Draai de instrumentgreep (1) linksom totdat deze (1) helemaal los is.
2. Verwijder in de volgende stap de instrumentschuiver (5). Druk om dit te doen de ontgrendelingsknop (2) in de richting van de schacht en trek tegelijkertijd de instrumentschuiver (5) volledig uit in de richting van het uiteinde van de schacht.
3. Het in drie onderdelen uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.

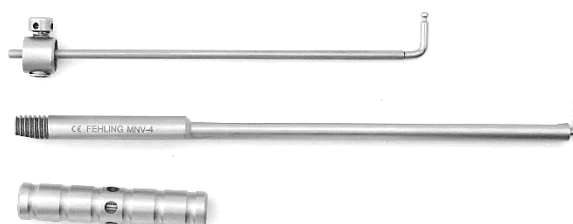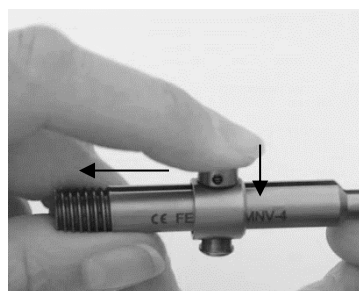

3) Montage

1. Steek de instrumentschuiver (5) in het schachtuiteinde en duw deze voorbij de schroefdraad in de richting van het uiteinde (4). Druk ondertussen de ontgrendelingsknop (2) in de richting van de schacht.

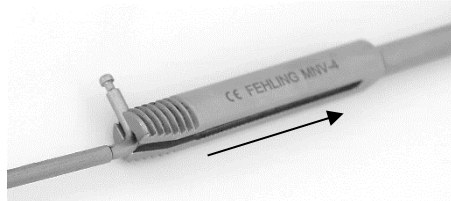


Zorg ervoor dat de uiteinden van de instrumentschuiver (5) en de instrumentschacht (3) in dezelfde richting wijzen.

2. Draai ten slotte de instrumentgreep (1) rechtsom op de schroefdraad van de schacht (3).



3. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

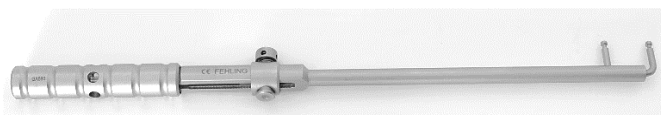

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 0297 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---