


### Assistente nodi e calibro per corde FEHLING

MNV-4, MNV-7, MNV-9



#### 1) Componenti / base della dichiarazione

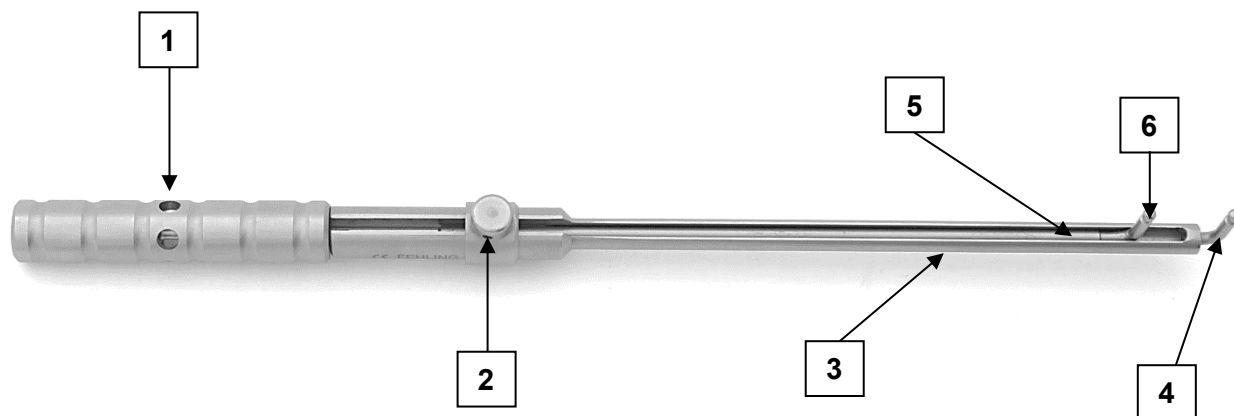

- 1 Impugnatura dello strumento
- 2 Pulsante di sblocco
- 3 Gambo dello strumento
- 4 Estremità di lavoro gambo
- 5 Cursore dello strumento
- 6 Estremità di lavoro cursore


#### 2) Smontaggio

1. Ruotare l'impugnatura dello strumento (1) in senso antiorario fino a sbloccarla (1) completamente.
2. Nella fase successiva, rimuovere il cursore dello strumento (5). A tal fine, premere il pulsante di sblocco (2) verso l'asta e contemporaneamente estrarre completamente la guida dello strumento (5) verso l'estremità del gambo.
3. Lo strumento, smontato nelle sue tre singole parti, può ora essere ricondizionato.

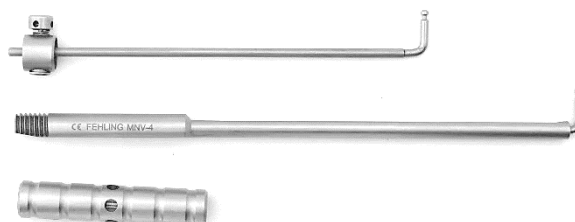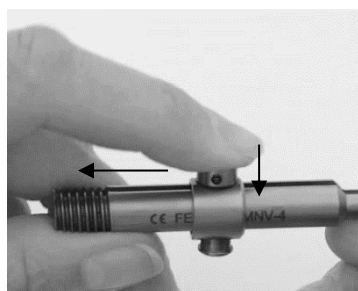

### 3) Montaggio

1. Inserire il cursore dello strumento (5) nell'estremità del gambo e spingerla oltre la filettatura in direzione dell'estremità di lavoro (4). Nel frattempo, premere il pulsante di sblocco (2) verso il gambo.

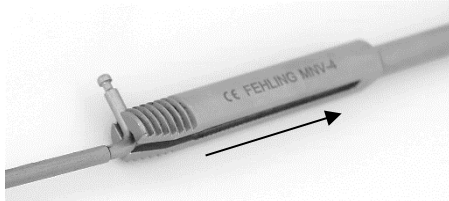


Assicurarsi che le estremità di lavoro del cursore dello strumento (5) e del gambo dello strumento (3) siano rivolte nella stessa direzione.

2. Infine, ruotare l'impugnatura dello strumento (1) in senso orario sulla filettatura del gambo (3).



3. Lo strumento assemblato è ora pronto per l'uso dopo un test funzionale.

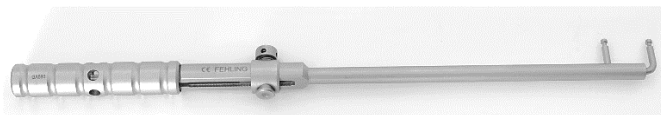

| Simboli                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se indicati sul dispositivo medico o sull'etichetta del dispositivo medico o sulle istruzioni per l'uso, i simboli hanno il seguente significato, in conformità alla norma DIN EN ISO 15223-1: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| <br>Fabbricante                                                                                               | <br>Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni elettroniche per l'uso                                                                                                                                        | <br>Attenzione      |
| <br>Numero di catalogo                                                                                        | <br>Codice lotto                                                                                                                                                                                                                | <br>Numero di serie |
| <br>Dispositivo medico                                                                                        | <br>Identificativo unico del dispositivo                                                                                                                                                                                        | <br>Marcatura CE   |
| <br>Lattina d'olio per le aree da lubrificare                                                                | <br>Marcatura CE                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Contattare il fabbricante                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                             | FEHLING INSTRUMENTS GmbH<br>Seligenstädter Str. 100<br>63791 Karlstein/Germania<br>Tel.: +49 (0) 6188-9574-40<br>Fax: +49 (0) 6188-9574-45<br>E-Mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a><br><a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a> |                                                                                                        |