


NARZĘDZIE DO POMIARU STRUN ŚCIĘGNISTYCH -CHORDAE I ASYSTENT WIĄZANIA SZWÓW FEHLING

MNV-4, MNV-7, MNV-9


1) Elementy składowe / podstawa opisu

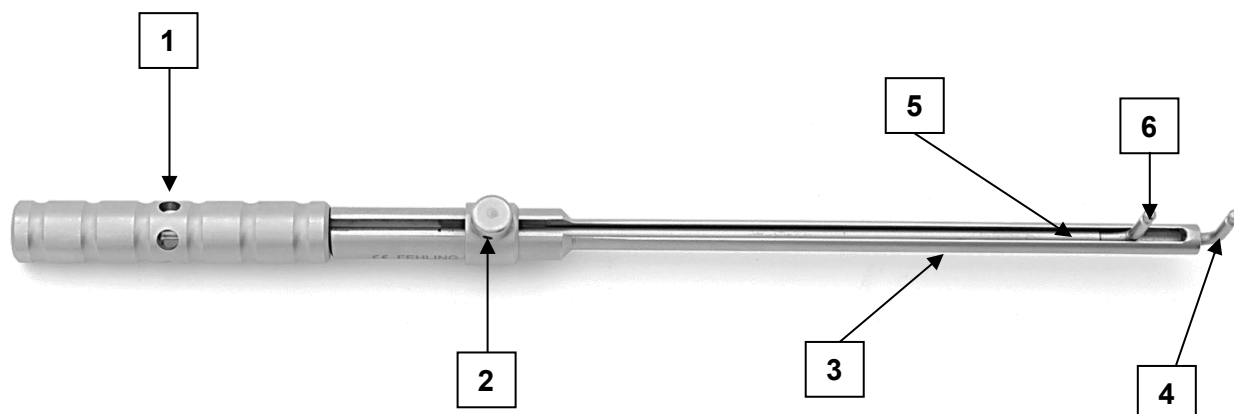


- 1 uchwyt
- 2 przycisk odblokowujący
- 3 trzon
- 4 końcówka robocza trzonu
- 5 suwak
- 6 końcówka robocza suwaka

2) Demontaż

- Obrócić uchwyt (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż uchwyt (1) całkowicie odłączy się od narzędzia.
- Zdemontować suwak (5). W tym celu należy nacisnąć przycisk odblokowujący (2) w stronę trzonu i jednocześnie pociągnąć suwak (5) w kierunku końca trzonu, aż do jego całkowitego wysunięcia.

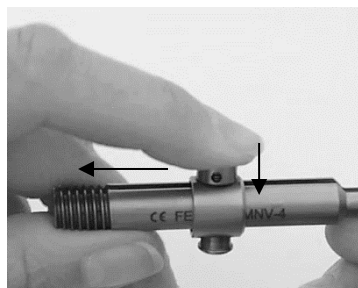


3. Narzędzie rozłożone na trzy części można teraz poddać reprocessowaniu.

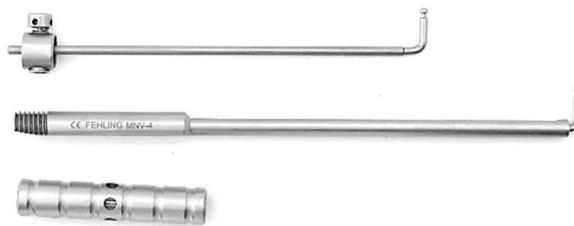

3) Montaż

1. Założyć suwak (5) na końcówkę trzonu i wsunąć go przez gwint w kierunku końcówki roboczej (4). Jednocześnie nacisnąć przycisk odblokowujący (2) w stronę trzonu.

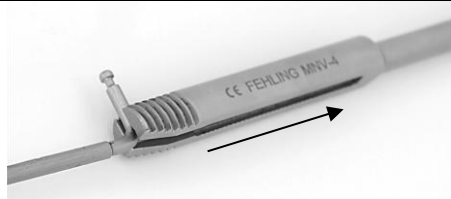

Końcówki robocze suwaka (5) i trzonu (3) muszą być ułożone w tym samym kierunku.

2. Na koniec wkręcić uchwyt (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara na gwint trzonu (3).



3. Zmontowane narzędzie jest teraz gotowe do ponownego użycia po wykonaniu testu działania.



Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	