


## FEHLING ÉCARTEUR À BARRES AVEC UN PIGNON

Valable pour tous les écarteurs à barres avec un pignon

### 1) Composants / base de la déclaration


À titre d'exemple : MBT-4

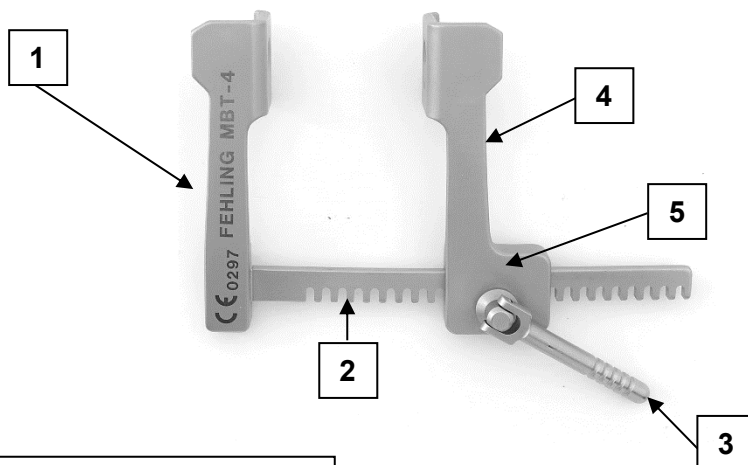


- 1 Bras fixe de l'écarteur
- 2 Crémaillère
- 3 Levier d'entraînement
- 4 Bras mobile de l'écarteur
- 5 Boîte

### 2) Démontage


1. En tournant le levier d'entraînement (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, transporter le bras mobile de l'écarteur (4) sur la crémaillère (2) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il puisse être retiré.

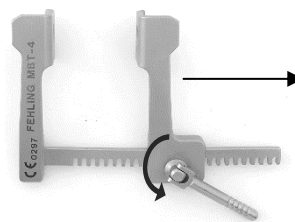

2. Dans un deuxième temps, retirer le levier d'entraînement (3).

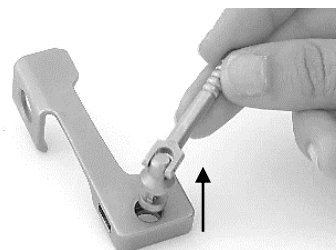


3. L'instrument démonté en ses trois parties peut maintenant être retraité.

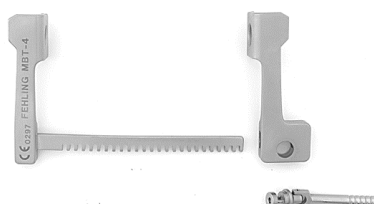


### 3) Montage

1. Insérer d'abord le levier d'entraînement (3) dans l'évidement prévu à cet effet dans la boîte (5).

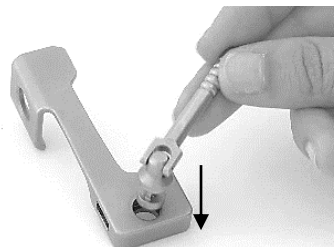


2. Introduire la crémaillère (2) dans l'évidement de la boîte (5) jusqu'à ce que le pignon du levier d'entraînement (3) s'engage dans la crémaillère (2).

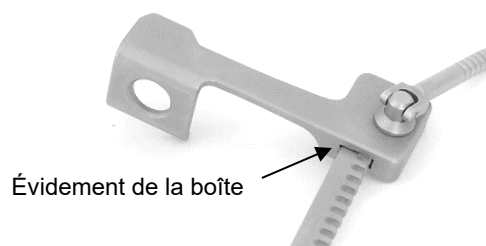


Veiller à ce que les deux bras de l'écarteur soient orientés dans la même direction.

3. En tournant le levier d'entraînement (3) dans le sens des aiguilles d'une montre, transporter le bras mobile de l'écarteur (4) sur la crémaillère (2) vers l'intérieur en direction du bras fixe de l'écarteur (1).

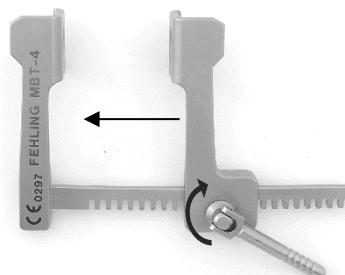

4. L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.

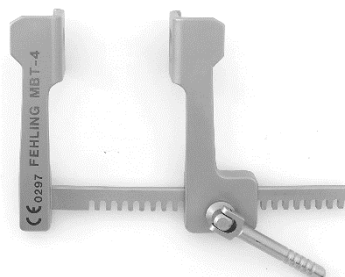

## Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Fabricant                                      | <br>Consulter le mode d'emploi ou<br>consulter le mode d'emploi<br>électronique | <br>Attention            |
| <br>Numéro du catalogue                            | <br>Code de lot                                                                 | <br>Numéro de série      |
| <br>Dispositif médical                             | <br>Identifiant unique des dispositifs                                          | <br>0297<br>Marquage CE |
| <br>Burette d'huile pour les<br>zones à lubrifier | <br>Marquage CE                                                                |                                                                                                             |

## Contactez le fabricant

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FEHLING INSTRUMENTS GmbH<br>Seligenstädter Str. 100<br>63791 Karlstein/Germany<br>Tél. : +49 (0) 6188-9574-40<br>Fax : +49 (0) 6188-9574-45<br>E-Mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a><br><a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|