


### FEHLING RAMRETRAKTOR MED DREV

Gäller alla ramretraktorer med drev

#### 1) Komponenter / grund för deklaration


Exempel: MBT-4

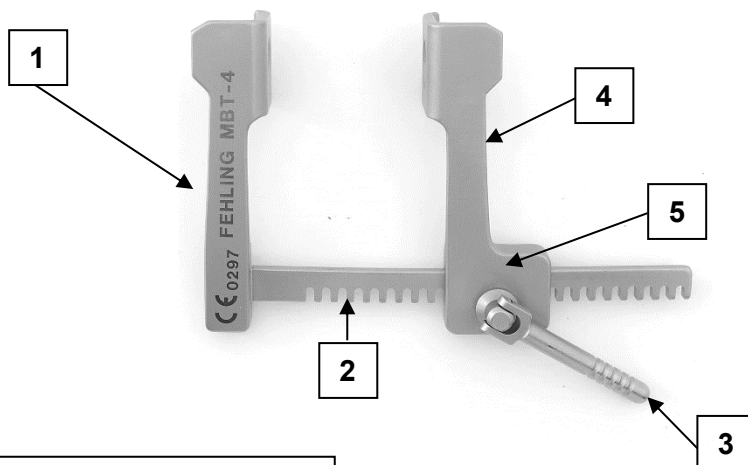


- 1 Fast retraktorarm
- 2 Kuggstången
- 3 Drivspak
- 4 Flyttbar retraktorarm
- 5 Box

#### 2) Demontering


1. Vrid drivspaken (3) moturs för att flytta den rörliga retraktorarmen (4) längs kuggstången (2) utåt, tills den kan tas bort.

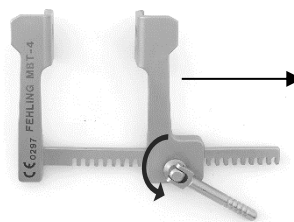

2. I det andra steget tar du bort drivspaken (3).

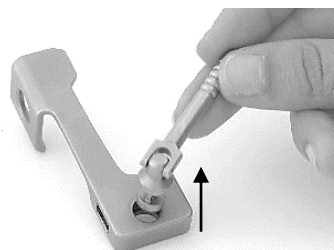


3. Instrumentet, som demonterats i sina tre enskilda delar, kan nu reprocessas.

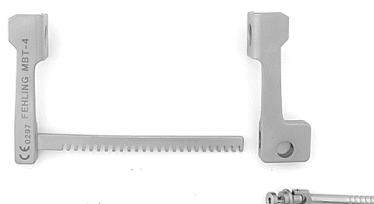


## 3) Montering

1. För först in drivspaken (3) i urtaget som finns i boxen (5).

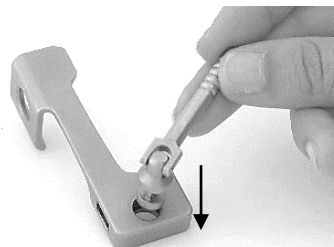


2. Skjut in kuggstången (2) i urtaget i boxen (5) tills drivspakens (3) kugghjul griper in i kuggstången (2).

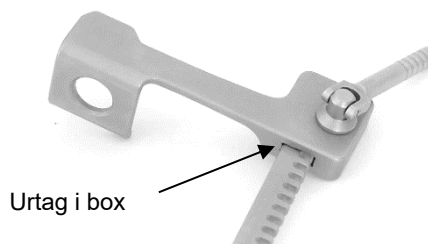


Se till att båda retraktorarmarna pekar åt samma håll.

3. Vrid drivspaken (3) medurs för att flytta den rörliga retraktorarmen (4) på kuggstången (2) inåt mot den fasta retraktorarmen (1).

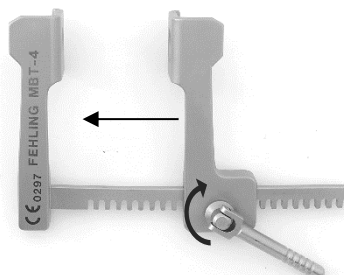

4. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

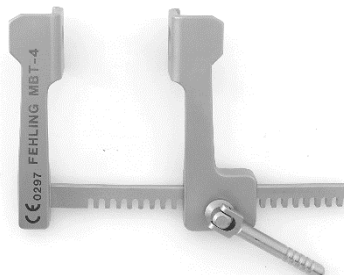

| Symboler                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| <br>Tillverkare                                              | <br>Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen                                                                                                                                                                | <br>Viktigt     |
| <br>Katalognummer                                            | <br>Batchkod                                                                                                                                                                                                                   | <br>Serienummer |
| <br>Medicinteknisk produkt                                   | <br>Unik enhetsidentifierare                                                                                                                                                                                                   | <br>CE-märkning |
| <br>Oljekanna för smörjställen                               | <br>CE-märkning                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| Tillverkarens kontaktuppgifter                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                            | FEHLING INSTRUMENTS GmbH<br>Seligenstädter Str. 100<br>63791 Karlstein / Tyskland<br>Tel: +49 (0)6188-957 440<br>Fax: +49 (0)6188-957 445<br>E-Mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a><br><a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a> |                                                                                                    |