


Braccio di serraggio FEHLING LEYLA IN TITANIO

NGA-1, NGA-2, NEA-3


1) Componenti / base della dichiarazione

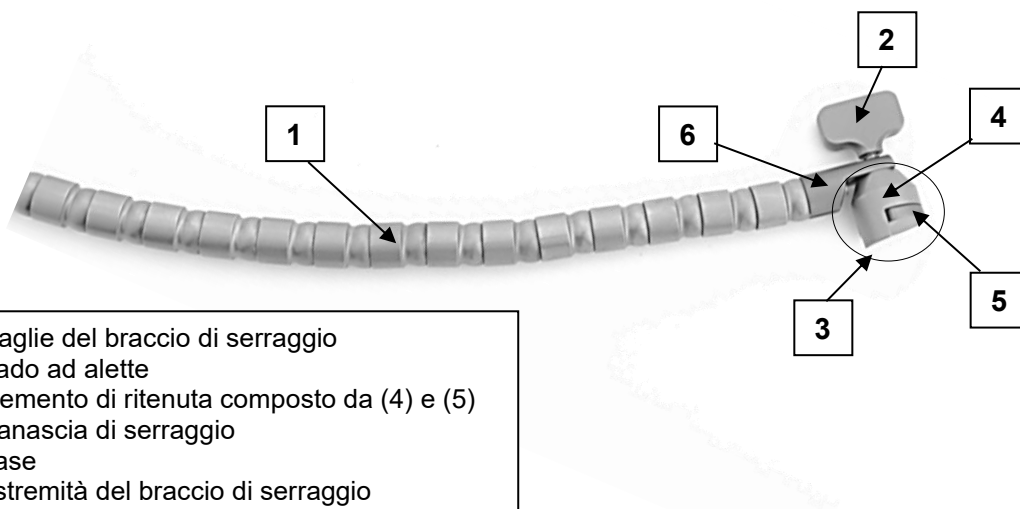


- 1 Maglie del braccio di serraggio
- 2 Dado ad alette
- 3 Elemento di ritenuta composto da (4) e (5)
- 4 Ganascia di serraggio
- 5 Base
- 6 Estremità del braccio di serraggio

2) Smontaggio


1. Ruotare il dado ad alette (2) in senso antiorario fino ad allentarlo completamente dalla filettatura. Nel frattempo, tenere saldamente l'elemento di fissaggio (3).
2. Rimuovere l'elemento di tenuta (3), composto da due parti, dall'incavo all'estremità del braccio di serraggio (6).

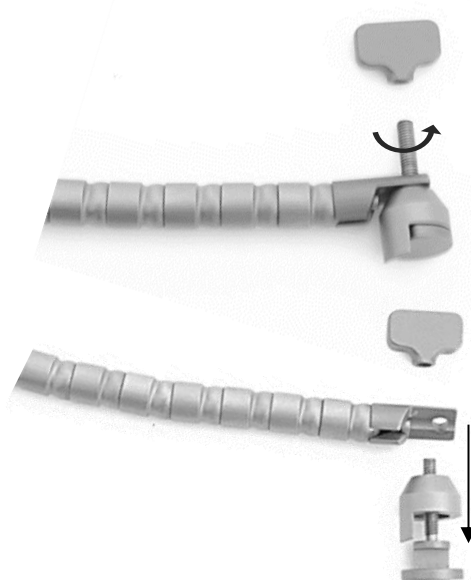

3. Estrarre quindi la ganascia di bloccaggio (4) dalla base (5).

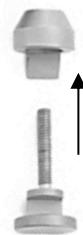

4. Lo strumento, smontato nelle sue singole parti, può ora essere ricondizionato.

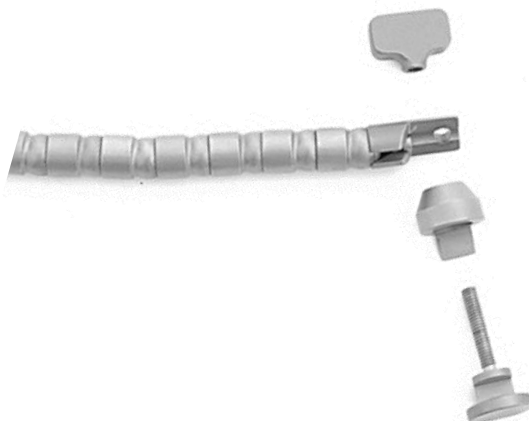

3) Montaggio

1. Posizionare la ganascia (4) sulla filettatura della base (5).




2. Inserire quindi l'elemento di tenuta (3) con la filettatura nell'incavo dell'estremità del braccio di serraggio (6).



Quando si inseriscono la ganascia (4) e la base (5), assicurarsi che il lato piatto fresato dell'estremità del braccio di serraggio sia rivolto verso l'elemento di fissaggio.

3. Posizionare il dado ad alette (2) sulla filettatura dell'elemento di fissaggio (3) e serrare in senso orario.

4. Lo strumento assemblato è ora pronto per l'uso dopo un test funzionale.

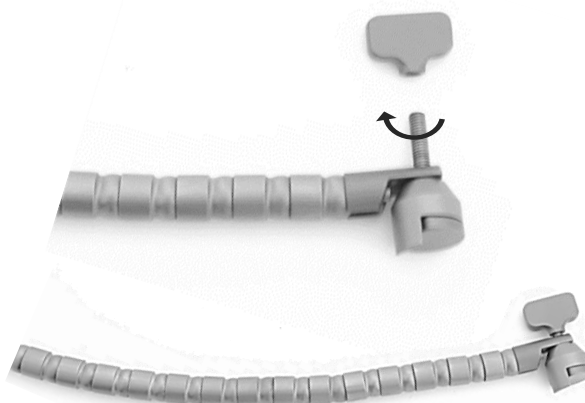

Simboli

Se indicati sul dispositivo medico o sull'etichetta del dispositivo medico o sulle istruzioni per l'uso, i simboli hanno il seguente significato, in conformità alla norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabbricante	 Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni elettroniche per l'uso	 Attenzione
 Numero di catalogo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Dispositivo medico	 Identificativo unico del dispositivo	 0297 Marcatura CE
 Lattina d'olio per le aree da lubrificare	 Marcatura CE	

Contattare il fabbricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	--	---