


FEHLING BRAZO DE SUJECCIÓN DE TITANIO LEYLA


NGA-1, NGA-2, NEA-3

1) Componentes / Base explicativa

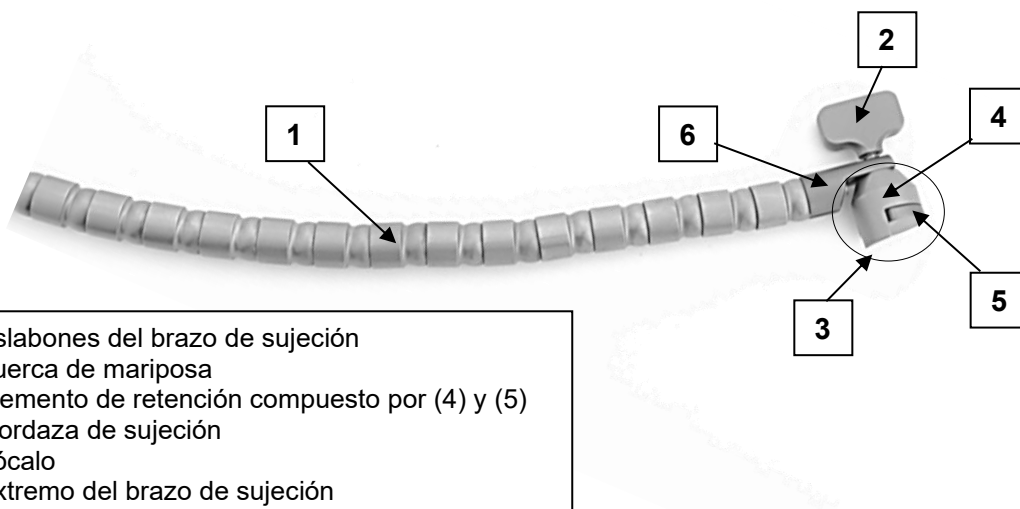


2) Desmontaje


1. Gire la tuerca de mariposa (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta aflojarla completamente de la rosca. Mientras tanto, sujete firmemente el elemento de retención (3).
2. Retire el elemento de sujeción (3), que consta de dos piezas, del hueco situado en el extremo del brazo de sujeción (6).

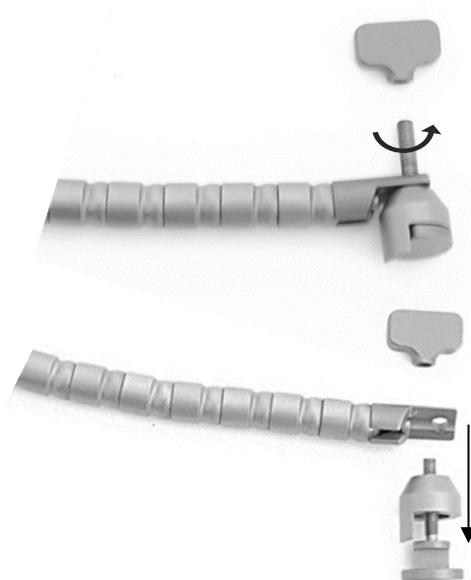

3. A continuación, extraiga la mordaza de sujeción (4) del zócalo (5).

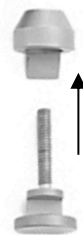

4. El instrumento, desmontado en sus piezas individuales, ya puede reprocesarse.

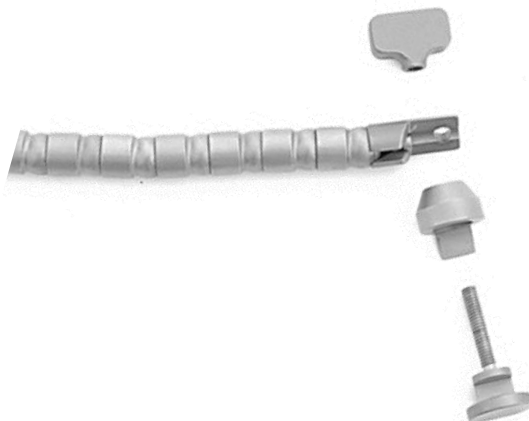

3) Montaje

1. Coloque la mordaza de sujeción (4) en la rosca del zócalo (5).




2. A continuación, introduzca el elemento de sujeción (3) con la rosca en el hueco del extremo del brazo de sujeción (6).



Al introducir la mordaza de sujeción (4) y el zócalo (5), asegúrese de que el lado plano fresado del extremo del brazo de sujeción esté orientado hacia el elemento de retención.

3. Coloque la tuerca de mariposa (2) en la rosca del elemento de retención (3) y apriétela en el sentido de las agujas del reloj.

4. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

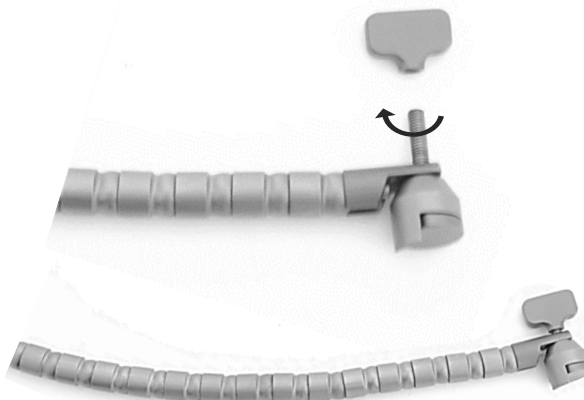

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 0297 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	--	---