


FEHLING LEYLA SPÄNNARM I TITAN

NGA-1, NGA-2, NEA-3


1) Komponenter / grund för deklaration

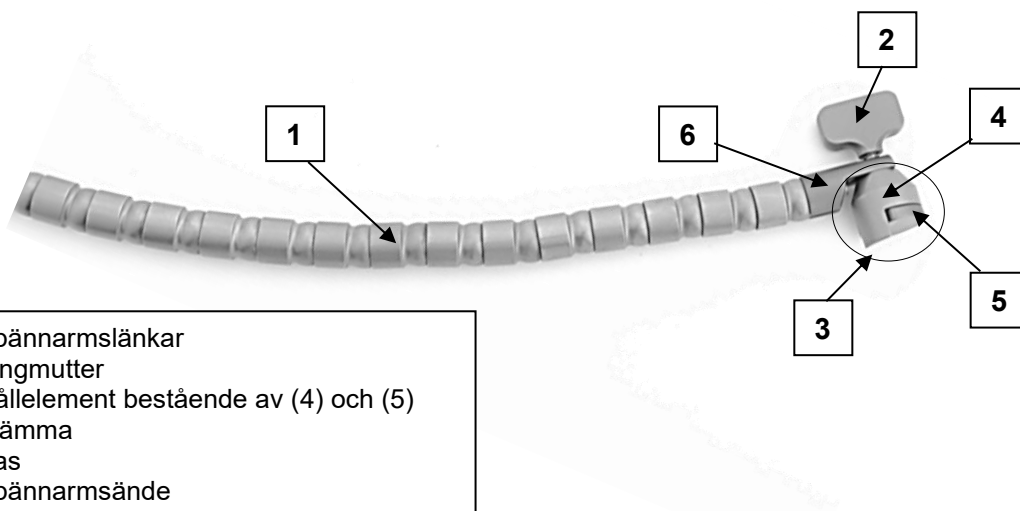


- 1 Spännarmslänkar
- 2 Vingmutter
- 3 Hållelement bestående av (4) och (5)
- 4 Klämma
- 5 Bas
- 6 Spännarmsände

2) Demontering


1. Vrid vingmuttern (2) moturs tills den helt lossat från gängan. Håll under tiden fast hållelementet (3) ordentligt.
2. Ta bort det tvådelade hållelementet (3) från spännarmsändens (6) urtag.

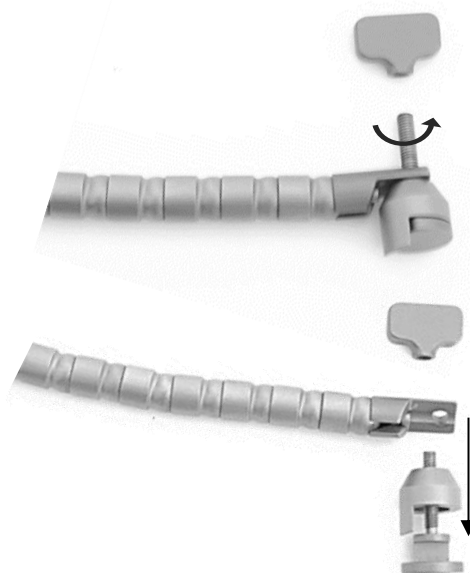

3. Dra sedan bort klämman (4) från basen (5).

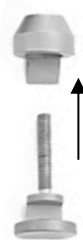

4. Instrumentet, som demonterats i sina enskilda delar, kan nu reprocessas.

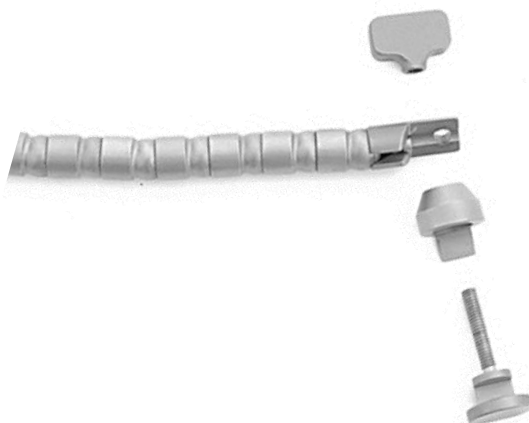

3) Montering

1. Placera klämman (4) på gängan på basen (5).




2. För sedan in hållelementet (3) med gängan i spännarmsändens (6) urtag.



Se till att den flata frästa sidan av spännarmens ände är vänd mot hållelementet vid införandet av klämman (4) och basen (5).

3. Placera vingmuttern (2) på hållementets (3) gänga och dra medurs.

4. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

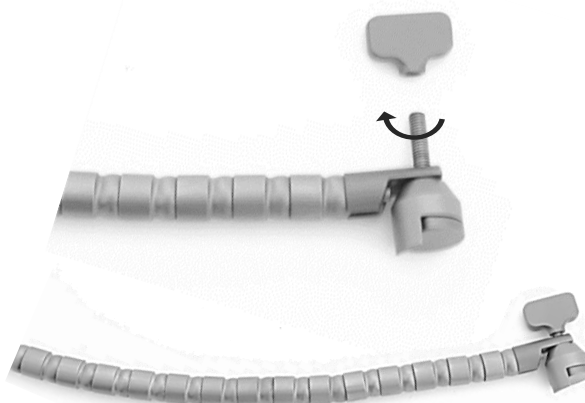

Symboler

Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:

 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	

Tillverkarens kontaktuppgifter

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---