


FEHLING LEYLA TITAN BRAS DE SERRAGE

NGA-1, NGA-2, NEA-3


1) Composants / base de la déclaration

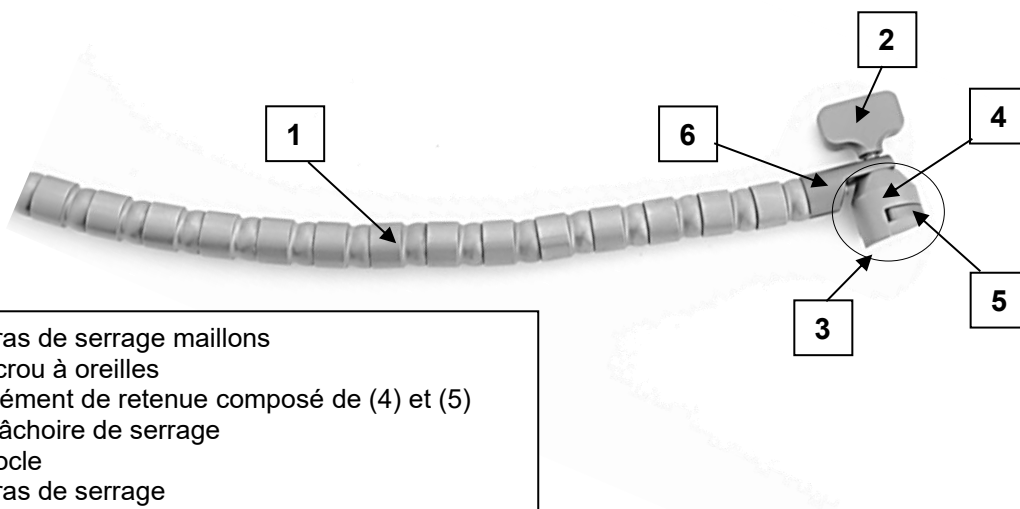


- 1 Bras de serrage maillons
- 2 Écrou à oreilles
- 3 Élément de retenue composé de (4) et (5)
- 4 Mâchoire de serrage
- 5 Socle
- 6 Bras de serrage

2) Démontage


1. Tourner l'écrou à oreilles (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré du filetage. Pendant ce temps, maintenir l'élément de retenue (3).
2. Retirer l'élément de retenue (3) composé de deux parties de l'évidement à l'extrémité du bras de serrage (6).

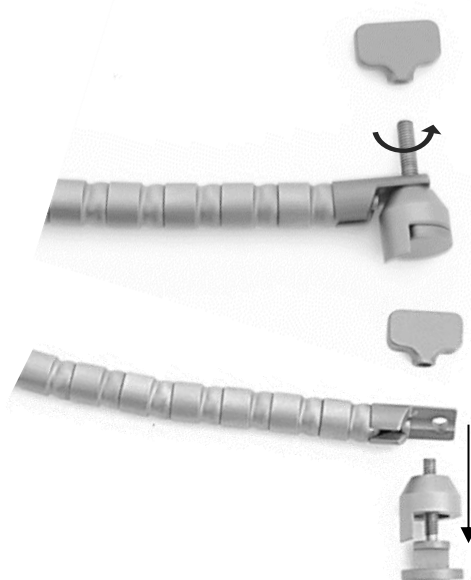

3. Retirer ensuite la mâchoire de serrage (4) du socle (5).

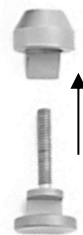

4. L'instrument démonté en pièces détachées peut maintenant être préparé.

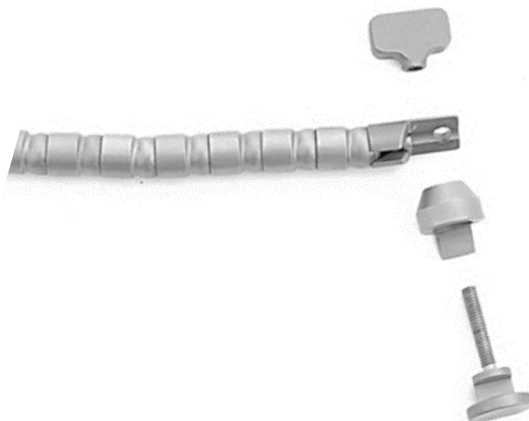

3) Montage

1. Placer la mâchoire de serrage (4) sur le filetage du socle (5).




2. Insérer ensuite l'élément de retenue (3) avec le filetage dans l'évidement de l'extrémité du bras de serrage (6).



Veiller à ce que le côté fraisé à plat de l'extrémité du bras de serrage soit orienté vers l'élément de retenue lors de l'insertion de la mâchoire de serrage (4) et du socle (5).

3. Placer l'écrou à oreilles (2) sur le filetage de l'élément de retenue (3) et le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.

4. L'instrument assemblé est maintenant prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.

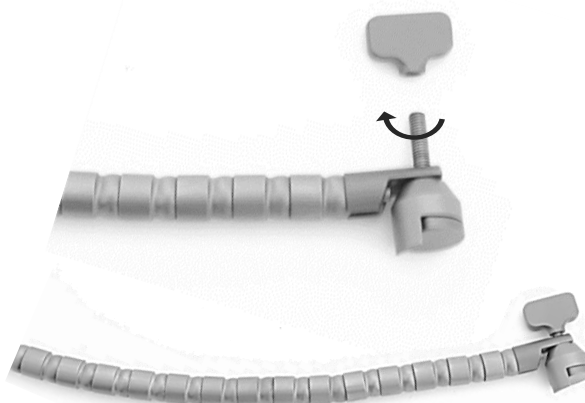

Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention
 Numéro du catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	

Contactez le fabricant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---