


FEHLING LEYLA TITANIUM KLEMARM

NGA-1, NGA-2, NEA-3


1) Bestanddelen / verklarende basis

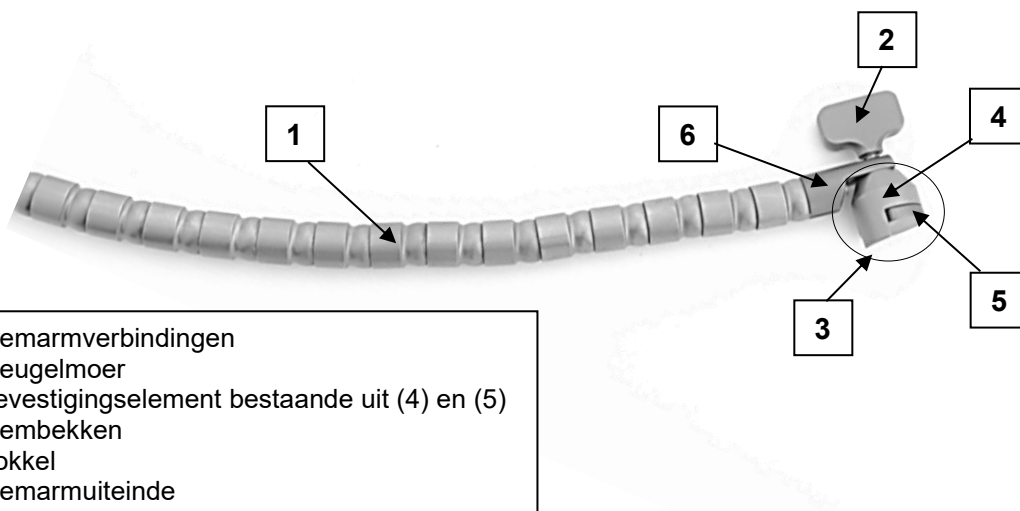


- 1 Klemarmverbindingen
- 2 Vleugelmoer
- 3 Bevestigingselement bestaande uit (4) en (5)
- 4 Klembekken
- 5 Sokkel
- 6 Klemarmuiteinde

2) Demontage


1. Draai de vleugelmoer (2) linksom totdat deze helemaal los is van de schroefdraad. Houd ondertussen het vasthoudelement (3) stevig vast.
2. Verwijder het vasthoudelement (3), dat uit twee delen bestaat, uit de uitsparing aan het einde van de klemarm (6).

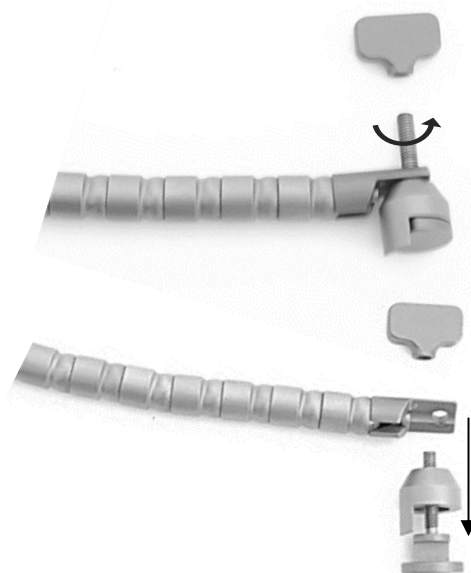

3. Trek vervolgens de klembek (4) van de sokkel (5).

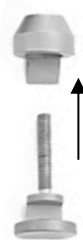

4. Het uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.

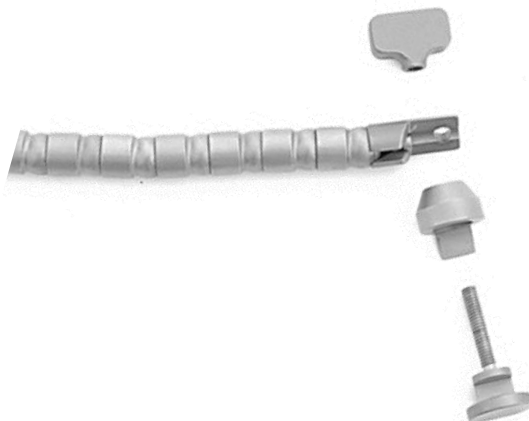

3) Montage

1. Plaats de klembek (4) op de schroefdraad van de sokkel (5).




2. Steek vervolgens het vasthoudelement (3) met de schroefdraad in de uitsparing van het uiteinde van de klemarm (6).



Zorg ervoor dat de vlakke zijde van het uiteinde van de spanarm naar het vasthoudelement gericht is bij het plaatsen van de spanbek (4) en de sokkel (5).

3. Plaats de vleugelmoer (2) op de schroefdraad van het vasthoudelement (3) en draai rechtsom vast.

4. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

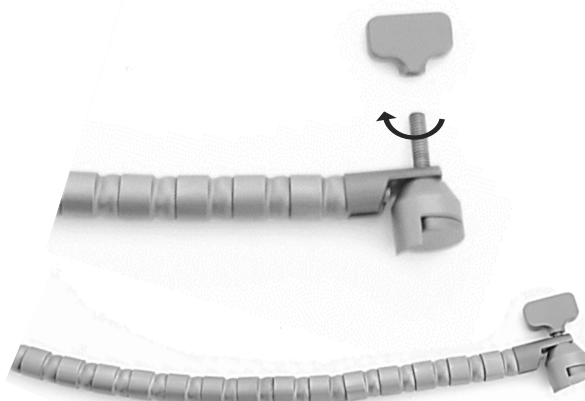

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---