


TYTANOWE RAMIĘ MOCUJĄCE LEYLA FEHLING

NGA-1, NGA-2, NEA-3


1) Elementy składowe / podstawa opisu

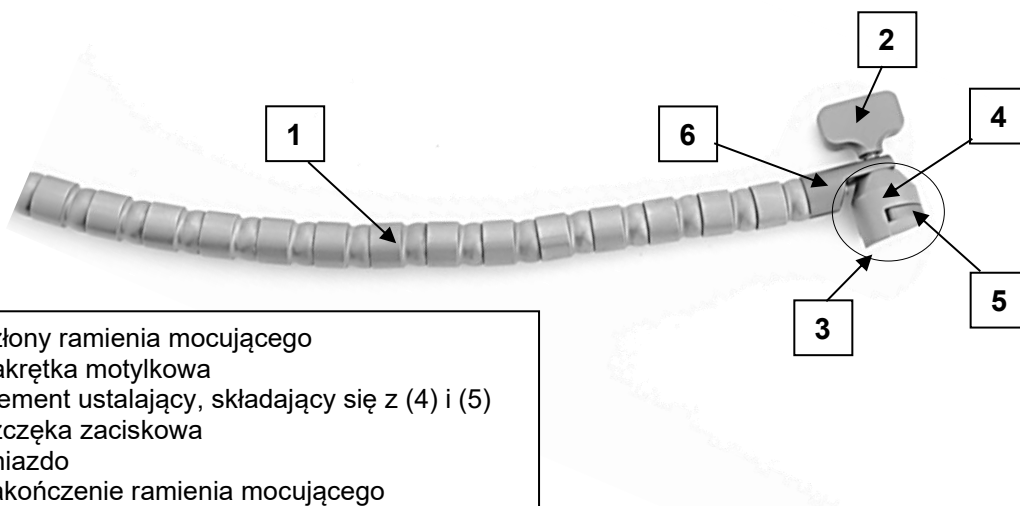


- 1 człon ramienia mocującego
- 2 nakrętka motylkowa
- 3 element ustalający, składający się z (4) i (5)
- 4 szczeka zaciskowa
- 5 gniazdo
- 6 zakończenie ramienia mocującego

2) Demontaż


1. Obrócić nakrętkę motylkową (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż całkowicie odłączy się od gwintu. Jednocześnie przytrzymywać element ustalający (3).
2. Wyjąć dwuczęściowy element ustalający (3) z wycięcia w zakończeniu ramienia mocującego (6).

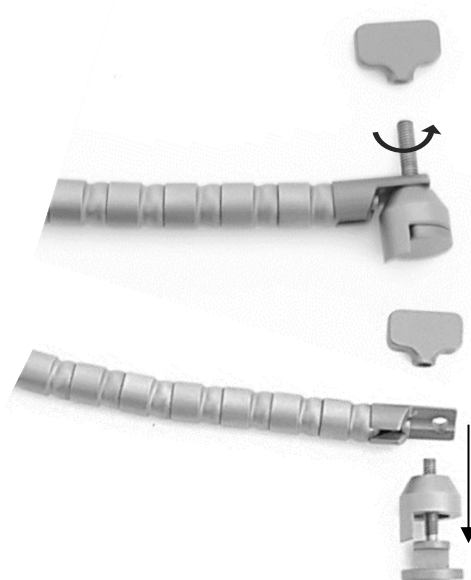

3. Następnie wyciągnąć szczękę zaciskową (4) z gniazda (5).

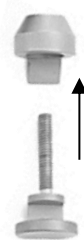

4. Narzędzie rozłożone na części można teraz poddać reprocessowaniu.

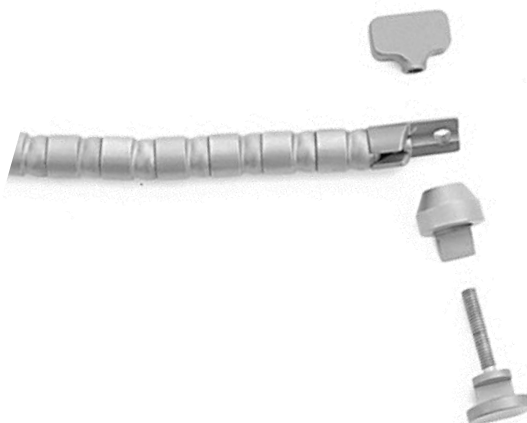

3) Montaż

1. Założyć szczękę zaciskową (4) na gwint gniazda (5).




2. Następnie włożyć element ustalający (3) z gwintem w wycięcie w zakończeniu ramienia mocującego (6).



Podczas wkładania szczęki zaciskowej (4) i gniazda (5) należy upewnić się, że frezowana na płasko strona końca ramienia mocującego jest skierowana w stronę elementu ustalającego.

3. Założyć nakrętkę motylkową (2) na gwint elementu ustalającego (3) i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.

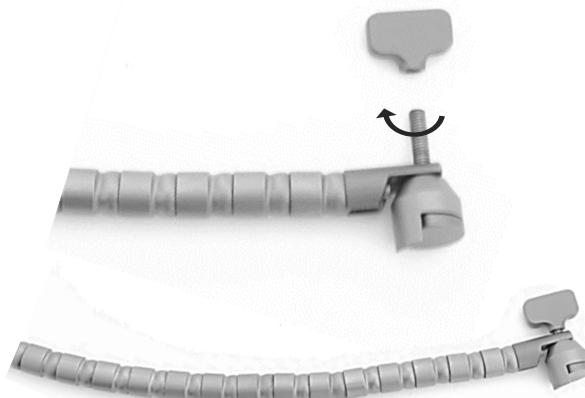

Symbole

Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:

 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	

Dane kontaktowe producenta

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---