


FEHLING FIXERINGSKLÄMMA FÖR OPERATIONSBORD

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Komponenter / grund för deklaration

Exempel: EEJ-1

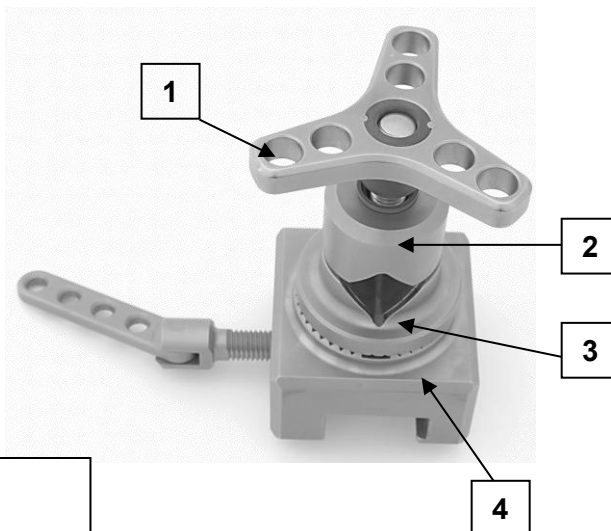


- 1 Stjärngrepp
- 2 Klämmans övre del
- 3 Klämmans undre del
- 4 Bas

2) Demontering

1. Vrid stjärngreppet (1) moturs tills det går att ta bort.




2. Dra först av den övre delen av klämman (2) från gängan på basen (4) och ta sedan bort klämmans (3) nedre del.

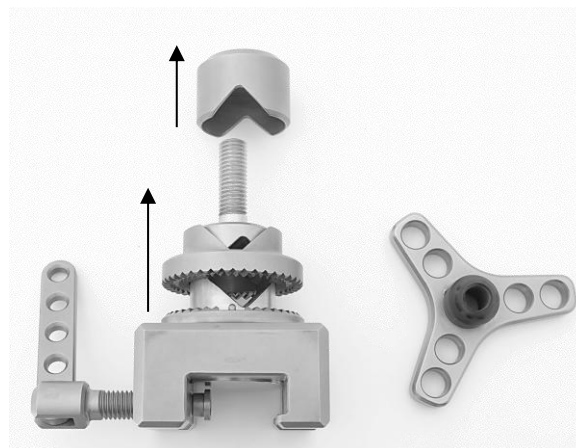

3. Instrumentet, som demonterats i sina enskilda delar, kan nu reprocessas.

3) Montering

1. Placera klämmans (3) nedre del på basen (4) och för sedan in klämmans (2) övre del över basens gänga (4).

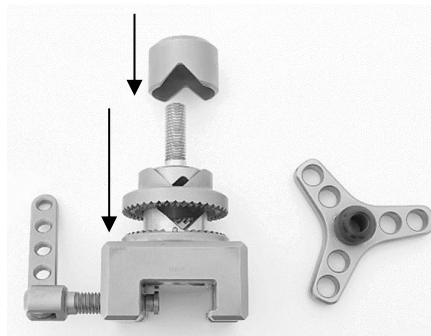

2. Placera stjärngreppet (1) på hållelementets (4) gänga och dra åt medurs.



3. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	
Tillverkarens kontaktuppgifter		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	