


GARRA DE SUJECCIÓN DE LA MESA DE OPERACIONES FEHLING

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Componentes / Base explicativa

Ejemplar: EEJ-1

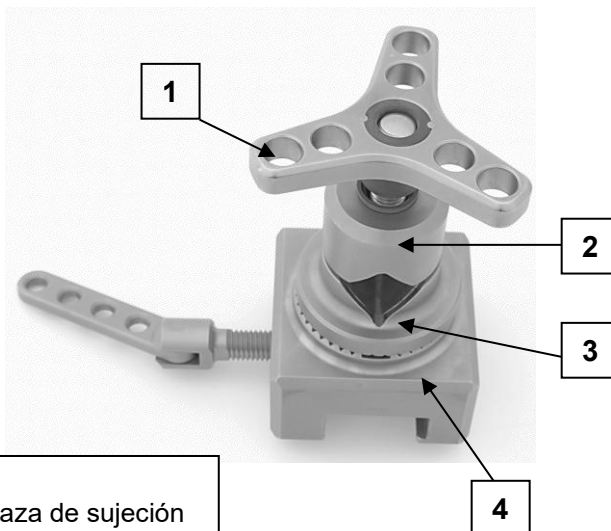


- 1 Empuñadura de estrella
- 2 Parte superior de la mordaza de sujeción
- 3 Parte inferior de la mordaza de sujeción
- 4 Zócalo

2) Desmontaje

1. Gire la empuñadura en estrella (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que pueda retirarse.




2. En primer lugar, extraiga la parte superior de la mordaza de sujeción (2) de la rosca del zócalo (4) y, a continuación, retire la parte inferior de la mordaza de sujeción (3).

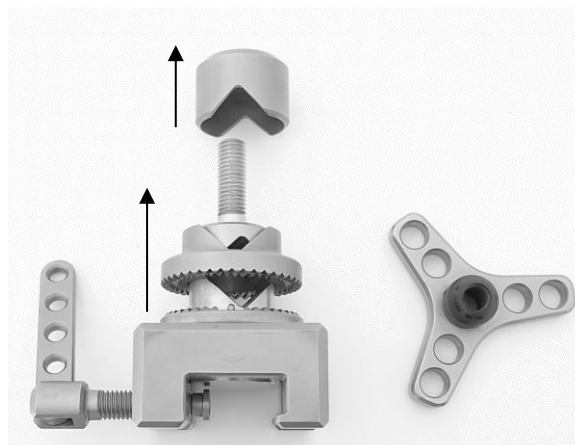

3. El instrumento, desmontado en sus piezas individuales, ya puede reprocesarse.

3) Montaje

1. Coloque la parte inferior de la mordaza de sujeción (3) sobre el zócalo (4) y, a continuación, introduzca la parte superior de la mordaza de sujeción (2) sobre la rosca del zócalo (4).

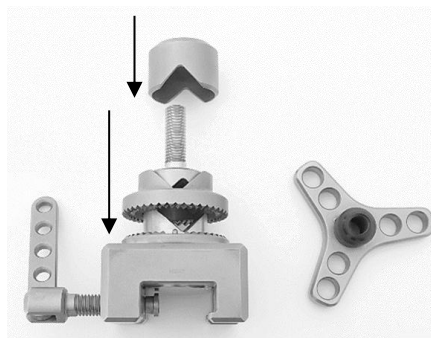

2. Coloque la empuñadura en estrella (1) en la rosca del zócalo (4) y gírela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.



3. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

Símbolos		
Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	
Contacto con el fabricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	