


FEHLING PINCE DE RETENUE POUR TABLE D'OPÉRATION

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Composants / base de la déclaration

À titre d'exemple : EEJ-1

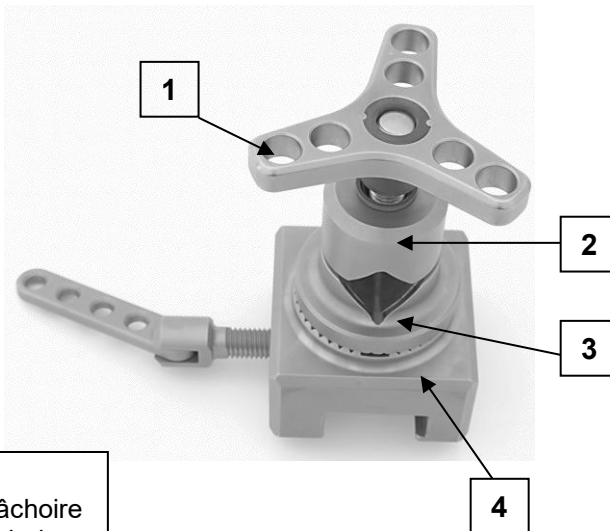


- 1 Poignée étoile
- 2 Partie supérieure de la mâchoire
- 3 Partie inférieure de la mâchoire
- 4 Socle

2) Démontage

1. Tourner la poignée étoile (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée.




2. Retirer d'abord la partie supérieure de la mâchoire de serrage (2) du filetage du socle (4), puis la partie inférieure de la mâchoire de serrage (3).

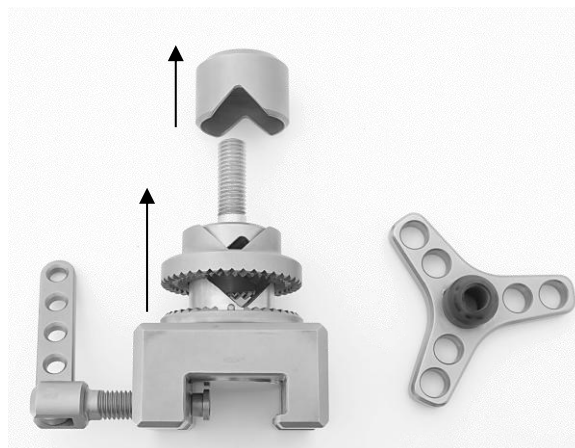

3. L'instrument démonté en pièces détachées peut maintenant être préparé.

3) Montage

1. Placer la partie inférieure de la mâchoire (3) sur le socle (4), puis insérer la partie supérieure de la mâchoire (2) sur le filetage du socle (4).

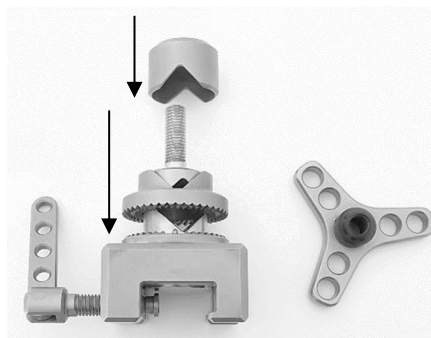

2. Placer la poignée étoile (1) sur le filetage du socle (4) et la serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.

Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention
 Numéro du catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 0297 Marquage CE

Contacter le fabricant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	