


UCHWYT MOCUJĄCY DO STOŁU OPERACYJNEGO FEHLING

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Elementy składowe / podstawa opisu

Przykład: EEJ-1

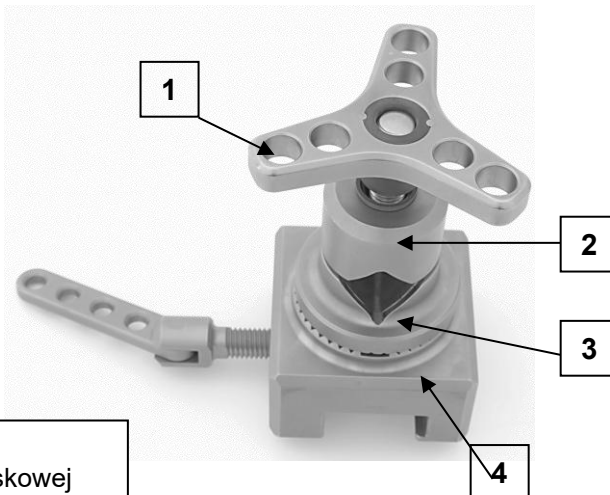


- 1 uchwyt gwiazdowy
- 2 górna część szczęki zaciskowej
- 3 dolna część szczęki zaciskowej
- 4 gniazdo

2) Demontaż

1. Obrócić uchwyt gwiazdowy (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można go wyjąć.




2. Zdjąć górną część szczęki zaciskowej (2) z gwintu gniazda (4), a następnie dolną część szczęki zaciskowej (3).

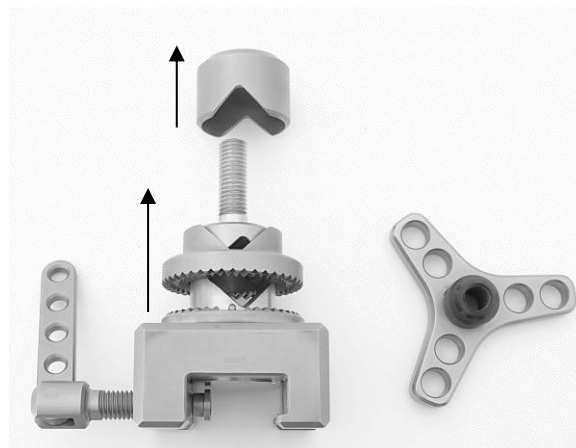

3. Narzędzie rozłożone na części można teraz poddać reprocessowaniu.

3) Montaż

1. Umieścić dolną część szczęki zaciskowej (3) na gnieździe (4), następnie nasunąć górną część szczęki zaciskowej (2) na gwint gniazda (4).
2. Założyć uchwyt gwiazdowy (1) na gwint gniazda (4) i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.

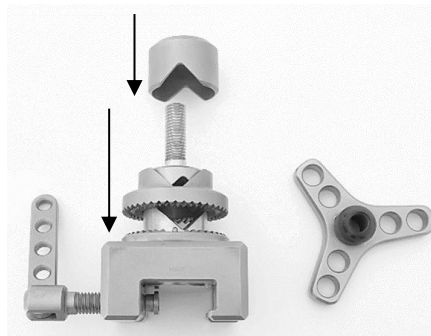

Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	