


KANIULE I KANIULE DO ODSYSANIA Z ODŁĄCZANYM KOSZYCZKIEM FEHLING

Dotyczy wszystkich kaniul i kaniul do odsysania z odłączanym koszyczkiem

1) Elementy składowe / podstawa opisu

Przykład: MNM-3

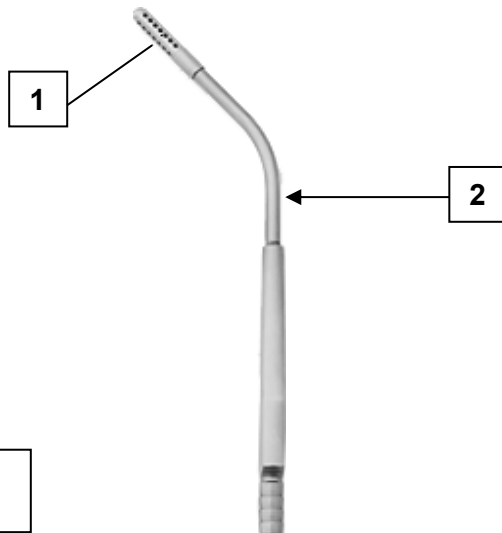

- 1 koszyczek
- 2 kaniula do odsysania / kaniula

2) Demontaż

1. Obrócić koszyczek (1) z przodu kaniuli do odsysania lub kaniuli (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można zdjąć go z gwintu.




2. Narzędzie rozłożone na części można teraz poddać reprocessowaniu.



3) Montaż

1. Założyć koszyczek (1) na gwint z przodu kaniuli do odsysania lub kaniuli (2) i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

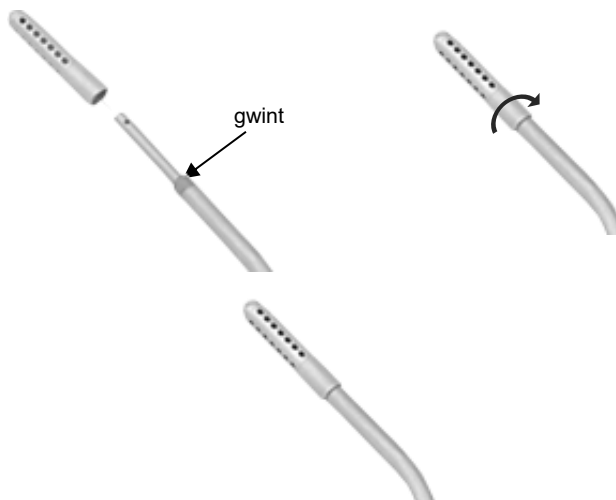

2. Zmontowane narzędzie jest teraz gotowe do ponownego użycia po wykonaniu testu działania.

Symbole

Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:

 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	