


FEHLING HANDGREEP MET SCHROEFHULS


ABB-1, ABB-1F, ABB-2, ABB-3, ABB-5, ABB-6

1) Bestanddelen / verklarende basis

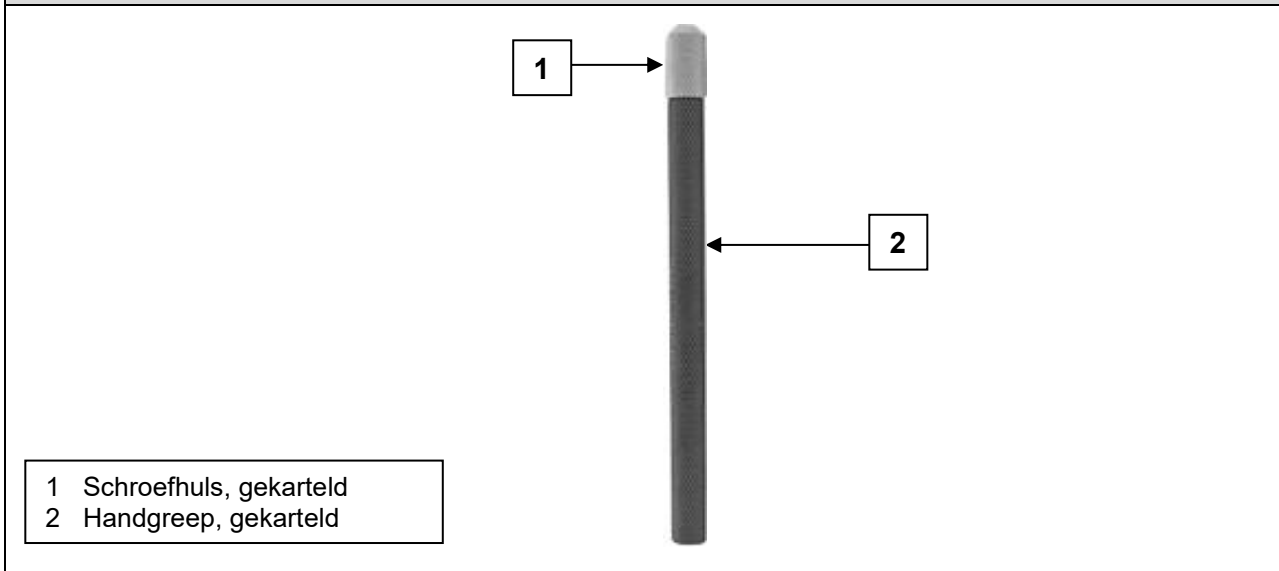

2) Demontage

1. Draai de schroefhuls (1) aan de voorkant van de greep (2) linksom totdat deze uit de schroefdraad kan worden verwijderd.

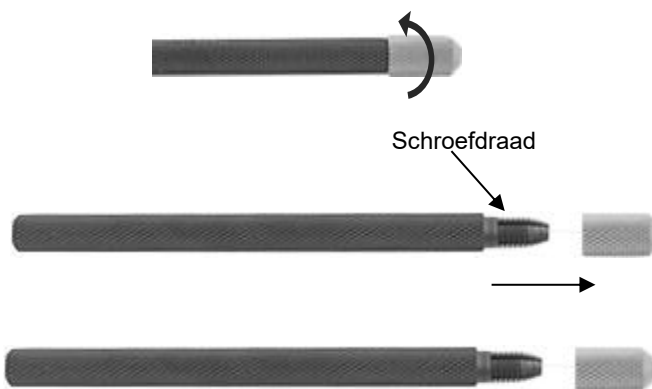


2. Het uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.



De schroefhuls (1) hoeft alleen maar losgedraaid te worden om de schacht van de greep (2) te wisselen of verwijderen.

3) Montage

- Plaats de schroefhuls (1) op de schroefdraad aan de voorkant van de greep (2) en draai rechtsom om vast te draaien.

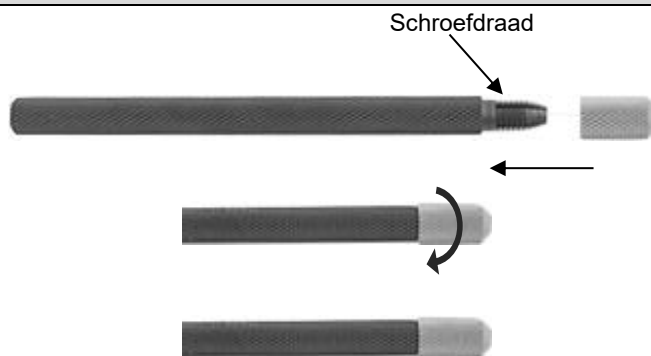

- Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.



De schroefhuls (1) hoeft alleen maar losgedraaid te worden om de schacht van de greep (2) te wisselen of verwijderen.

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 0297 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---